



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### BESCHREIBUNG:

Alloybond ist ein Fluoride freisetzendes Amalgam-Bond mit hoher Haftung. Die Doppelbindungen der Dimethacrylate Resin verleihen diesem Produkt überlegene Haftfestigkeit. Alloybond enthält weder BisGMA noch Bis-Phenol A.

### ANWENDUNG:

Zahn isolieren und Kavität vorbereiten.

Achtung: Die Matrix muß vor Gebrauch gewachst werden. Verwenden Sie keine Cavity Varnish. Calcium-Hydroxyd-Liner ist nicht notwendig.

1. Zahnoberfläche und (falls vorhanden) Glas-Ionomer-Liner für 20 Sekunden mit 37% iger Phosphorsäure anätzen.
2. Gründlich spülen
3. Überschüssiges Wasser entfernen, leicht feucht halten.
4. Alloybond Primer auf alle inneren Oberflächen auftragen.
5. Vorsichtig für 2 Sekunden mit ölfreier Luft trocknen um Lösungsmittel verdampfen zu lassen. Oberfläche muß glänzend erscheinen.
6. Für 10 Sekunden lichthärten.
7. Jeweils einen Tropfen Alloybond Base und Alloybond Catalyst auf dem Mischpad vermischen.
8. Mischung auf alle inneren Oberflächen auftragen.
9. Amalgam mischen.
10. Amalgam innerhalb von 60 Sekunden nach Auftragen der Alloybond Base und Catalyst Mischung kondensieren und schnitzen, oder innerhalb von 60 Sekunden Komposite applizieren.

### SICHERHEITSHINWEISE:

1. Vermeiden Sie Säurekontakt mit oralem Gewebe, Augen und Haut. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit Wasser spülen. Im Falle von Kontakt mit den Augen einen Arzt aufsuchen.
2. Vermeiden Sie unnötigen, längeren Kontakt mit der Haut oder oralem Gewebe, da dies in Ausnahmefällen zu Entzündungen im oralen Gewebe oder Hautrötungen führen könnte.
3. Bei empfindlichen Personen läßt sich eine Sensibilisierung durch Alloybond nicht ausschließen. Sollten entsprechende Reaktionen auftreten, ist die Verwendung von Alloybond einzustellen.
4. **Für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

ACHTUNG: Dieses Produkt ist ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt.

### AUFBEWAHRUNGSHINWEISE:

1. Lagerung von Alloybond bei Temperaturen zwischen 10°C - 20°C (50°F-68°F).
2. Vor Anwendung sollte Alloybond Raumtemperatur annehmen.
3. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
4. Nach Gebrauch Flaschen wieder verschließen.

### INHALT:

#### **Alloybond Kit**

Artikelnummer 5544001  
1 x 5ml Alloybond Primer  
1x 5ml Alloybond Base  
1x 5ml Alloybond Catalyst  
1x 2ml Einzelspritze Super Etch Ätzgel  
Pinsel, Halter, Mischpad  
25 Einwegtips für Super Etch Ätzgel

#### Nachfüllpackungen:

##### **Alloybond Primer**

Artikelnummer 5544011  
1 x 5ml Alloybond Primer

##### **Alloybond Base**

Artikelnummer 5544010  
1x 5ml Alloybond Base

##### **Alloybond Catalyst**

Artikelnummer 5544012  
1x 5ml Alloybond Catalyst



Hergestellt in Australien  
von SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australien 1 800 337 003  
Österreich 00800 022 55 734  
Brasilienl 0800 770 1735  
Frankreich 00800 022 55 734  
Deutschland 0800 100 5759  
Irland 01 886 9577  
Italien 800 780625  
Neuseeland 0800 734 034  
Spanien 00800 022 55 734  
UK 00800 022 55 734  
USA & Kanada 1 800 228 5166  
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublin 9, Irland  
Tel +353 1 886 9577