



INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO:

Alloybond é um adesivo para amálgama de alta resistência com flúor. Os grupos de resinas, dimetacrilato único, do Alloybond produzem duplamente o encadeamento cruzado e excelente resistência. Alloybond não contém BisGMA ou Bis Fenol A.

INSTRUÇÕES:

Isole o dente. Prepare a cavidade. Nota: Matriz deve ser modelada antes do uso; Nunca use verniz a base de hidróxido de cálcio, não é necessário.

1. Condicione a superfície do dente ou qualquer linha de ionômero de vidro com ácido fosfórico a 37% por 20 segundos;
2. Lave bem e remova o excesso de água;
3. Seque com ar. Mantenha úmido;
4. Aplique Alloybond Primer até saturar toda a superfície interna;
5. Seque levemente com ar livre de óleo por 2 segundos para evaporar o solvente. Deixe a superfície brilhante;
6. Polimerize por 10 segundos;
7. Misture uma gota de Alloybond Base com uma gota de Alloybond Catalyst;
8. Aplique a mistura em toda a superfície interna;
9. Inicie a trituração de amálgama;
10. Condense e esculpe o amálgama dentro de 60 segundos depois de aplicada a mistura Alloybond Base e Catalyst ou aplique um compósito depois de 60 segundos após aplicada a mesma mistura;

Evite o contato do ácido com os tecidos orais, olhos e pele. Se o contato acidental ocorrer, lave bem com água. No caso de contato com os olhos, procure auxílio médico;

PRECAUÇÕES:

1. Evite contato do ácido com o tecido bucal, olhos ou pele. No caso de contato, lave abundantemente com água. No contato com os olhos, procure assistência médica.
2. Evite contato prolongado de Alloybond com a pele ou tecidos orais, pois pode causar inflamação nos tecidos orais ou sensibilidade na pele;
3. Qualquer pessoa com história de alergia deve descontinuar imediatamente o uso de Alloybond;
4. **Mantenha fora do alcance de crianças.**

CUIDADO: A lei federal dos Estados Unidos restringe a venda desse produto aos dentistas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

1. Armazene Alloybond em local com temperaturas entre 10°C - 20°C;
2. Use em temperaturas ambiente;
3. Mantenha fora do alcance da luz do sol;
4. Reponha as tampas nos frascos imediatamente após o uso.

CONTEÚDO:

Kit Alloybond: 5544001

1 Frasco de 5ml de Alloybond Primer;
1 Frasco de 5ml de Alloybond Base;
1 Frasco de 5ml de Alloybond Catalyst;
1 Seringa de 2ml de Super Etch;
Pincéis, suportes, casulo;
28 Pontas descartáveis para Super Etch.

Refil:

Alloybond Primer

Código número: 5544011

1 Frasco de 5ml de Alloybond Primer.

Alloybond Base

Código número: 5544010

1 Frasco de 5 ml de Alloybond Base.

Alloybond Catalyst

Código número: 5544012

1 Frasco de 5 ml de Alloybond Catalyst.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St. Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Ireland
Tel + 353 1 886 9577