

EMBOUT L.E.D. POUR BLANCHIMENT D'ARCADE COMPLETE

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté cet embout L.E.D, conçu pour la lampe à polymériser sans fil Radium Plus. Pour le fonctionnement de la lampe à polymériser L.E.D Radium Plus et les mesures de sécurité à prendre avec celle-ci, veuillez vous référer au manuel d'instructions fourni avec l'ensemble. Ce feuillet d'instructions rapporte uniquement le mode d'emploi pour un fonctionnement sécuritaire en relation avec l'embout L.E.D acheté.


NOTE : L'embout L.E.D. pour blanchiment d'arcade complète n'est adaptable que sur les lampes Radium plus dont le numéro de série commence par 3-34828 et suivants. Pour des lampes dont le numéro de série est antérieur, un section de contrôle est nécessaire. Veuillez, s'il vous plaît, prendre contact avec votre représentant SDI local.

L'embout L.E.D. pour blanchiment d'arcade complète est indiqué pour l'accélération du blanchiment, au fauteuil, des produits tels que Pola Office et Pola Office +.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser votre lampe Radium plus avec son embout L.E.D., veuillez prendre soin de contrôler que la charge de la batterie soit maximale.

- 1) Mettre en place l'embout L.E.D., dans le logement prévu à cet effet, dans votre lampe Radium plus.

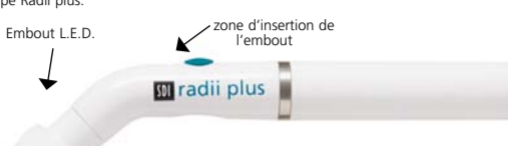

- 2) recouvrir l'embout à l'aide du manchon de protection.



NOTE : le manchon de protection est essentiel pour éviter la contamination croisée entre patients et fournir une protection efficace de l'embout.

- 3) Appliquer l'embout sur la gouttière transparente.



- 4) Une fois assemblé, l'unit peut être utilisé manuellement ou combiné avec le stand de blanchiment Radium Plus.



- 5) Appliquer le produit de blanchiment tel que Pola Office ou Pola Office+ selon les instructions du fabricant.
- 6) Ne pas illuminer plus de 5 minutes la dent à éclaircir avec la lampe à polymériser Radium Plus. Si vous utilisez le stand de blanchiment Radium Plus, ajuster l'illumination, en conséquence, à l'aide des boutons prévus à cet effet.
- 7) Activer la lampe avec son embout en place. Les beep suivants seront audibles au fur et à mesure du temps d'utilisation.

Beep sonores temps écoulé

| | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 1 beep court | 1 Minute | |
| 1 beep court | 2 Minutes | |
| 1 beep court | 3 Minutes | |
| 4 beep courts | 4 Minutes | (témoin indicateur à mi course) |
| 1 beep court | 5 Minutes | |
| 1 beep court | 6 Minutes | |
| 1 beep court | 7 Minutes | |
| 1 beep long | 8 Minutes | (arrêt de la lampe) |

NOTE : La température émise par la lampe atteint $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. ($98.76^{\circ}\text{F} \pm 3.5^{\circ}\text{F}$)

- 8) Recharger la batterie après le traitement complet d'un patient.

NETTOYAGE :

1. Ne pas utiliser d'agent désinfectant en spray directement sur la lampe. Utiliser un tissu sur lequel le désinfectant sera vaporisé.
2. Nettoyer l'extérieur de la lampe en évitant tout contact avec la lampe L.E.D. présente au niveau de la zone de connexion.

Désinfectants préconisés

- Glutaraldehyde
- Gluconate de chlorhexidine
- Alcool isopropylique à 70%
- Désinfectant enzymatique

3. Seul le bouclier de protection orange est autoclavable

- **LES LIQUIDES ENTRANT EN CONTACT AVEC LES TERMINAUX DE LA PIECE A MAIN ET LE CHARGEUR ANNULENT LA GARANTIE.**
- **LES LIQUIDES NE DOIVENT PÉNÉTRER EN AUCUN CAS DANS LA PIECE A MAIN OU LE CHARGEUR.**
- **NE PAS VAPORISER DE LIQUIDES DIRECTEMENT SUR LA LAMPE RADII PLUS OU NE PAS IMMÉRGER DANS UN LIQUIDE.**
- **NE PAS STÉRILISER LA LAMPE RADII PLUS A L'AUTOCLAVE.**

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ

Le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil dépend du respect strict des instructions contenues dans ce manuel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de cet appareil à toute autre fin que celle explicitée dans le présent document.

ATTENTION! L'illumination des yeux présente un risque pour la santé. La lumière de la lampe ne doit pas être dirigée vers les yeux. La zone d'exposition doit être limitée à la zone de la cavité buccale où le traitement doit être entrepris. Des lunettes de protections adéquates doivent être portées.

Ne pas utiliser la lampe Radium Plus si les patients ou les utilisateurs ont:

- un stimulateur cardiaque et ont été avisés d'être prudents en regard de leur exposition à des petits appareils électriques.
- un historique de réactions photobiologiques (incluant les individus présentant de l'urticaire solaire ou une protoporphyrine érythropoïétique) ou qui sont actuellement sous médication photosensible (incluant 8-méthoxy-psoralène ou diméthylchlorotétracycline).
- un historique de chirurgie de la cataracte. Ces personnes peuvent être particulièrement sensibles à l'exposition à la lumière et ne devraient pas être traitées avec une lampe Radium Plus à moins que des mesures de sécurité adaptées, telles que l'utilisation de lunettes de protection contre la lumière bleue, ne soient prises.
- un historique de maladie rétinienne. Ces personnes devraient consulter leur ophtalmologiste avant d'être traitées avec l'appareil ou de l'utiliser. En utilisant la lampe, Radium Plus, ce groupe d'individus doit prendre des mesures de sécurité extrêmes et respecter toutes les précautions nécessaires (incluant l'utilisation de lunettes de protection adéquates qui filtrent la lumière).

PERIODE DE GARANTIE

SDI Limited, le fabricant, assure la garantie de ce produit pendant deux ans, pièces et main d'œuvre, à l'achat de ce produit. Le fabricant accepte de corriger tout défaut survenu à l'appareil durant la période de garantie, soit par réparation voire par remplacement. Cette garantie est subordonnée à une inspection technique préalable ayant pour but de définir l'origine de la panne en sachant que toute utilisation anormale annulera la garantie.

CONDITIONS DE LA GARANTIE – LIRE ATTENTIVEMENT

- **Veuillez remplir la carte de garantie incluse avec l'appareil et la retourner rapidement à SDI avec la preuve d'achat. Ne pas nous faire parvenir cette carte peut annuler la garantie.**
 - **Vous pouvez également vous rendre au <http://www.sdi.com.au/warranty> pour enregistrer votre garantie.**
- a) Les réclamations dues aux dommages causés lors du transport doivent être faites immédiatement au transporteur.
 - b) Les envois défectueux ne peuvent être retournés au fabricant sans le consentement écrit de celui-ci. Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'une description complète de la défauts retournés.
 - c) Seul le personnel de service qualifié par SDI est autorisé à réparer la lampe Radium Plus. Le fabricant sera délié de toutes obligations de la garantie si les réparations ou les modifications sont effectuées par des personnes autres que le personnel du fabricant ou le personnel de service autorisé.
 - d) Utiliser seulement les pièces SDI pour remplacer les composants défectueux. La garantie du produit ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de pièces de remplacement qui ne sont pas d'origine.
 - e) **Le fabricant sera délié de toutes obligations de cette garantie dans l'éventualité d'une installation inappropriée; de dommages dus à un sinistre ou une mauvaise utilisation évidente incluant mais ne se limitant pas aux dommages causés par les liquides et la stérilisation par autoclave.**
 - f) Le fabricant ne sera porté responsable des dommages entraînés par une mauvaise utilisation du produit.
 - g) Seule la garantie produite ci-dessus s'applique et toutes autres garanties, implicites ou exprimées sont exclues.

Toute correspondance concernant le produit, doit en spécifier, le modèle et le numéro de série.

Date de parution de la dernière révision : Mars 2010

| | |
|---|--|
| <p>Fabriqué en Australie par SDI Limitée Bayswater, Victoria 3153 Australie 1 800 337 003 Autriche 00800 022 55 734 Brésil 0800 770 1735 France 00800 022 55 734 Allemagne 0800 100 5759 Irlande 01 886 9577 Italie 800 780625 Nouvelle Zélande 0800 734 034 Espagne 00800 022 55 734 Royaume-Uni 00800 022 55 734 États-Unis et Canada 1 800 228 5166 www.sdi.com.au</p> | <p>EC REP SDI Dental Limited Block 8, St Johns Court Swords Road, Santry Dublin 9, Irlande Tél +353 1 886 9577</p> |
|---|--|



ATTENTION
(se référer aux instructions
compagnant le produit)

