



conseal f conseal

D
E
U
T
S
C
H

FISSURENVERSIEGLER

GEBRAUCHSANWEISUNG

Conseal f und Conseal sind Versiegler mit niedrigster Viskosität und höchster Fließfähigkeit. Durch diese optimalen Fließigenschaften dringt das Material tiefer in Grübchen und Fissuren ein und verteilt sich dort gleichmäßig. Die geringere Schrumpfung des einzigartigen Resin-Systems von SDI begünstigt eine dichtere Versiegelung und optimiert die mechanische Haftung.

Conseal f setzt Fluoride frei und verbindet die klinisch getestete Technologie für Fissurenversiegler von SDI mit einem sehr hohen anfänglichen Ausstoß an Fluoriden, im Zusammenspiel mit einer kontinuierlichen Fluoridversorgung über einen längeren Zeitraum. Der einzigartige Füllstoff in Conseal f maximiert mit seiner genau abgestimmten Mischung aus Füllpartikeln die Fluoridfreisetzung des Fissurenversieglers.

INDIKATIONEN:

1. Versiegelung von Zähnen mit gesunden, aber anfälligen Grübchen und Fissuren.
2. Versiegelung von Zähnen mit minimaler Karies in Grübchen und Fissuren.

KONTRAINDIKATIONEN:

1. Nicht über kariösen Stellen auftragen.
2. Nicht auf ungeätzte Flächen auftragen.
3. Dieses Produkt kann bei einigen Personen zu Hautirritationen führen. Sollten diese auftreten, Anwendung beenden und ärztliche Hilfe einholen.

HAUPTBESTANDTEIL:

Multifunktionaler Methacrylester.

AUSSEHEN:

Eine niedrig viskose Resin die durch Lichthärten zu einer festen Masse wird.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die okklusalen Oberflächen der Zähne mit gesunden, aber anfälligen Grübchen und Fissuren mit einer nicht fluorhaltigen, ölfreien Prophylaxepaste reinigen. Minimalen Karies in Grübchen und Fissuren vorsichtig mit einem kleinen Bohrer langsam abschleifen. Nur befallene Flächen behandeln. Gründlich mit Wasser spülen. Zahn isolieren.
2. Die Oberfläche welche geätzt werden soll, mit sauberer, ölfreier Luft trocknen.
3. Die okklusale Oberfläche mit 37%iger Phosphorsäure, beispielsweise Super Etch oder Super Etch LV (von SDI Limited) für mindestens 30 Sekunden, jedoch nicht länger als 60 Sekunden ätzen. **WICHTIG:** Bei Benutzung von Ätzel in einer Spritze muss darauf geachtet werden, dass der Aufsatz **fest** auf der Spritze sitzt. Der Tip muss fest auf die Spritze geschraubt werden. Vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung eine kleine Menge Gel auf ein Mischpad auftragen um sich mit der Viskosität und der Konsistenz des Materials wieder vertraut zu machen.
4. Gründlich mit Wasser spülen.
5. Zahn vollständig für 15 Sekunden mit ölfreier Luft trocknen. **WICHTIG:** Eine geätzte, trockene Schmelzoberfläche sollte ein mattes, weißes Aussehen haben. Sollte das nicht der Fall sein, oder sollte die Oberfläche durch Speichel oder Blut kontaminiert sein, so müssen Schritt 2-5 wiederholt werden.
6. Fissurenversiegler auftragen. **WICHTIG:** Bei Benutzung von Fissurenversiegler in einer Spritze muss darauf geachtet werden, dass der Aufsatz **fest** auf der Spritze sitzt. Der Tip muss fest auf die Spritze geschraubt werden. Vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung eine kleine Menge auf ein Mischpad auftragen um sich mit der Viskosität und der Konsistenz des Materials wieder vertraut zu machen. Den Tip gegen die zu behandelnde Oberfläche halten und den Fissurenversiegler langsam auftragen.
7. Das Material für 20 Sekunden mit der Raddi Plus LED Härtelampe von SDI oder einer anderen Härtelampe (440 - 480 nm Wellenlänge) lichthärten. Es können bei Bedarf weitere Schichten Material aufgetragen werden, vorausgesetzt das Arbeitsfeld ist korrekt isoliert und trocken. Überschüssiges Material abwischen und darauf achten, dass keine Lücken entstehen.

LAGERUNG:

Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C (50°F-77°F) aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68°F-77°F) verwenden.

Temperaturen außerhalb des hier angegebenen Rahmens können die Haltbarkeit des Materials verkürzen.

Helles Licht, beispielsweise OP Lampen, können dazu führen, dass das Material frühzeitig aushärtet.

SICHERHEITSHINWEISE:

Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Nach Gebrauch Flasche oder Spritze wieder fest

verschließen.

Langen Kontakt des Ätzgels mit der Haut oder den

Schleimhäuten vermeiden, da es zu Reizungen kommen

kann.

Nur zur äußeren Anwendung.

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Material vor direktem Licht schützen.

Sicherheitsdatenblatt unter www.sdi.com.au oder bei

Ihrem Dental-Depot.

Dieses Produkt ist konform mit ISO 6874 (Typ 2

lichthärtender Fissurenversiegler).

ERSTE HILFE:

Augen (Kontakt): Gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Haut (Kontakt): Mit einem in Alkohol getränkten Tuch oder Schwamm abwischen. Gründlich mit Wasser abwaschen.

Verschlucken: Viel Wasser oder Milch trinken und einen Arzt aufsuchen.

Einatmen: Es werden keine Symptome erwartet.

PACKUNGSEINHEITEN:

- Conseal F (white): Spritzen Kit, Vorratspackung, Flaschen Kit, Flasche, Complets.
- Conseal Clear: Spritzen Kit, Flasche
- Conseal Light Grey: Flaschen Kit, Flasche



Hergestellt in Australien

von SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australien 1 800 337 003

Österreich 00800 022 55 734

Brasilienl 0800 770 1735

Frankreich 00800 022 55 734

Deutschland 0800 100 5759

Irland 01 886 9577

Italien 800 780625

Neuseeland 0800 734 034

Spanien 00800 022 55 734

UK 00800 022 55 734

USA & Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Irland

Tel +353 1 886 9577

