

单组份自酸蚀光固化粘接剂

使用说明

Go!是一种单组份、自酸蚀、氟离子释放、光固化牙本质牙釉质通用粘接剂，Go!有瓶装和单剂量包装供应。

产品组成:

磷酸酯单体 (Phosphoric acid ester monomer)
 二甲基丙烯酸酯单体 (Dimethacrylate monomer)
 单甲基丙烯酸酯单体 (Monomethacrylate monomer)
 二氧化矽填料
 水
 丙酮 (Acetone)
 光敏剂 (Photoinitiators)
 稳定剂 (Stabilizer)
 氟化钠 (Sodium Fluoride)

适应症:

- I) 使用光固化树脂和复合体直接充填修复。
- II) 烤瓷、瓷化树脂修复体的树脂修补。
- III) 导致过敏的根管表面暴露的封闭。
- IV) 非直接修复体填充前的窝洞封闭。
- V) 使用光固化或双固化树脂的桩核构筑。
- VI) 树脂修复。

禁忌症:

- I) 不要与化学固化树脂一起使用。
- II) 不可用于盖髓。
- III) 对树脂过敏的患者避免使用Go!。
- IV) 不要与丁香酚材料或含正铁化合物的止血剂一起使用。
- V) 不要与脱敏剂一起使用。

准备:

必须使用隔离技术来防止玷污，橡胶障是最好的隔离模式，在牙髓需要保护时，使用氢氧化钙衬底材料。

单剂量系统提示:

放Go!小瓶到单剂量支架上(如图1),涂用前,如图所示慢慢折断

上端露出所装材料一打开要立即使用(如图2),插入一次性

小刷(如图3)按以下说明使用。

瓶装系统提示:

只能在使用前蘸取Go!,取出后立即使用,不使用时盖好并放

到冰箱中存放。



图 1



图 2



图 3

涂饰使用

I) 使用光固化树脂和复合体直接充填修复
 对牙洞采用标准技术进行处理,除去多余水分,保持湿润,避免玷污,例如唾液。

1. 充分涂Go!到牙洞所有内表面。
2. 保留20秒钟
3. 用干燥、无油的高压空气吹至少5秒钟来让溶剂挥发。让表面光亮。如果没有,重复这一步骤,注意:用真空吸气可以避免粘接剂被吹散。
4. 用光固化机光照10秒钟。
5. 根据生产厂商使用说明充填复合树脂,如用Ice, Rok, Wave, Wave MV或Wave HV等。

注意:对于未切开的牙釉质粘接时,用37%的磷酸只处理牙釉质20秒钟,冲洗和干燥后再涂用Go!。

II) 烤瓷、瓷化树脂修复体的树脂修补

1. 对要修补的修复体表面进行喷沙处理。
2. 用合适的氢氟酸胶酸蚀修复体表面,冲洗和干燥。
3. 依生产厂商说明涂饰硅烷底剂。
4. 充分涂Go!到要修补的窝洞内表面。
5. 保留20秒钟。
6. 用干燥、无油的高压空气吹至少5秒钟来让溶剂挥发。让表面光亮。如果没有,重复这一步骤,注意:用真空吸气可以避免粘接剂被吹散。
7. 用光固化机光照10秒钟。
8. 根据生产厂商使用说明充填复合树脂,如用Ice, Rok, Wave, Wave MV或Wave HV等。

III) 导致过敏的根管表面暴露的封闭

IV) 非直接修复体填充前的窝洞封闭

1. 充分涂Go!到所有需粘接的牙齿表面。
2. 保留20秒钟。
3. 用干燥、无油的高压空气吹至少5秒钟来让溶剂挥发。让表面光亮。如果没有,重复这一步骤,注意:用真空吸气可以避免粘接剂被吹散。
4. 用光固化机光照10秒钟。
5. (i)暴露的根管封闭:根据生产厂商使用说明使用流动树脂,如用Wave(低稠度),Wave MV(中稠度)或Wave HV(高稠度)等。

或:

(ii)非直接修复体的充填:根据生产厂商使用说明使用合适的水门汀修复和固定修复体。

V) 使用光固化或双固化树脂的桩核构筑

1. 充分涂Go!到所有需粘接的牙齿表面(如可以也涂桩)。
2. 保留20秒钟。
3. 用干燥、无油的高压空气吹至少5秒钟来让溶剂挥发。让表面光亮。如果没有,重复这一步骤,注意:用真空吸气可以避免粘接剂被吹散。
4. 用光固化机光照10秒钟。
5. 根据生产厂商使用说明充填复合树脂,如用Ice, Rok, 或双固化树脂等。
6. 开始最初牙冠的制备。

VI) 树脂修复

1. 对要修补的表面喷沙。
2. 用37%的胶状磷酸处理修复体表面,清洗和吹干。
3. 充分涂Go!到牙洞内表面。
4. 保留20秒钟。
5. 用干燥、无油的高压空气吹至少5秒钟来让溶剂挥发。让表面光亮。如果没有,重复这一步骤,注意:用真空吸气可以避免粘接剂被吹散。
6. 用光固化机光照10秒钟。
7. 根据生产厂商使用说明充填复合树脂,如用Ice, Rok, Wave, Wave MV或Wave HV等。

注意:

Go!具有可燃性,要远离火源和直接阳光照射。仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。避免Go!长时间与皮肤或口腔组织接触,因为它们可能会造成口腔组织发炎或皮肤过敏。避免眼睛接触。

警告:联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。材料安全信息资料(MSDS)可以从公司网页www.sdi.com.au上获得或向您当地厂商代表索取。

贮存与搬运:

冰箱中存放,用时才拿出来。并让产品达到室温后才使用。过有效期后不要使用。

紧急救助:

眼睛(接触):立即用清水冲洗眼睛至少15分钟,并寻求医治。

皮肤(接触):用水充分清洗,如果炎症(发红,皮疹,有水泡)出现,寻求医治。

摄入:喝大量牛奶或水。并寻求医治。

吸入:少量应不会出现不良反应,如有不良征兆/症状出现,寻求医治。

包装:

—Go!瓶装套装

1瓶X5mL Go!

50枚X一次性小涂刷

1块X混料垫

—Go!单剂量套装

50粒XGo!0.1mL单剂装

50枚X一次性小涂刷

1块X单剂量支架

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 134 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

EC REP

欧盟代表处: SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry.

Dublin 9, Ireland

Tel: +353 1 886 9577

最后修: 11-2011



警告: 对皮肤和眼睛有刺激



可燃 3