

peróxido de hidrógeno al 3%, 7.5% y 9.5%  
peróxido de carbamida al 10%, 16% y 22%  
Sistema avanzado de blanqueamiento dental

## INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PROFESIONAL DENTAL Y LOS PACIENTES

Pola Day y Pola Night son geles de blanqueamiento dental para uso en el hogar, de alta viscosidad y pH neutro. Ambos tienen un agradable sabor, son geles cristalinos con una mezcla única de calmantes, acondicionadores y alto contenido de agua, suficientes para reducir la sensibilidad.

### INDICACIONES DE USO:

- Blanqueamiento de dientes vitales.
- Blanqueamiento de dientes no vitales.

### COMPOSICION:

**Pola Day** Peróxido de Hidrógeno 3.0-9.5% del peso  
Aditivos < 47% del peso  
Glicerol 30% del peso  
Agua 20% del peso  
Saborizantes 0.1% del peso

**Pola Night** Peróxido de Carbamida 10.0-22.0% del peso  
Aditivos < 40% del peso  
Glicerol 30% del peso  
Agua 20% del peso  
Saborizantes 0.1% del peso

### PESO NETO:

Depende del kit adquirido, jeringas 1.3g o jeringas 3g.  
Por favor consulte el exterior del empaque.

### EQUIVALENCIA A PEROXIDO DE HIDROGENO:

- Pola Night peróxido de carbamida al 10% = peróxido de hidrógeno al 3.3%
- Pola Night peróxido de carbamida al 16% = peróxido de hidrógeno al 5.3%
- Pola Night peróxido de carbamida al 22% = peróxido de hidrógeno al 7.3%


### GUIA DE TRATAMIENTO:

	3%	7.5%	9.5%
Pola Day	2 ó 3 x 30 min/día ● 1 x 60 min/día	1 ó 2 x 30 min/día ● 1 x 45 min/día	1 ó 2 x 15 min/día ● 1 x 30 min/día
	10%	16%	22%
Pola Night	de 2 hrs. a toda la noche	de 90 min. a toda la noche	1 x 45 min/día

Nota: Los pacientes con sensibilidad requerirán un día o dos de descanso entre los tratamientos. También se sugiere acortar el tiempo de tratamiento.

### PROCEDIMIENTO DE COLOCACION:

1. Coloque una pequeña gota del gel dentro de cada compartimiento de la cucharilla en los dientes a tratar.
2. Coloque la cucharilla, con el gel alrededor de los dientes.
3. Limpie todo el exceso de gel de la cucharilla y de la boca con un paño o cepillo dental seco.
4. Después del tratamiento remueva la cucharilla. Enjuague la cucharilla y sus dientes con agua tibia.
5. Cepille sus dientes.

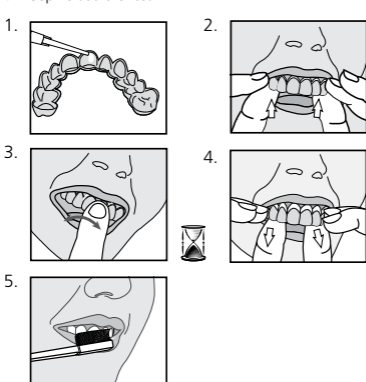

### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- No coma, beba o fume durante el tratamiento.
- No fume inmediatamente después del tratamiento – espere por lo menos dos horas.
- Los alimentos y bebidas que contengan colores fuertes se deben evitar por lo menos 48 horas después del período de tratamiento o con consumo moderado.
- Utilice el gel a temperatura ambiente.

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Guarde en un lugar fresco y fuera de la luz directa del sol a temperaturas entre (2°-25°C / 35°-77°F).
- No lo utilice después de su fecha de expiración.


### PRECAUCIONES:

- Para ser utilizado bajo supervisión de un dentista.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No se utilice en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en menores de 14 años.
- Los pacientes con un historial de alergias a sustancias químicas deben realizarse una prueba de alergia a este producto, con un especialista, antes de utilizarlo.
- Descontinúe el uso si se presenta cualquier sensibilidad o reacción inusual y consulte a su dentista.
- No inyecte Pola Day o Pola Night dentro del cuerpo.
- PRECAUCION: LA LEY FEDERAL LIMITA LA VENTA DE ESTE PRODUCTO SOLO A DENTISTAS.
- La Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se encuentra disponible en: [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) o contacte a su representante regional.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos (contacto):** Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica si los síntomas persisten.
- **Piel (contacto):** Enjuague abundantemente con agua y busque atención médica si los síntomas persisten.
- **Ingestión (grandes cantidades):** Beba leche o agua en abundancia y busque atención médica.

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

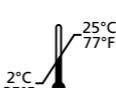

Advertencia



Causa Irritación en piel y ojos