

3%, 7.5% e 9.5% de peróxido de hidrogênio  
10%, 16% e 22% de peróxido de carbamida  
Sistema de clareamento dental avançado

## INSTRUÇÕES DE USO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DENTAIS

Pola Day e Pola Night são um gel para clareamento dental caseiro que possuem alta viscosidade e PH neutro. Ambos tem agradável sabor, aparência cristalina com uma mistura única de dessensibilizante, condicionadores e água que reduzem ao máximo a sensibilidade.

### INDICAÇÃO DE USO

- Clareamento de dentes vitais
- Clareamento de dentes não vitais

### COMPOSIÇÃO:

Pola Day 3.0-9.5% Peróxido de hidrogênio  
< 47% Aditivos  
30% Glicerol  
20% Água  
0.1% Aromatizantes

Pola Night 10.0-22.0% wt Peróxido de carbamida  
< 40% Aditivos  
30% Glicerol  
20% Água  
0.1% Aromatizantes

### CONTEÚDO:

Seringas de 1,3g ou 3g, verificar conteúdo adquirido de acordo com embalagem.

### EQUIVALÊNCIA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO:

- Pola Night 10% de peróxido de carbamida = 3.3% de peróxido de hidrogênio
- Pola Night 16% Carbamide Peroxide = 5.3% de peróxido de hidrogênio
- Pola Night 22% Carbamide Peroxide = 7.3% de peróxido de hidrogênio


### REFERÊNCIAS DE TRATAMENTO:

	3%	7.5%	9.5%
Pola Day	2 ou 3 X 30 minutos / dia <b>ou</b> 1 X 60 minutos / dia	1 ou 2 X 30 minutos / dia <b>ou</b> 1 X 45 minutos / dia	2 X 15 minutos / dia <b>ou</b> 1 X 30 minutos / dia
	10%	16%	22%
Pola Night	1 X 2 horas / dia ou noite	1 X 90 minutos / dia ou noite	1 X 45 minutos / dia ou noite

Observação: Pacientes com sensibilidade precisam fazer uma pausa durante um ou dois dias. A redução do tempo de tratamento também é sugerida.

### PROCEDIMENTO:

1. Coloque um pouco de gel no compartimento da moldeira em cada dente que deverá ser tratado.
2. Coloque a moldeira na boca de modo que o gel sobreponha os dentes
3. Remova o excesso com um lenço higiênico ou uma haste de algodão seca
4. Após tratamento retire a moldeira . Enxaguar a moldeira e a boca com água morna
5. Escovar os dentes.

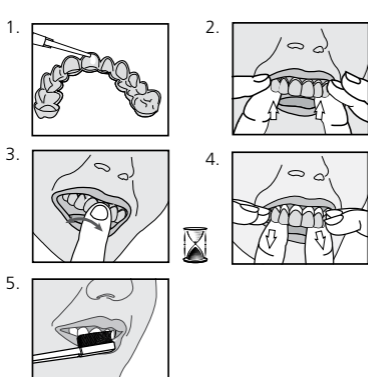

### PARA MELHORES RESULTADOS:

- Não beba, coma ou fume durante o tratamento.
- Não fume logo após o tratamento – espere pelo menos 2 horas.
- Evite comidas e bebidas muito coloridas 48 horas após o tratamento ou consumir com moderação.
- Use o gel em temperatura ambiente.

### ARMAZENAGEM E MANUSEIO:

- Guardar em local fresco sem contato direto com sol entre (2°-25°C / 35°-77°F).
- Não use após a data de validade.


### PRECAUÇÕES

- Este produto deve ser usado sob a supervisão de um dentista.
- Mantenha longe de crianças e animais.
- Não deve ser usado por grávidas e ou lactantes ou crianças menores de 14 anos.
- Pacientes com histórico alérgico devem apresentar exame para um especialista antes de usar este produto.
- Descontinue o uso se apresentar alguma sensibilidade estranha ou alguma reação ocorrer e consulte seu dentista.
- Não injete Pola Day ou Pola Night no corpo.
- A LEI FEDERAL RESTRINGE A VENDA A DENTISTAS OU SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
- MSDS está disponível no [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou contacte o representante da sua região.

### PRIMEIROS SOCORROS

- **Olhos e Pele (contato)** – lave com água abundante e procure orientação médica se os sintomas persistirem.
- **Ingestão (grande quantidade)** – beba bastante água ou leite e procure orientação médica.

Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 022 55 734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
USA & Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)

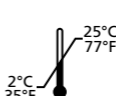

Causa irritação nos olhos e pele