

SDI**riva coat****D
E
U
T
S
C
H**

**LICHTHÄRTENDES
SCHUTZMATERIAL
FÜR GLASIONOMER PRODUKTE
GEBRAUCHSANWEISUNG**

Riva Coat schützt Füllungen mit Glasionomer Zement während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung vor Kontamination mit Speichel und Wasser.

INDIKATIONEN:

Füllungen mit Glasionomer Zement die nach der Behandlung einen Schutzlack benötigen.

KONTRAINDIKATIONEN:

In seltenen Fällen kann das Produkt Hautreizungen hervorrufen. In solchen Fällen ist die Anwendung zu beenden und medizinische Hilfe aufzusuchen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den Glasionomer Zement gemäß den Angaben des Herstellers anwenden.
2. Wenn das Material ausgehärtet ist, Riva Coat auf alle Oberflächen der Füllung auftragen.
3. 20 Sekunden lichthärten.
4. Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.

AUFBEWAHRUNG UND VERARBEITUNG

Dieses Material reagiert auf Licht. Riva Coat erst bei Gebrauch aus der Flasche applizieren, nicht vorher.

Dunkel lagern, bei Temperaturen zwischen 10° und 25°C (50° - 77°F). Bei Raumtemperatur zwischen 20° und 25°C (68° - 77°F) benutzen. Haltbarkeit: 3 Jahre

WARNHINWEISE:

Nur für zahnärztlichen Gebrauch.
Von Kindern fernhalten.

Nur zur äußeren Anwendung geeignet.

Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.

Beachten: Dieses Produkt soll nur von Zahnärzten verwendet werden. Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-Depot.

ERSTE HILFE:

Augen (Kontakt): Gründlich mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.

Haut (Kontakt): Die betroffenen Stellen mit Alkohol abwischen. Mit klarem Wasser waschen.

Verschlucken: Viel Wasser oder Milch trinken. Falls notwendig einen Arzt konsultieren.

Einatmen: Es sind keine Symptome zu erwarten.

Datum der letzten Überarbeitung: April 2010

PACKUNGSEINHEITEN

5ml Flasche



Hergestellt in Australien

von SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australien 1 800 337 003

Österreich 00800 022 55 734

Brasilien 0800 770 1735

Frankreich 00800 022 55 734

Deutschland 0800 100 5759

Irland 01 886 9577

Italien 800 780625

Neuseeland 0800 734 034

Spanien 00800 022 55 734

UK 00800 022 55 734

USA & Kanada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irland
Tel +353 1 886 9577

