

CEMENTO RESINOSO AUTOMORDENZANTE E AUTOADESIVO

ISTRUZIONI D'USO

'seT PP' è un cemento resinoso automordenzante e autoadesivo duale a rilascio di fluoro in un sistema pasta/pasta. 'seT PP' è indicato nella cementazione di restauri indiretti in ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni, viti e veneer.

COMPOSIZIONE:

35% del peso: estere metacrilato.
65% del peso: riempitivo inorganico.

INDICAZIONI PER L'USO:

Ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni, viti e veneer.

CONTROINDICAZIONI:

In alcune persone il prodotto può causare irritazioni della pelle. In questi casi, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a uno specialista.

ISTRUZIONI PER L'USO:

PREPARAZIONE DEL DENTE:

1. Selezionare la tonalità adeguata di 'seT PP'.
2. Rimuovere il restauro provvisorio e pulire bene la preparazione utilizzando pomice non oleosa per eliminare eventuali tracce di cemento provvisorio (N.B. il restauro provvisorio dovrebbe essere cementato solo con cementi non contenenti eugenolo).
3. Provare il restauro in sede.
4. Sciacquare con acqua e asciugare, ma **NON ESSICCARE**.
ATTENZIONE: nei casi in cui sia necessaria la protezione pulpale, utilizzare un liner all'idrossido di calcio a consistenza rigida prima di prendere l'impronta finale. Sostanze come perossido di idrogeno, desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti dentinali, ecc. non dovrebbero essere utilizzate poiché eventuali residui potrebbero interferire con la stabilità di adesione e con le reazioni di presa.

PREPARAZIONE DEL RESTAURO:

Pulire bene e preparare il restauro seguendo le indicazioni del produttore.

PREPARAZIONE DELLA SIRINGA:

Rimuovere il tappo. Dispensare 2-3 mm di materiale su un blocchetto e gettare (per garantire il corretto rapporto di estrusione). Applicare un puntale per miscelazione alla siringa.

MISCELAZIONE A MANO:

Senza applicare il puntale per miscelazione, estrarre una quantità regolare di materiale sul blocchetto da impasto. Utilizzando una spatola adatta, miscelare insieme le due paste per 30 secondi.

APPLICAZIONE di 'seT PP'

1. Proteggere l'area di lavoro dalla contaminazione dei fluidi intra-orali.
2. Posizionare o estrarre 'seT PP' in maniera uniforme su tutte le superfici di adesione del restauro e del dente. N.B. Non utilizzare i lentuli per inserire il cemento nei canali radicolari, per evitare di accelerare troppo le reazioni di presa.
Per evitare che rimanga aria intrappolata, vibrare i perni mentre vengono inseriti nel canale radicolare.
NOTA: in caso di veneer, utilizzare un adesivo (Go!, Stae, ecc., seguendo le istruzioni del produttore incluse eventuali procedure di mordenzatura) prima di applicare seT PP per aumentare la ritenzione. A causa del tempo di lavorazione limitato della pasta, cementare solamente 1-2 veneer alla volta.

Tempo di lavorazione a temperatura ambiente	2 minuti
Tempo netto di presa a temperatura orale	5 minuti
Tempo di fotopolimerizzazione	20 secondi

Nota: i tempi indicati sono solo approssimativi e possono variare a seconda dell'umidità, della temperatura, della data di produzione e delle condizioni di conservazione del prodotto.

3. Alloggiare il restauro, e lasciarlo in posa per 30 secondi prima di fotopolimerizzare.
4. Fresare via il materiale in eccesso dopo avere fotopolimerizzato per 2 secondi o dopo 2 minuti dall'inizio della miscelazione.
N.B. Se il cemento in eccesso viene rimosso con un pellet di spugna o uno strumento simile, lasciare una minima quantità di materiale in eccesso dopo avere posizionato il restauro. Subito dopo, fotopolimerizzare brevemente il cemento in eccesso oppure, in caso di autopolimerizzazione, coprire il cemento in eccesso con gel di glicerina per prevenire l'inibizione da ossigeno.
5. Fotopolimerizzare accuratamente per accelerare i meccanismi di presa (minimo 20 secondi per ogni superficie). In caso di composito e ceramica integrale, fotopolimerizzare 'seT PP' attraverso il restauro.
6. Lucidare l'area marginale.

CONSERVAZIONE E UTILIZZO:

Evitare il calore eccessivo. Per prestazioni ottimali si consiglia la refrigerazione del prodotto.
Conservare a temperature comprese fra 2 e 25 °C.
Per una freschezza ottimale, la conservazione in frigorifero è opzionale.
Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C.

PRECAUZIONI:

Solo per uso professionale.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Attenzione: in base alla normativa di legge in vigore, questo prodotto è vendibile solo ed esclusivamente a medici dentisti o su ordine di medici dentisti.
Le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul sito www.sdi.com.au o contattando il vostro agente di zona.

PRONTO SOCCORSO:

Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.
Contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti d'alcol. Sciacquare abbondantemente con acqua.
Ingestione: bere acqua o latte in abbondante quantità. Se i sintomi persistono, consultare uno specialista.
Inalazione: non è attesa alcuna reazione avversa.

CONFEZIONI:

- Siringhe da 7 g
- Tonalità disponibili: A1, A2, OA3, traslucido, bianco opaco.
- Kit assortito contenente 70 puntali da miscelazione e una siringa per ogni tonalità: A1, A2, OA3, traslucido e bianco opaco.
- Puntali da miscelazione: confezione da 50 pezzi

Ultima Revisione: 2012-06.

Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Gran Bretagna 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublino 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

