

## CIMENT AUTO-ADHÉSIF D'AUTO-MORDANÇAGE À BASE DE RÉSINE MODE D'EMPLOI

seT est un ciment « dual-cure » auto-adhésif auto-mordançant à base de résine. seT a été conçu pour le scellement de céramique indirecte, d'inlays, onlays, couronnes, bridges, tenons et vis métalliques ou composite. seT ne nécessite pas d'agent de liaison et de mordantage. seT dégage du fluor.

### MODE D'EMPLOI :

Céramique, inlays, onlays, couronnes, bridges, tenons et vis métalliques ou composite.

### CONTRE-INDICATIONS :

1. Facettes.
2. Chez certains sujets, le produit peut entraîner des irritations de la peau. Dans ce cas, interrompre l'utilisation et demander l'avis d'un médecin.

### MODE D'EMPLOI :

#### PRÉPARATION DE LA DENT :

1. Sélectionner la teinte seT appropriée.
2. Retirer la prothèse provisoire et nettoyer soigneusement la préparation en éliminant tout résidu de ciment provisoire avec une pâte à base de pierre ponce pulvérisée non grasse (REMARQUE : la prothèse provisoire doit être effectuée uniquement avec du ciment sans eugénol).
3. Essayer dans la prothèse.
4. Nettoyer de nouveau à l'eau et sécher, mais SANS DÉSHYDRATER. ATTENTION : Au cas où la protection pulpaire s'avérerait nécessaire, utiliser un fond de cavité à l'hydroxyde de calcium (à prise forte) avant de procéder à l'empreinte finale. Les substances comme le peroxyde d'hydrogène, les désensibilisants, désinfectants, astringents, scellants de dentine et autres doivent être évités car leurs résidus peuvent interférer avec la solidité de la liaison et les réactions de prise.

#### PRÉPARATION DE LA RESTAURATION :

Nettoyer en profondeur et préparer la prothèse conformément aux instructions du fabricant.

#### ACTIVATION DE LA CAPSULE :

1. Enfoncer le piston fermement en l'appuyant sur une surface dure, jusqu'à ce qu'il pénètre le corps de la capsule.  
**NE PAS FAIRE un clic avec applicateur avant de mixer.**
2. Placer immédiatement la capsule activée dans un amalgamateur Ultramat 2 ou dans un vibreur de capsule haute fréquence (4000 – 4800 rpm).
3. Mélanger pendant 10 secondes.
4. Retirer immédiatement la capsule et la mettre dans l'applicateur.
5. Appuyer sur la gâchette de l'applicateur jusqu'à ce que la pâte soit visible au travers de la canule transparente.

#### APPLICATION de seT

1. Protéger la zone de travail de toute contamination par les fluides intra-oraux.
2. Extruder seT uniformément sur toutes les surfaces à coller de la restauration et de la dent. REMARQUE : Ne pas utiliser un lentulo pour insérer le ciment dans les canaux radiculaires, car cela peut accélérer la prise de manière excessive. Pour éviter d'enfermer des bulles d'air, faire vibrer les tenons lors de l'insertion dans le canal radiculaire.

Temps de travail à 23°	2 minutes (minimum)
Temps de prise depuis le mélange à température en bouche (température orale)	5 minutes
Temps de photopolymérisation	20 secondes
Volume minimum libéré par capsule	0.14mL

Remarque : les temps de travail et de prise seront inférieurs lorsque la température est élevée ou sous l'influence des lampes de travail.

3. Mettre en place la prothèse et laisser agir 30 secondes avant d'utiliser une lampe à polymériser.
4. Éliminer l'excédent de matériau après 2 secondes de photopolymérisation ou bien 2 minutes après le début du mélange. REMARQUE : Si l'excédent de ciment est éliminé avec une boulette de coton ou similaire, laisser un minimum de matériau après avoir effectué la restauration. Juste après, photopolymériser brièvement l'excédent ou laisser autopolymériser (dans ce cas couvrir l'excédent avec du gel glycérine pour empêcher l'inhibition d'oxygène).
5. (a) Dans le cas d'utilisation de matériaux composite ou céramiques, photo polymérisez le Set à travers la restauration pendant 20 secondes par face  
(b) Dans le cas de non translucidité laisser prendre par auto polymérisation 5 minutes depuis le temps de mélange.
6. Polir la zone marginale.

### STOCKAGE ET MANIPULATION :

Maintenir au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation suivante.

Retirer les capsules seT de leur emballage quand elles sont prêtes à être utilisées.

Stocker à des températures comprises entre 2 ° et 8 °C (35 ° - 45 °F).

Utiliser à température ambiante entre 20 et 25 °C (68 - 77 °F).

### PRÉCAUTIONS :

Destiné à l'usage professionnel uniquement

Maintenir hors de portée des enfants.

Ne pas ingérer/inhalé.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Attention : selon la législation fédérale, la vente ou la commande de ce produit est réservée aux dentistes.

Vous pouvez vous procurer la FDS sur le site [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) ou auprès de votre représentant régional.

### PREMIERS SOINS :

Yeux (contact) : laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Peau (contact) : éliminer à l'aide d'un linge ou d'une éponge propre imbibé(e) d'alcool. Laver abondamment à l'eau.

Ingestion : boire de l'eau ou du lait en grande quantité. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Inhalation : aucun symptôme prévu

### CONDITIONNEMENT :

- Boîtes de 50 capsules

- Teintes disponibles : A1, A2, OA3, Translucide, Opaque blanc.

Fabriqué en Australie par SDI Limitée  
Bayswater, Victoria 3153  
Australie 1 800 337 003  
Autriche 00800 022 55 734  
Brésil 0800 770 1735  
France 00800 022 55 734  
Allemagne 0800 100 5759  
Irlande 01 886 9577  
Italie 800 780625  
Nouvelle Zélande 0800 734 034  
Espagne 00800 022 55 734  
Royaume-Uni 00800 022 55 734  
États-Unis et Canada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

EC REP

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublin 9, Irlande  
Tél +353 1 886 9577

