

CEMENTO RESINOSO AUTOMORDENZANTE E AUTOADESIVO ISTRUZIONI PER L'USO

'seT' è un cemento resinoso automordenzante e autoadesivo duale. 'seT' è indicato nella cementazione di restauri indiretti in ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti. Quando si utilizza 'seT', non è necessario mordenzare e utilizzare un adesivo. 'seT' è un materiale a rilascio di fluoro.

INDICAZIONI PER L'USO:

Ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti.

CONTROINDICAZIONI:

1. Veneer.
2. In alcune persone il prodotto può causare irritazioni della pelle. In questi casi, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a uno specialista.

ISTRUZIONI PER L'USO:

PREPARAZIONE DEL DENTE:

1. Selezionare la tonalità appropriata di 'seT'.
2. Rimuovere il restauro provvisorio e pulire bene la preparazione utilizzando pomice non oleosa per eliminare eventuali tracce di cemento provvisorio (N.B. il restauro provvisorio dovrebbe essere cementato solo con cementi non contenenti eugenolo).
3. Provare il restauro in sede.
4. Risciacquare di nuovo con acqua e asciugare, ma **NON ESSICCARRE**. **ATTENZIONE:** nei casi in cui sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner all'idrossido di calcio a consistenza rigida prima di prendere l'impronta finale. Materiali come perossido di idrogeno, desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti dentinali, ecc. non dovrebbero essere utilizzati poiché eventuali residui potrebbero interferire con la stabilità di adesione e con le reazioni di presa.

PREPARAZIONE DEL RESTAURO:

Pulire bene e preparare il restauro seguendo le indicazioni del produttore.

ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA:

1. Premere il pistone su una superficie dura finché si trova a filo con il corpo della capsula.
Importante: Non premere la capsula con l'applicatore prima di vibrarla.
2. Posizionare immediatamente la capsula attivata in un vibratore per amalgama Ultramat 2 o in un qualsiasi amalgamatore ad alta velocità (4000 – 4800 giri/m).
3. Miscelare per 10 secondi.
4. Rimuovere immediatamente la capsula e posizionarla nell'applicatore.
5. Azionare l'applicatore della capsula finché la pasta non diventa visibile attraverso il puntale trasparente.

APPLICAZIONE di 'seT'

1. Proteggere l'area di lavoro dalla contaminazione dei fluidi intra-orali.
2. Estrudere 'seT' regolarmente su tutte le superfici di adesione del restauro e del dente. N.B. Non utilizzare i lentuli per inserire il cemento nei canali radicolari, per evitare di accelerare troppo le reazioni di presa. Per evitare che rimanga aria intrappolata, vibrare i perni mentre vengono inseriti nel canale radicolare.

Tempo di lavorazione (23°C / 73°F)	2 minuti (minimo)
Tempo di indurimento dall'inizio della miscelazione (temperatura orale)	5 minuti
Tempo di fotopolimerizzazione:	20 secondi.
Volume minimo estruso per capsula:	0.14mL

N.B. Le alte temperature e le luci operatorie diminuiranno il tempo di lavoro e di presa.

3. Alloggiare il restauro, e lasciarlo in posa per 30 secondi prima di fotopolimerizzare.
4. Fresare via il materiale in eccesso dopo avere fotopolimerizzato per 2 secondi o dopo 2 minuti dall'inizio della miscelazione.
N.B. Se il cemento in eccesso viene rimosso con un pellet di spugna o uno strumento simile, lasciare una minima quantità di materiale in eccesso dopo avere posizionato il restauro. Subito dopo, fotopolimerizzare brevemente il cemento in eccesso oppure, in caso di auto-polimerizzazione, coprire il cemento in eccesso con gel di glicerina per prevenire l'inibizione da ossigeno.
5. (a) Nel caso dei compositi e dei materiali in ceramica integrale, fotopolimerizzare "seT" attraverso il restauro per almeno 20 secondi per ogni superficie.
(b) Nel caso di restauri non traslucidi, lasciare autopolimerizzare "seT" per almeno 5 minuti dall'inizio della miscelazione.
6. Lucidare l'area marginale.

CONSERVAZIONE E UTILIZZO:

Conservare in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Non rimuovere le capsule 'seT' dall'involucro di metallo fino al momento dell'utilizzo.

Conservare a temperature comprese fra 2 e 8 °C.

Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C.

PRECAUZIONI:

Solo per uso professionale.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non ingerire.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Attenzione: in base alla normativa di legge in vigore, questo prodotto è vendibile solo ed esclusivamente a medici dentisti o su ordine di medici dentisti.

Le Schede di Sicurezza sono disponibili sul sito www.sdi.com.au oppure contattando il vostro rappresentante di zona.

PRIMO SOCCORSO:

Contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi con abbondante quantità d'acqua e consultare uno specialista.

Contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti d'alcol. Lavare abbondantemente con acqua.

Ingestione: bere acqua o latte in abbondante quantità. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Inalazione: non è attesa alcuna reazione avversa.

CONFEZIONI:

- Scatole da 50 capsule
- Tonalità disponibili: A1, A2, OA3, traslucido, bianco opaco.

Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Gran Bretagna 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublino 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577

