



modificatori di tinta

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

I colori e gli agenti mascheranti prodotti da SDI (Tints and Masking Agents) danno ai denti un aspetto ed un colore naturale. Il colore naturale del dente deriva dalla dentina satura di colore, e dalla luce che penetra attraverso lo smalto traslucido e viene riflessa, trasmessa e assorbita.

Grazie ai modificatori di tinta SDI (Shade Modification System), si ottengono ottimi risultati estetici, in modo semplice e rapido, grazie all'utilizzo di colori ed agenti mascheranti liquidi monocomponenti, da applicare e polimerizzare alla luce.

Il sistema comprende 9 colori traslucidi e quattro agenti mascheranti.

Colori: Blu, Giallo, Trasparente, Rosso, Bianco, Arancio, Grigio, Marrone, Verde.

Agenti mascheranti: Grigio, Universale, Giallo scuro.

COMPOSIZIONE:

65% del peso, esteri di acidi metacrilici
35% del peso, silice pirogenica

INDICAZIONI PER L'USO:


Possono essere utilizzati su smalto, dentina, materiali compositi, compomeri, porcellana, vetro acidato, monomeri e metallo.

ISTRUZIONI:

Pulire ed isolare il dente

1. Mordenzare la superficie del dente con Super Etch 37% acido fosforico per 20 secondi.
2. Sciacquare bene con acqua.
3. Rimuovere l'acqua in eccesso. Lasciare la bocca umida.
4. Applicare l'adesivo Stae per dentina/smalto, in modo da riempire tutte le superfici interne, oppure utilizzare altri leganti, secondo le istruzioni del produttore.
5. Applicare il colore oppure l'agente mascherante SDI adatto (<0,5 mm).

L'immagine che segue fornisce alcune indicazioni per ottenere un restauro simile al vero.

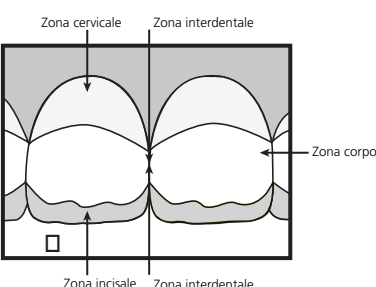

1. Zona cervicale - Rosso, Giallo, Arancio o Marrone
 2. Zona corpo - Grigio, Giallo, Universale
 3. Zona interdentale - Varia di paziente in paziente
 4. Zona incisale - Grigio, Blu.
- Colori scuri nelle zone gengivali in genere diventano più chiari verso il bordo incisale

6. Polimerizzare con la luce per 20 secondi. Eventualmente applicare ulteriori strati di colore o di agente mascherante composito.
7. Coprire con uno strato sottile di composito traslucido, come Glacier Incisal, Wave o altri materiali per restauro, come da istruzioni del produttore.

NOTE SPECIALI:

1. Il colore mascherante dovrebbe corrispondere a quello della dentina ed a quello del materiale del restauro.
2. Applicare gli agenti mascheranti il più possibile in profondità.
3. Un'applicazione mascherante eccessiva conferisce alla dentatura un aspetto monotono e senza vita.
4. Si dovrebbe applicare uno strato sottile di materiale da restauro sopra l'agente mascherante, e poi uno strato finale della tinta della zona incisale/dello smalto.
5. Il colore dovrebbe essere utilizzato sotto lo strato finale del materiale del restauro
6. Non mescolare i colori o gli agenti mascheranti con il materiale per il restauro, in quanto causerebbe una certa porosità.
7. Per ottenere migliori risultati, occorre chiedere il parere del paziente quando selezionate la tinta, in quanto ognuno ha una diversa percezione dei colori.
8. Togliere il rossetto
9. Il dente deve essere pulito e umido.
10. Utilizzare sia la luce naturale che quella artificiale.
11. Si consiglia di utilizzare una salvietta di colore blu.
12. Non fissare il dente, ma dare rapidi sguardi
13. Selezionare la tinta su uno sfondo neutro e naturale
14. La percezione del colore è influenzata dal colore delle pareti e dagli abiti del paziente
15. I colori possono essere mescolati tra di loro o con i colori trasparenti per ottenere diversi gradi di saturazione o diverse tinte.

IMPORTANTE: Applicare i Colori e gli Agenti mascheranti ad una normale temperatura ambiente (23°C/74°F).

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

1. Non refrigerare.
2. Conservare ad una temperatura compresa tra 10° e 25°C (50-77°F).
3. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
4. Non esporre il materiale alla luce diretta.

PRECAUZIONI ED ALLERGIE:

1. Evitare il contatto prolungato dei Colori e degli Agenti mascheranti con la pelle o i tessuti della bocca, in quanto potrebbero causare infiammazioni dei tessuti della cavità orale o rendere la pelle particolarmente sensibile.
2. I pazienti con allergie alla resina dovrebbero interrompere immediatamente l'utilizzo di Colori o Agenti mascheranti.

Kit di modifica della tinta

Riordino 7900000
9 Colori da 1 g
4 Agenti Mascheranti da 1g
accessori

Refill da 1g per Colore

Riordino	
7981414	Giallo
7982424	Grigio
7983333	Marrone
7985252	Bianco
7985353	Blu
7985454	Trasparente
7985555	Verde
7985656	Arancione
7985757	Rosso

Refill da 1g per Agente Mascherante

Riordino	
7970202	Universale
7970404	Giallo Scuro
7975151	Grigio
7975252	Bianco

Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasile 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Germania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nuova Zelanda 0800 734 034
Spagna 00800 022 55 734
Gran Bretagna 00800 022 55 734
USA e Canada 1 800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublino 9, Irlanda
Tel +353 1 886 9577
www.sdi.com.au

