

# SDI shade modification kit

P  
O  
R  
T  
U  
G  
U  
Ê  
S

## INSTRUÇÕES DE USO

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Os agentes mascaradores e modificadores de cor da SDI simulam dentes naturais. A cor natural do dente é uma derivação da cor da dentina (opaca) em conjunto com a penetração, reflexão, transmissão e absorção da luz no esmalte (translúcido).

O sistema SDI Shade Modification (modificação da cor) proporciona um ótimo resultado estético de modo simples e rápido, através de agentes mascaradores e modificadores de cor de componente único e fotopolimerizáveis.

O sistema SDI Shade Modification contém nove tintas modificadoras de cor translúcidas e quatro Agentes Mascaradores.

Modificadores: Azul, Amarelo, Transparente, Vermelho, Branco, Laranja, Cinza, Marrom, Verde.

Agentes Mascaradores: Cinza, Universal, Branco, Amarelo escuro.

### COMPOSIÇÃO:

65% ácidos do éster metacrílico

35% sílica pirogênica

### INDICAÇÕES DE USO:

É indicado para esmalte, dentina, compósitos, compômeros, porcelanas, ionômero de vidro condicionado e metal.

### INSTRUÇÕES:

Limpe e isole o dente

1. Condicione a superfície do dente com ácido fosfórico Super Etch a 37%, por 20 segundos.

2. Lave abundantemente com água.


3. Remova o excesso de água. Mantenha úmido.

4. Aplique o adesivo Stae para esmalte/dentina até saturar toda a superfície interna, ou use outro adesivo, seguindo as instruções do fabricante.

5. Aplique o agente mascarador/modificador SDI em camadas inferiores a 0,5mm. O diagrama abaixo pode ser usado como modelo para que a restauração se assemelhe a dentes naturais.

6. Fotopolimerize por 20 segundos. Pode-se aplicar camadas adicionais de Agente Mascarador ou Modificador.

7. Cubra com uma camada fina de Glacier Incisal, Wave, ou outro material para restauração, de acordo com as instruções do fabricante. Além do uso dos Modificadores e Agentes Mascaradores da SDI para se reproduzir a cor natural da dentina, uma camada extra para o esmalte é necessária, para dar uma aparência natural. Para manter a relação dentina/esmalte natural, recomenda-se uma camada final de compósito transparente, como a Glacier Incisal.

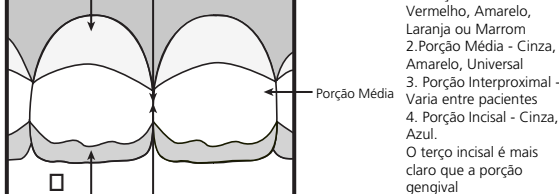

6. Fotopolimerize por 20 segundos. Pode-se aplicar camadas adicionais de Agente Mascarador ou Modificador.

7. Cubra com uma camada fina de Glacier Incisal, Wave, ou outro material para restauração, de acordo com as instruções do fabricante. Além do uso dos Modificadores e Agentes Mascaradores da SDI para se reproduzir a cor natural da dentina, uma camada extra para o esmalte é necessária, para dar uma aparência natural. Para manter a relação dentina/esmalte natural, recomenda-se uma camada final de compósito transparente, como a Glacier Incisal.

### OBSERVAÇÕES:

1. A cor do mascarador deve ser a mesma que a da dentina e a do material para restauração a ser utilizado.

2. O Agente Mascarador deve ser aplicado o mais profundo possível.

3. O uso excessivo do produto resulta em uma aparência artificial.

4. Uma camada fina de material restaurador deve cobrir o Agente Mascarador, seguido de uma camada final da cor incisal/esmalte.

5. O modificador de cor deve ser usado sob a camada final do material de restauração.

6. Não misture o modificador de cor ou agente mascarador com o material de restauração, pois este se torna poroso.

7. Usando-se o consenso para escolher uma determinada cor aumenta-se a chance de sucesso, visto que as pessoas possuem diferentes percepções para as cores.

8. Remover o batom, caso a paciente esteja usando.

9. O dente para o qual a cor será escolhida deve estar limpo e úmido.

10. Utilize iluminação natural, além da iluminação do consultório.

11. É recomendável o uso de babador azul.

12. Olhe sempre rapidamente, evitando olhar fixamente.

13. Selecione a cor em um ambiente neutro.

14. A percepção de cor é afetada pela cor das paredes ou pela cor das roupas do paciente.

15. As tintas modificadoras podem ser misturadas entre si ou com a transparente, a fim de se obter diferentes tonalidades e saturações.

IMPORTANTE: Aplique o Modificador e o Agente Mascarador em temperatura ambiente. (23°C).

### CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

1. Não refrigere.

2. Mantenha em temperaturas entre 10° e 25°C.

3. Não utilize após a data de validade.

4. Não exponha o material à luz direta.

### RECOMENDAÇÕES:

1. Evite o contato prolongado do Modificador e Agente Mascarador com a pele ou com os tecidos orais; pode causar a inflamação dos tecidos orais ou sensibilização da pele.

2. Qualquer paciente com histórico de alergia a resinas deve imediatamente interromper o uso de Modificadores e Agentes Mascaradores.

Atenção: A Lei Federal restringe o uso deste produto aos dentistas ou sob sua ordem.

### Shade Modification Kit

Pedido 7900000

9 x 1g Tintas

4 x 1g Agentes Mascaradores

acessórios

### Refill Tinta Modificadora 1g

Pedido

7981414

Amarelo

7982424

Cinza

7983333

Marrom

7985252

Branco

7985353

Azul

7985454

Transparente

7985555

Verde

7985656

Laranja

7985757

Vermelho

### Refill Agente Mascarador 1g

Pedido

7970202

Universal

7970404

Amarelo Escuro

7975151

Cinza Escuro

7975252

Branco

Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Ireland

Tel + 353 1 886 9577

www.sdi.com.au

