



soothe

D
E
U
T
S
C
H

GEBRAUCHSANLEITUNG

Soothe ist ein desensibilisierendes Gel mit den Wirkstoffen Kaliumnitrat (6%) und Fluoridionen (0.10%). Soothe lindert Sensitivitäten die durch chemische Veränderungen an der Zahnoberfläche auftreten können.

ZUSAMMENSETZUNG

6,0% Kaliumnitrat
0,10% Fluoridionen
89,60% Wasser
4,20% Verdickungsstoffe
0,10% Natriumbenzoat

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Auf die betroffenen Zähne auftragen und 2 Minuten einwirken lassen.
- Für mindestens 10 Minuten weder Essen noch Trinken.
- Alle 2-3 Stunden wiederholen bis Beschwerden nachlassen.

VORSICHT:

Nur zur Anwendung unter zahnärztlicher Aufsicht.
Nicht bei bekannten Allergien auf einen der Wirkstoffe verwenden.
Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.
Bei Zimmertemperatur aufbewahren und verwenden.
Keine zu grossen Mengen des Produkts verschlucken.
Von Kindern fernhalten.

WARNUNG:

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

Letzte Überarbeitung: März 2010



Hergestellt in Australien
von SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australien 1 800 337 003
Österreich 00800 022 55 734
Brasilienl 0800 770 1735
Frankreich 00800 022 55 734
Deutschland 0800 100 5759
Irland 01 886 9577
Italien 800 780625
Neuseeland 0800 734 034
Spanien 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & Kanada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irland
Tel +353 1 886 9577

