

EINKOMPONENTEN
TOTAL ETCH
ADHÄSIV-SYSTEM
FÜR DENTIN / SCHMELZ
GEBRAUCHSANWEISUNG

Stae ist ein Fluoride freisetzendes Einkomponenten-Adhäsiv-System zum direkten Bonding an Schmelz und Dentin, bei dessen Verwendung der Schmelz geätzt werden muss. Stae dringt gleichmäßig und vollständig in die Hybridschicht ein und sichert so eine überlegene Haftung am Zahn.

ZUSAMMENSETZUNG:

Acetylsäure-Monomer
Azeton
Fluoride
Stabilisatoren

INDIKATIONEN:

- I) Alle Komposite für direkte Restaurationen
- II) Kompomere
- III) Komposit / Keramik+ / Metall+ / Porzellan+ Reparaturen.

*zu behandelnde Oberflächen müssen mit einem silanisierenden Primer vorbehandelt werden.

KONTRAINDIKATIONEN:

- I) Nicht in Kombination mit chemisch härtenden Kompositen verwenden.
- II) Nicht zur Pulpenversiegelung verwenden.
- III) Personen mit bekannten Resin Allergien sollten Stae nicht verwenden.
- IV) Nicht in Kombination mit eugenolhaltigem Material oder hämostatischen Mitteln, die Eisenkomponenten enthalten verwenden.
- V) Nicht in Kombination mit desensibilisierenden Mitteln verwenden.

Bemerkungen zum Single Dose System:

Setzen Sie Stae Single Dose in den vorgesehenen Halter ein (Abbildung 1) . Vor der Anwendung die Spitze wie abgebildet **langsam** abbrechen um den Inhalt freizulegen – gleich nach dem Öffnen verwenden. (Abbildung 2). Mit einem Einweg-Applikator (Abbildung 3) gemäß nachfolgender Gebrauchsanweisung auftragen.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Zahn reinigen und isolieren. Um den Zahn zu isolieren wird ein Kofferdamm empfohlen.
2. Mit Standardtechniken eine konservative Kavität vorbereiten.
3. Zum Schutz bei tiefen Kavitäten zur Pulpenüberkappung einen Kalziumhydroxid-Liner sowie angemessenen Glasionomercement verwenden.
4. Die Oberflächen der Kavität gründlich mit feinem, ölfreiem Luftstrom trocknen.
5. Mit Super Etch 37% Phosphorsäure (von SDI Ltd.) für mindestens 20 Sekunden anätzen. BEACHTEN: fluoridierter Schmelz sollte zwischen 90 und 120 Sekunden angeätzt werden. WICHTIG: Bei Benutzung einer Spritze zum Ätzen, den Applikationstip **fest** auf die Spritze aufdrehen, um sicherzustellen, dass der Tip gut mit der Spritze verankert ist. Vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung, eine kleine Menge Gel auf ein Mischpad applizieren um sich mit der Viskosität und der Konsistenz des Materials wieder vertraut zu machen.
6. Gründlich mit Wasser abspülen.
7. Überschüssiges Wasser entfernen, feucht halten. Kontamination, z.B. mit Speichel, vermeiden.
8. Stae auf alle inneren Flächen applizieren.
9. Vorsichtig mit trockener, ölfreier Luft verblasen, um das Lösungsmittel zu verdunsten. Die Oberfläche soll glänzend erscheinen.
10. 10 Sekunden lichthärten.

BEACHTEN: Stae nicht pur in einem Mischbrunnen lichthärten, das Material wird nicht aushärten. Stae enthält einen einzigartigen, hydrophoben Monomer, der unter Einfluss von Sauerstoff nicht aushärtet. Das Produkt härtet nur dann aus, wenn es mit einem lichthärtenden Komposit bedeckt ist.

11. Das Komposit in einer Schichtdicke von 2mm oder weniger applizieren.

LAGERUNG UND VERARBEITUNG:

Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C (50°F-77°F) aufbewahren. Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68°F-77°F) verarbeiten. Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre

WARNHINWEISE:

Vermeidung von Kontakt mit Ätzmittel, Adhäsiv und Komposit mit Haut oder Schleimhaut vermeiden, da Rötungen oder Hautirritationen auftreten können.

Nur für zahnärztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

Nicht verschlucken.

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Von direkter Lichteinstrahlung fernhalten.

Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-Depot.

ERSTE HILFE:

AUGEN (Kontakt): Augen gründlich mit Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen.

HAUT (Kontakt): Gründlich mit einem in Alkohol getränkten Tuch oder Schwamm abwischen. Gründlich mit Wasser abspülen.

Verschlucken: Viel Milch oder Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.

Inhalation: Es werden keine Symptome erwartet.

PACKUNGSEINHEITEN:

- Stae Single Dose Kit:
50 x Stae 0,1ml Single Dose
50 x Points Einweg Mikrofaser-Applikatoren
1 x Halter für Single Dose

- Stae Flaschen Kit:
1 x Stae 5ml Flasche
2 x Super Etch 2ml Spritze
Zubehör

- Stae Nachfüllpack:
1 x Stae 5ml Flasche

Hergestellt in Australien
von SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australien 1 800 337 003
Österreich 00800 022 55 734
Brasilien 0800 770 1735
Frankreich 00800 022 55 734
Deutschland 0800 100 5759
Irland 01 886 9577
Italien 800 780625
Neuseeland 0800 734 034
Spanien 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & Kanada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



SDI Dental Limited
Block 8, St Johns Court
Swords Road, Santry
Dublin 9, Irland
Tel +353 1 886 9577