



# super etch super etch LV

D  
E  
U  
T  
S  
C  
H

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Super Etch und Super Etch LV (low viscosity - niedrige Viskosität)

Ätzmittel für Schmelz und Dentin aus 37% iger Phosphorsäure.

Die Super Etch Spritze garantiert kontrollierte, direkte Applikation für eine schnelle Handhabung und einfaches Ätzen von unzugänglichen Bereichen.

SDI's anorganische Füllpartikel lassen sich ohne Rückstände abspülen.

Super Etch LV's bessere Fließfähigkeit ist speziell für die Anwendung bei der Fissurenversiegelung entwickelt worden. Super Etch LV erreicht hervorragenden Oberflächenkontakt für tieferes Eindringen in Grübchen und Fissuren. Die Öffnung des Super Etch LV Einwegtips beträgt im Durchmesser lediglich 0,41 mm und gewährleistet so eine verbesserte Penetration in die kleinsten Grübchen und Fissuren, die bei Benutzung von größeren Applikationstips nicht gegeben ist.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Zahn isolieren. Kavität vorbereiten. Die anzuätzende Oberfläche mit einer nicht fluoridierenden, ölfreien Prophylaxepaste, oder einem Prophylaxebürstchen reinigen. Sorgfältig mit Wasser spülen.

#### 1. Anätzen.

Die zu ätzende Oberfläche mit trockener, ölfreier Luft trocknen.

**ACHTUNG:** Applikationstip **fest** auf die Spritze aufdrehen, um sicherzustellen, daß der Tip mit der Spritze verankert ist. Die Super Etch Applikationstips können in den gewünschten Winkel abgebogen werden. Die Super Etch LV Tips werden bereits gebogen geliefert. Applikationstip auf die zu benetzende Fläche halten und langsam das Gel applizieren.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung, eine kleine Menge Gel auf ein Mischpad applizieren um sich mit der Viskosität und der Konsistenz des Materials wieder vertraut zu machen. Schmelz mindestens 30 Sekunden ätzen.

Freigelegtes Dentin und etwaigen Glas-Ionomer-Liner 20 Sekunden ätzen.

2. Gründlich 5-10 Sekunden mit Wasser spülen.

3. Überschüssiges Wasser entfernen.

4. Bonding (z. B. STAE) oder Fissurenversiegler (z. B. Conseal F) nach Angaben des Herstellers applizieren.

### SICHERHEITSHINWEISE:

Vermeiden Sie Kontakt mit oralem Gewebe, Augen und Haut. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit viel Wasser spülen.

Im Falle von Augenkontakt, Augen 15 Minuten spülen und einen Arzt konsultieren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nur zur äußeren Anwendung geeignet.

Nach Gebrauch wieder fest verschließen.

Bei Raumtemperatur verwenden.

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt.



Hergestellt in Australien  
von SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australien 1 800 337 003  
Österreich 00800 022 55 734  
Brasilien 0800 770 1735  
Frankreich 00800 022 55 734  
Deutschland 0800 100 5759  
Irland 01 886 9577  
Italien 800 780625  
Neuseeland 0800 734 034  
Spanien 00800 022 55 734  
UK 00800 022 55 734  
USA & Kanada 1 800 228 5166  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

EC REP

SDI Dental Limited  
Block 8, St Johns Court  
Swords Road, Santry  
Dublin 9, Irland  
Tel +353 1 886 9577

Letzte Überarbeitung: 12-2011

#### Super Etch Kit

Artikelnummer 8100040

3 x 2mL Spritzen

25 Einwegtips

#### Super Etch Vorratspackung

Artikelnummer 8100045

10 x 2mL Spritzen

50 Einwegtips

#### Super Etch Nachfüllspritze

Artikelnummer 8100047

1 x 6mL Spritze

#### Super Etch LV

Artikelnummer 8100044

10 x 1mL Spritzen

40 LV Einwegtips

#### Super Etch Einwegtips

Artikelnummer 8100050

Beutel mit 25 Stück (blau) "23 gauge"

#### Super Etch LV Einwegtips

Artikelnummer 8100061

Beutel mit 25 Stück (schwarz) "27 gauge"

Ätzmittel (blaues Gel) Nachfüllflasche

Artikelnummer 8100020

1 x 15mL Flasche

Ätzmittel (transparent / flüssig)

Nachfüllflasche

Artikelnummer 8100025

1 x 15mL Flasche



Sicherheitsmaßnahmen