



# super etch super etch LV

P  
O  
R  
T  
U  
G  
U  
Ê  
S

## INSTRUÇÕES DE USO

Super Etch e Super Etch LV (baixa viscosidade);  
 Ácido fosfórico a 37% para esmalte e dentina.  
 A seringa Super Etch facilita o controle direto da  
 extrusão para obter procedimentos mais rápido  
 e acesso mais facilitado a áreas mais difíceis de serem  
 atingidas. As partículas de carga inorgânica da SDI  
 remove completamente sem deixar resíduos.  
 Super Etch LV foi desenvolvido para selantes assim como  
 o excelente escoamento, para condicionamento de  
 cicatrículas e fissuras além de atingir uma superfície de  
 contato maior obtendo penetração do condicionamento  
 mais profundo dentro das cicatrículas e fissuras. O  
 diâmetro da abertura da ponta do Super Etch LV é  
 de apenas 0,41mm, o que intensifica a penetração  
 dentro da menor cicatrícula ou fissura, sulcos que não  
 admitiriam pontas de outros condicionadores.

### INSTRUÇÕES:

Isole o dente. Prepare a cavidade. Limpe a superfície a  
 ser condicionada usando uma pasta de profilaxia sem  
 flúor e livre de óleo ou com pedra pomes com água. Lave  
 abundantemente com água.

1. Condicionamento ácido;

a) Seque a superfície a ser condicionada com ar seco e  
 livre de óleo;

**PRECAUÇÃO:** Certifique-se de que o dispensador esteja  
 encaixado **firmemente** na seringa. A ponta do Super Etch  
 pode ser inclinada para qualquer ângulo desejado, além  
 de serem previamente inclinadas. Posicione a ponta  
 contra a superfície a ser coberta e devagar dispense o  
 gel.

Nota: Ao usar pela primeira vez ao após um período  
 prolongado no estoque, dispense uma porção pequena  
 num bloco de espatular para se familiarizar com a  
 viscosidade do condicionador e regularizar a extrusão.  
 Condicione o esmalte por 30 segundos no mínimo.  
 Condicione dentina exposta ou ionômero de vidro por  
 20 segundos.

2. Lave abundantemente com água por 5 a 10 segundos;

3. Remova o excesso de água;

4. Aplique o adesivo, como o Stae, selante para  
 cicatrículas e fissuras, como o Conseal f, de acordo com  
 as instruções do fabricante.

### PRECAUÇÕES:

Evite o contato com a mucosa, a pele e os olhos. No  
 caso de contato, principalmente com os olhos, lave-os  
 abundantemente com água por 15 minutos e procure  
 auxílio médico;

Mantenha fora do alcance de crianças;

Não ingerir;

Quando não estiver em uso mantenha o frasco ou a  
 seringa completamente fechados;

Use em temperatura ambiente;

Não use após expirada a data de validade;

Leis federais restringe a venda deste produto somente a  
 dentistas;



Fabricado na Austrália pela SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Áustria 00800 022 55 734

Brasil 0800 770 1735

França 00800 022 55 734

Alemanha 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577

Itália 800 780625

Nova Zelândia 0800 734 034

Espanha 00800 022 55 734

Reino Unido 00800 022 55 734

EUA & Canadá 1800 228 5166

www.sdi.com.au

EC REP

SDI Dental Limited

Block 8, St. Johns Court

Swords Road, Santry

Dublin 9, Ireland

Tel + 353 1 886 9577

Última Revisão: 12-2011

Kit Super Etch

Pedido 8100040

3 seringas de 2mL

25 Pontas descartáveis

Kit Super Etch

Pedido 8100045

10 Seringas de 2mL

50 Pontas descartáveis

Seringa de 6ml de Super Etch

Pedido 8100047

1 Seringa de 6mL

Super Etch LV

Pedido 8100044

10 Seringas de 1mL

40 Pontas lv

Pontas descartáveis para

seringas Super Etch

Pedido 8100050

25 Pontas (23 "blue")

Pontas descartáveis para

seringas Super Etch LV

Pedido 8100061

20 Pontas (27 "black")

Acid Etchant Gel Blue

Pedido 8100020

1 Frasco de 15mL

Etchant Liquid Clear

Pedido 8100025

1 Frasco de 15mL



Precauções