



IMPORTANTE

As informações contidas neste arquivo são apresentadas apenas como um informativo. É apenas um guia para o formulário de Consentimento do Paciente para Profissionais que realizam tratamentos de clareamento em consultório. A SDI desaprova qualquer garantia implícita ou representação sobre a precisão ou integridade das informações.

Você deve assumir total responsabilidade ao usar as informações contidas nesta página; entende e concorda que a SDI Limited e/ou suas filiais não são responsáveis por qualquer reclamação, perda ou dano causado pelo uso deste.

As informações deste arquivo podem ser alteradas.

Motivo: Fornecemos estas informações para dar-lhe uma idéia sobre o que é o clareamento dental realizado pelo dentista. Sua cooperação e compreensão deste material são muito importantes já que nos empenhamos para dar-lhe o melhor resultado possível.

Procedimento: O clareamento dental em consultório é um procedimento criado para clarear o tom dos dentes usando uma mistura de peróxido de hidrogênio. Esta mistura produz um excelente resultado de clareamento no menor tempo possível com uma sensibilidade mínima. Durante o procedimento, o gel clareador será aplicado em seu dente por 3 vezes com sessões de 8 minutos. Para todo o tratamento será usado um retrator de plástico será fixado em sua boca para deixá-la bem aberta e suas gengivas serão cobertas por uma barreira para garantir o isolamento do gel de peróxido de hidrogeno. Quentes e depois do tratamento a cor dos seus dentes será registrada.

- **Riscos:** Todo tratamento, incluindo clareamento dental, traz alguns riscos e limitações. As complicações que poderão ocorrer durante o tratamento de clareamento dental realizado por um dentista são mínimas e pouco freqüentes.
- **Sensibilidade nos dentes:** Durante o processo de clareamento alguns pacientes podem sentir uma sensibilidade nos dentes. Isso é normal e geralmente moderado caso seus dentes não sejam sensíveis. Se você normalmente tem uma sensibilidade nos dentes, por favor, nos informe a respeito. Nos informe sobre qualquer desconforto durante ou após o procedimento para que possamos minimizar seu desconforto. Um leve analgésico normalmente elimina qualquer desconforto.
- **Irritações gengivais ou nos tecidos mole:** O clareamento pode causar inflamação em sua gengiva, lábios ou bochechas. Isso geralmente ocorre quando o gel clareador entra em contato com estes tecidos. Será colocado em sua boca materiais que previnem este contato, mas apesar disso, raramente pode acontecer. Caso tenha qualquer irritação é geralmente leve e de curta duração. Caso ocorra lave com água salgada e morna para o alívio.
- **Restaurações:** Restaurações brancas como: porcelana ou resinas, coroas ou facetas não serão clareadas com o clareamento dental. Por favor, converse a respeito com seu dentista antes de dar início ao tratamento.

Responsabilidade no tratamento: Se você não entender qualquer informação passada durante a consulta, ou qualquer material lido entregue antes ou depois do procedimento sinta-se à vontade em perguntar.

Expectativas: Um clareamento significativo pode ser alcançado em muitos casos, mas não há como prever o quanto seu dente será clareado. Por favor entenda que os dentes tem muitas colorações, tons e manchas. As manchas de tetraciclina ou fluorose não clareiam tanto o que pode realçar após o tratamento. Estes efeitos são geralmente de curta duração. O clareamento dental em consultório não é aconselhado em mulheres grávidas ou lactantes, crianças menores de 14 anos ou qualquer paciente que tenha alergia a peróxidos.

Tratamentos alternativos: Enquanto o tratamento de clareamento dental em consultório é o mais rápido, mais eficaz, saiba que há outros tipos de tratamento para você, como o clareamento caseiro ou o Paint (não disponível no Brasil). Caso queira saber mais destes tratamentos pergunte ao seu dentista.

Entendo que meu clareamento dental em consultório não poderá ter garantia. Posso solicitar maiores informações a respeito dos tratamentos alternativos de clareamento dental que melhor se adéqüe a mim.

Entendo que após o tratamento, tenho que evitar o consumo de qualquer substância com corante (por exemplo: molho de tomate, café, tabaco) por 48 horas.

Ao assinar o formulário atesto que li e entendi os possíveis riscos, complicações e benefícios resultantes do tratamento de clareamento dental em consultório.

Assinatura do Paciente: _____

Data: _____

Nome do Paciente (por extenso): _____

Data: _____