



IMPORTANTE

As informações contidas neste arquivo são apresentadas apenas como um informativo. É apenas formulário de guia para Pacientes Pós-Operatório do Clareamento dental em consultório. A SDI desaprova qualquer garantia implícita ou representação sobre a precisão ou integridade das informações.

Você deve assumir total responsabilidade ao usar as informações contidas nesta página; entende e concorda que a SDI Limited e/ou suas filiais não são responsáveis por qualquer reclamação, perda ou dano causado pelo uso deste.

As informações deste arquivo podem ser alteradas.



Instruções Pós-operatória: Clareamento em consultório com Pola Office

- Siga as instruções dadas pelo seu dentista.
- Caso seja fumante, não fume por 48 horas.
- Não consuma comidas com corante (molho de tomate, amoras, etc) ou bebidas (café, chá, etc) por 48 horas.
- Poderá ocorrer uma leve sensibilidade aos líquidos quentes ou frios. Isso geralmente passa depois de 1 ou 2 dias.
- Caso sinta sensibilidade na gengiva não escove a área afetada durante a escovação bucal.
- O resultado imediato pode ser surpreendente devido à desidratação de seus dentes durante o tratamento. É comum que a cor ou tom após a reidratação dos dentes mude para um tom claro mais natural.
- Os resultados variam de paciente para paciente. Isso depende da cor original dos seus dentes e também dos hábitos como fumar, ou a ingestão de muitas bebidas com corante (vinho tinto, café, chá, etc.)
- Para manter a cor poderão ser aconselhados tratamentos para “retoque” a cada 6 – 12 meses como o Pola Day, Pola Night, Pola Paint ou Pola Office.
- Restaurações existentes, coroas, resinas, etc não serão clareadas. Por este motivo poderão ser trocadas para combinar com seu novo sorriso.
- Se sua família ou amigos notarem seu sorriso, deixe-os saber que eles também podem ter um melhor sorriso com o clareamento dental com Pola!