

Spielend leichte Füllungen

5mm



Ein Bulk-Fill-Inkrement
bis 5 mm

20 Sek.
LED-Lichthärtung



“ Ich arbeite nun seit drei Jahren mit **aura bulk fill**. Das Material lässt sich geschmeidig ausbringen, ist standfest und härtet extrem fest aus. Die Politur ist exzellent, und meine Seitenzahnfüllungen waren nie besser. Das Komposit eignet sich ideal für jede Füllung, egal ob in Milch- oder bleibenden Zähnen. Ich habe **aura bulk fill** schon vielen Kollegen empfohlen und werde es weiter als mein Komposit der Wahl verwenden.

Dr Liel Grinbaum, DMD



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

aura bulk fill
Ultra-Universal-Restaurationmaterial

aura bulk fill



Eine Farbe. Eine Füllung.

Das Komposit für schnelle und einfache Seitenzahnfüllungen.

- Natürliche Resultate mit nur einer Universalfarbe
- Hohe Polymerisationstiefe, keine Deckschicht nötig
- Leichte Applikation in wenigen Sekunden
- Optimales Handling dank wachsartiger Konsistenz: stopfbar und nicht klebrig.



The Dental Advisor, Vol. 33,
No. 07, September 2016

2.21% **Geringe Volumenschrumpfung**
aura bulk fill sorgt durch niedrigen Polymerisationsstress für langlebige Füllungen.

115 MPa **Exzellente Biegefestigkeit**
aura bulk fill widersteht starken Verformungskräften, ohne zu brechen.

375 MPa **Hohe Druckfestigkeit**
aura bulk fill hält den hohen Druckkräften im Mund stand.


Polymerisationstiefe

Die Opazität von **aura bulk fill** ergibt sich aus den unterschiedlichen Brechungsindizes seiner zwei Bestandteile, Füller und Kunststoff.

Bei der Lichthärtung ändert sich der Brechungsindex des Kunststoffs minimal und passt sich an den Index des Füllers an.

Dies senkt die Opazität vorübergehend, das Licht dringt tiefer ein, und die Polymerisationstiefe wird erhöht.

Nach dem Härten gehen die Indizes wieder auseinander, und **aura bulk fill** erhält die ideale Opazität für brillante Resultate mit Chamäleoneneffekt.

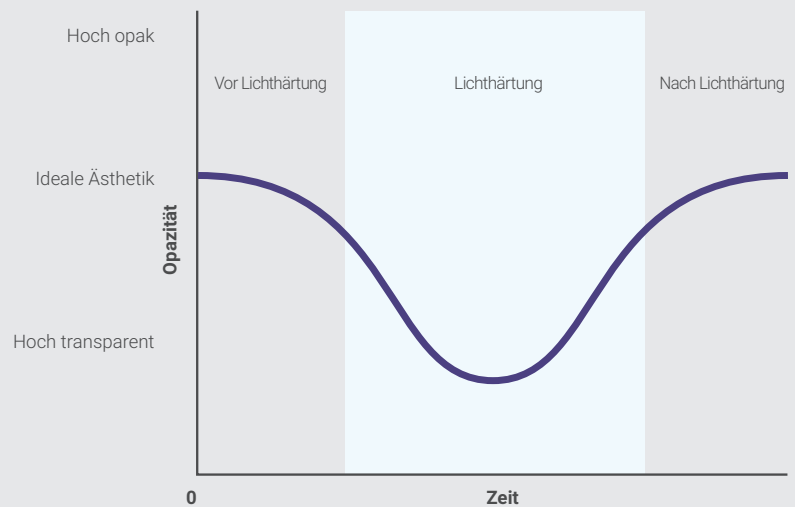


VORHER



NACHHER

— Dr. Bob Lowe (USA)

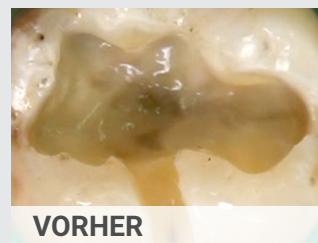

VORHER



NACHHER

— Dr. Gregor Thomas (Germany)

// 8565012 Bulk Fill 20 x 0.25g Complet Refills // 8560012 Bulk Fill 1 x 4g Spritzen Refills



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166



15-09-2016 M100259 A