

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

VERHALTEN NACH DER BEHANDLUNG: IN-OFFICE- ZAHNAUFHELLUNG MIT POLA



- Beachten Sie die Verhaltenstipps Ihres Zahnarztes.
- Falls Sie Raucher sind, rauchen Sie 48 Stunden nicht.
- Vermeiden Sie 48 Stunden stark farbstoffhaltige Speisen (rote Soßen, Heidelbeeren usw.) und Getränke (Kaffee, Tee usw.).
- Eventuell sind Sie etwas empfindlich gegen heiße oder kalte Flüssigkeiten. Dies vergeht meist in 1-2 Tagen. Bei hoher oder anhaltender Empfindlichkeit wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Bei empfindlichem Zahnfleisch sparen Sie den betroffenen Bereich beim Zähneputzen aus.
- Direkt nach der Aufhellung kann das Resultat wegen einer leichten Dehydrierung Ihrer Zähne sehr drastisch wirken. In der Regel dunkelt die Farbe zu einem natürlichen Weiß nach, wenn die Zähne nach der Behandlung wieder hydriert werden.
- Langzeitresultate variieren von Patient zu Patient. Dies kann von Ihrer ursprünglichen Zahnfarbe und Gewohnheiten wie Rauchen oder Konsum farbstoffhaltiger Getränke (Rotwein, Kaffee, Tee usw.) abhängen.
- Damit Ihre Zähne hell bleiben, empfiehlt sich eine „Auffrischungsbehandlung“ alle 6-12 Monate. Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach den verschiedenen Optionen zum „Auffrischen“, wie Pola Day, Pola Night, Pola Light, Pola Luminare oder Pola Rapid.
- Bestehende Füllungen, Kronen, Befestigungen usw. erhalten nicht ihre Originalfarbe zurück. Eventuell müssen sie passend zu Ihrem neuen Lächeln ersetzt werden.
- Wenn Familie oder Freunde Ihr neues Lächeln bemerken, lassen Sie sie bitte wissen, dass Pola auch ihr Lächeln aufhellen kann!



SCANNEN SIE DEN QR-CODE
FÜR MEHR INFORMATIONEN
ZU DEN POLA PRODUKTEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die Angaben in dieser Datei dienen nur zu Informationszwecken. Es handelt sich lediglich um eine Empfehlung für ein postoperatives Patientenmerkblatt bei professioneller In-Office-Zahnaufhellung. Wir übernehmen keine stillschweigende Garantie oder Zusicherung bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Angaben. Sie tragen die volle Verantwortung für die Nutzung der Angaben auf dieser Seite und erkennen an, dass SDI Limited und/oder verbundene Unternehmen für aus dieser Nutzung entstehende Ansprüche, Verluste oder Schäden weder verantwortlich noch haftbar sind.

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

www.sdi.com.au | polawhite.com.au