

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

ISTRUZIONI POST-OPERATORIE: SBIANCAMENTO DENTALE IN AMBULATORIO POLA



- Seguire le istruzioni del professionista
- Se lei è fumatore, non fumi per 48 ore.
- Si astenga dal consumo di alimenti molto colorati (salsa rossa, mirtilli ecc.) e di bevande (caffè, tè ecc.) per 48 ore.
- Può verificarsi una lieve sensibilità ai liquidi caldi o freddi. Di solito passa entro 1-2 giorni. In caso di sensibilità grave o persistente, contattare il professionista.
- In caso di sensibilità gengivale, non spazzolare la zona interessata mentre si lavano i denti.
- I risultati dello sbiancamento immediato possono essere molto evidenti grazie a una lieve disidratazione dei denti. È normale che il colore si attenni dopo il trattamento, quando i denti si reidratano fino a raggiungere la tonalità bianco naturale.
- I risultati a lungo termine variano da paziente a paziente. Questo può dipendere dal colore originale dei denti e da abitudini come il fumo o il consumo di bevande colorate (vino rosso, caffè, tè ecc.).
- I trattamenti di "ritocco" sono consigliati ogni 6-12 mesi per mantenere la tonalità. Può rivolgersi al suo professionista di fiducia per conoscere le diverse opzioni di "ritocco" come Pola Day, Pola Night, Pola Light, Pola Luminate o Pola Rapid.
- Le otturazioni, le corone, i bonding ecc. esistenti non si sbiancano rispetto al loro colore originale. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituirli per adattarli al nuovo sorriso.
- Se i suoi familiari o amici notano il suo nuovo sorriso, dica loro che lo sbiancamento Pola può aiutare a migliorare anche il loro!



SCANSIONI IL CODICE QR PER
MAGGIORI INFORMAZIONI SUI
PRODOTTI POLA

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ:

Le informazioni contenute in questo file sono presentate solo a titolo informativo e d'interesse. Si tratta esclusivamente di una linea guida per un modulo post operatorio del paziente per lo sbiancamento professionale in studio. Decliniamo qualsiasi responsabilità in merito a garanzie o dichiarazioni implicite sull'accuratezza o la completezza delle informazioni.

L'utente si assume la piena responsabilità dell'utilizzo delle informazioni contenute in questa pagina e prende atto e accetta che SDI Limited e/o le sue affiliate non sono responsabili di eventuali reclami, perdite o danni derivanti dal loro utilizzo.

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

www.sdi.com.au | polawhite.com.au