

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA PO ZABIEGU: POLA - WYBIELANIE ZĘBÓW W GABINECIE



- Postępuj zgodnie z zaleceniami stomatologa.
- Jeżeli palisz papierosy, nie pal przez 48 godzin.
- Nie spożywaj mocno barwiącej żywności (czerwony sos, jagody itp.) oraz napojów (kawa, herbata itp.) przez okres 48 godzin.
- Może wystąpić łagodna nadwrażliwość na gorące lub zimne płyny. Zazwyczaj objawy te ustępują w okresie 1-2 dni. Jeżeli nadwrażliwość jest dokuczliwa lub utrzymuje się, skontaktuj się z gabinetem stomatologicznym.
- W przypadku nadwrażliwości dziąseł, nie szczotkuj tego obszaru podczas mycia zębów.
- Efekt tuż po wybielaniu może być dość zaskakujący z powodu niewielkiego odwodnienia zębów. To normalne, że kolor nieco ściemnieje po ponownym nawodnieniu zębów, uzyskując naturalny biały odcień.
- Wyniki długoterminowe różnią się w zależności od indywidualnych cech pacjenta. Mogą one zależeć od pierwotnego odcienia zębów, także od nawyków, jak palenie tytoniu lub picie barwiących napojów (czerwone wino, kawa, herbata itp.).
- Zaleca się zabiegi „korygujące” co 6-12 miesięcy, aby zachować dany odcień. Możesz zapytać lekarza dentystę o różne opcje działań „korygujących”, jak np. Pola Day, Pola Night, Pola Light, Pola Luminare lub Pola Rapid.
- Obecne wypełnienia, korony, łączenia itp. nie wybielają się i będą mieć pierwotny odcień. Dlatego może być konieczna ich wymiana, aby pasowały do Twojego nowego uśmiechu.
- Jeżeli Twoja rodzina lub znajomi zauważą Twój nowy uśmiech, przekaż im, że dzięki metodzie wybielania Pola ich uśmiech również może stać się piękniejszy!



ZESKANUJ KOD QR, ABY
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O
PRODUKTACH POLA.

ZASTRZEŻENIE:

Wytyczne zawarte w niniejszym pliku są przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Stanowią one wyłącznie Wytyczne dotyczące pozabiegowego postępowania pacjenta w przypadku profesjonalnego wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym. Nie udzielamy żadnych dorozumianych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności przedstawionych tu informacji. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z informacji zawartych na tej stronie oraz rozumie i zgadza się, że SDI Limited i/lub podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek roszczeń, strat lub szkód wynikających z wykorzystania informacji.

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

www.sdi.com.au | polawhite.com.au