

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## INSTRUÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS: CLAREAMENTO DENTAL DE CONSULTÓRIO COM POLA.

- Siga as instruções do seu dentista.
- Se você é fumante, não fume por 48 horas.
- Evite comer alimentos muito coloridos (molho vermelho, frutas vermelhas, etc.) e bebidas (café, chá, etc.) por 48 horas.
- Pode ocorrer leve sensibilidade a líquidos quentes ou frios. Isso geralmente passa em 1 a 2 dias. Se a sensibilidade for forte ou persistir, entre em contato com o seu dentista.
- Se você sentir sensibilidade nas gengivas, não escove a área afetada enquanto escova os dentes.
- Os resultados imediatos do clareamento podem ser bastante drásticos devido a uma pequena desidratação dos dentes. É normal que a cor diminua após o tratamento, quando os dentes forem reidratados para um tom branco natural.
- Os resultados a longo prazo variam de paciente para paciente. Isto pode depender da tonalidade original dos seus dentes e inclui hábitos como fumar ou beber bebidas coloridas (vinho tinto, café, chá, etc.)
- Tratamentos de "retoque" são recomendados a cada 6 a 12 meses para manter a tonalidade. Você pode perguntar ao seu dentista sobre diferentes opções de "retoque", como Pola Day, Pola Night, Pola Light ou Pola Luminare.
- Restaurações, coroas, colagens, etc. existentes não irão clarear a sua tonalidade original. Portanto, pode ser necessário alterá-los para corresponder ao seu novo sorriso.
- Se a sua família ou amigos notarem o seu novo sorriso, diga a eles que o clareamento Pola também pode ajudar a melhorar o sorriso deles!



ESCANEIE O CÓDIGO QR  
PARA SABER MAIS  
INFORMAÇÕES SOBRE  
OS PRODUTOS POLA

### AVISO LEGAL

As informações contidas neste arquivo são apresentadas apenas para informação e esclarecimentos. É apenas uma Orientação para um formulário Pós-Operatório do Paciente para Clareamento Profissional em Consultório. Isentamo-nos de qualquer garantia ou declaração implícita sobre a exatidão ou integridade das informações. Você assume total responsabilidade pelo uso das informações nesta página e entende e concorda que a SDI Limited e/ou suas afiliadas não são responsáveis por qualquer reclamação, perda ou dano resultante de seu uso.

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) | [polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)