

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS: BLANQUEAMIENTO DENTAL EN CLÍNICA CON POLA



- Siga las instrucciones de su dentista.
- Si es usted fumador, evite el tabaco durante 48 horas.
- Absténgase de ingerir alimentos (salsa de tomate, arándanos, etc.) y bebidas (café, té, etc.) muy pigmentados durante 48 horas.
- Puede experimentar una leve sensibilidad a los líquidos fríos o calientes que habitualmente desaparece en 1 o 2 días. Si la sensibilidad es grave o persiste, póngase en contacto con su dentista.
- Si experimenta sensibilidad en las encías, evite la zona afectada al cepillarse los dientes.
- Los resultados inmediatos del blanqueamiento pueden ser bastante espectaculares debido a una leve deshidratación de los dientes. Es normal que el color se atenúe al finalizar el tratamiento cuando los dientes se rehidratan hasta alcanzar un tono blanco natural.
- Los resultados a largo plazo varían de un paciente a otro. Esto puede depender del tono original de sus dientes, así como de hábitos como fumar o ingerir bebidas muy pigmentadas (vino tinto, café, té, etc.).
- Se recomienda realizarse tratamientos de «retoque» cada 6-12 meses para mantener el tono. Puede consultar a su dentista sobre las distintas opciones de «retoque», como Pola Day, Pola Night, Pola Light o Pola Luminare.
- Los empastes, coronas, adhesivos, etc. existentes no blanquearán su tono original. Por lo tanto, es posible que sea necesario cambiarlos para que encajen con su nueva sonrisa.
- Si su familia o amigos se percatan del nuevo brillo de su sonrisa, hágalos saber que el blanqueamiento Pola también puede ayudarles a mejorar su sonrisa.



ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA  
CONOCER MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE LOS PRODUCTOS POLA

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

La información contenida en este archivo se presenta únicamente a título informativo y de interés. Se trata únicamente de una guía para un formulario postoperatorio para el paciente tras realizar un blanqueamiento profesional en clínica. Rechazamos cualquier garantía o representación implícita con respecto a la exactitud o integridad de la información.

Usted asume toda la responsabilidad por el uso que haga de la información de esta página y comprende y acepta que SDI Limited y/o sus afiliados no son responsables de reclamación, pérdida o daño algunos resultantes de su uso

CREATED BY SDI

# POLA

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

## WHITER BRIGHTER YOU



SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au) | [polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)