

POLA



Guide de traitement Avec le système blanchiment au cabinet ou à domicile

- Étape 1 :** Enregistrer la teinte de départ à l'aide du teintier Vita* Shade Guide. Choisir une teinte réaliste en accord avec le patient.
- Étape 2 :** En fonction de la teinte actuelle et de l'état des dents du patient, recommander un produit Pola à l'aide du guide ci-dessous.
- Étape 3 :** Donner des instructions au patient sur la conduite à tenir après le traitement.
- Étape 4 :** Veiller à ce que le patient prenne un rendez-vous de suivi.
- Étape 5 :** Demander au patient de rédiger un avis.

Type de patient	Nombre approx. De jours (recommandé)	Pola Light 9,5 % HP, 22 % CP	Pola Day	Pola Night	Pola Day CP 35 % CP	Pola Office+ 37,5 % HP
Teintes plus claires – patients plus jeunes avec une décoloration légère (14-21 ans)	3 - 5 jours	9,5 % HP, 22 % PC		22 % PC	✓	✓
Teintes intermédiaires – Recommandées pour les patients présentant une décoloration modérée	5 - 7 jours	9,5 % HP, 22 % PC	9,5 % HP	10 % PC, 16 % PC, 22 % PC	✓	✓
Teintes plus foncées – Patients présentant une décoloration plus marquée	10 - 14 jours	9,5 % HP	9,5 % HP	16 % PC, 22 % PC	✓	✓
Patient suivant une traitement par aligneurs	10 - 14 jours			10% PC		
Patients de 45 ans et plus et/ou patients présentant une décoloration plus intrinsèque pouvant être causé par un traitement médicamenteux	10 - 14 jours	9,5 % HP	9,5 % HP	22 % PC	✓	✓
Patients présentant des récessions gingivales, une usure du bord incisif ou des lésions d'abfraction	3 - 5 jours			10% PC		

*Vita shade guide is a trademark of VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germany

POLA

Un Sourire Plus Blanc, Plus Éclatant

SYSTÈME AVANCÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS
SDI.COM.AU | POLAWHITE.COM.AU



VOTRE NOTRE
SOURIRE. VISION.

Concentrations Pola aide mémoire

Pola Day 9.5%

Péroxyde d'hydrogène – Idéal pour les teintes A & B, patients ne présentant pas ou peu de sensibilité. Une application par jour pendant 30 minutes s'ils utilisent une gouttière sur mesure.



Pola Day CP 35%

Idéal pour l'éclaircissement des dents dévitalisées. Si les patients utilisent cette concentration quotidiennement, ils pourront effectuer un traitement de 15 minutes par jour.



Pola Night 16%

Péroxyde de carbamide – Idéale pour les teintes C & D, cette concentration doit être appliquée de 90 minutes à toute la nuit et possède la plus longue durée d'action, suffisante pour décomposer les molécules à coloration longue.



Pola Night 22%

Péroxyde de carbamide – Idéale pour les patients soucieux d'éviter toute sensibilité mais désireux d'obtenir un résultat rapide. Ils feront une application par jour pendant 45 minutes.

Pola Night 10%

Péroxyde de carbamide – Cette concentration s'utilise avec le traitement par aligneurs, le patient peut appliquer le gel de 2 heures à toute la nuit à l'intérieur des aligneurs.



Pola Light 9.5%

Péroxyde d'hydrogène (lumière rouge/bleue). Il s'agit d'une option toute prête pour un booster d'éclaircissement rapide en 5 jours. Nul besoin de prise d'empreinte ou de fabrication de gouttière sur mesure. Le patient fera 2 applications de 10 minutes par jour.

Pola Light 22%

Carbamide Peroxide (Blue Light), the patient will complete 2 x 15 minute treatments a day.



POLA

Un Sourire Plus Blanc,
Plus Éclatant

SYSTÈME AVANCÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS
SDI.COM.AU | POLAWHITE.COM.AU

SDI

VOTRE NOTRE
SOURIRE. VISION.