




POLISHING PASTE

KOMPOSIT POLIERPASTE

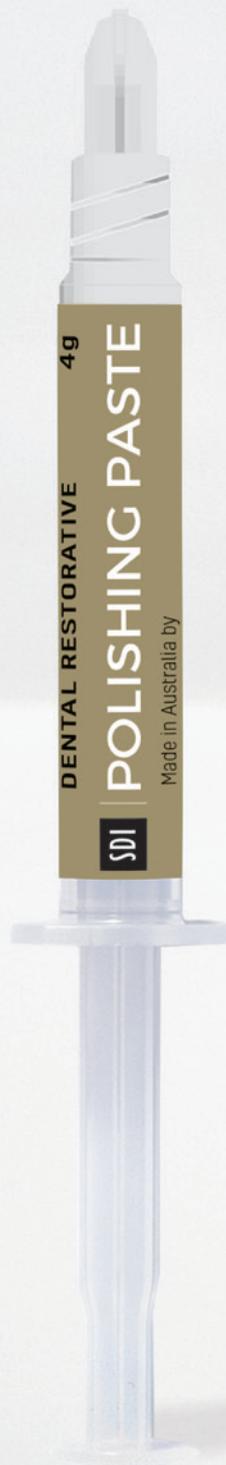

INDIKATIONEN

Kompositrestaurationen

Amalgamrestaurationen

Kompomerrestaurationen

Finieren von Porzellan, Keramik und Gold

KOMPOSIT POLIERPASTE

SDI Polierpaste verleiht Komposit-, Kompomer-, Amalgam-, Porzellan-, Keramik- und Goldrestorationen einen spiegelnden Glanz

Eine Mischung aus Aluminiumoxyd-Kristallen sorgt für eine glatte, brillante Oberfläche der Restauration.

- Sehr feine, schmelzähnliche Partikel verbessern die brillante Erscheinung der Restauration
- Verbessert den ästhetischen Hochglanz von Komposit- und Kompomerrestorationen
- Sorgt schonend für eine glatte und glänzende Oberfläche
- Entfernt eventuell verbliebene Partikel von Gummipolierern
- Eine polierte Restauration sorgt für verbesserte Abriebbeständigkeit und für eine höhere Lebensdauer der Restauration
- Angenehmer Pfefferminzgeschmack erhöht den Komfort des Patienten
- Ideal für den routinemäßigen Einsatz bei Prophylaxe-Behandlungen und zum Nachpolieren von Kompositrestorationen
- Ideal für die interproximale Politur mit Zahnseide - ohne Beeinträchtigung der Kontaktpunkte
- Einfach zu applizieren für dauerhafte Resultate
- Effizient und zeitsparend
- Vollständig abspülbar

BESTELLINFORMATION

Polierpaste
4g Einzelspritze Polierpaste

8100150

GEBRAUCHSANWEISUNG


- 1 Oberfläche mit Super Etch 37%Phosphorsäure 20 Sekunden ätzen.
- 2 Gründlich mit Wasser spülen.
- 3 Überschüssiges Wasser entfernen, feucht halten.
- 4 Apply Zipbond Universal Adhäsiv oder ein anderes Adhäsiv gemäß den Angaben des Herstellers auf alle inneren Flächen applizieren.



- 5 Vorsichtig mit trockener, ölfreier Luft 2 Sekunden verblasen, um das Lösungsmittel zu verdunsten. Die Oberfläche soll glänzend erscheinen.
- 6 20 Sekunden lichthärten.
- 7 Place Luna Universal Komposit - oder Wave - fließfähiges Komposit - in Front- oder Seitenzahn applizieren.



- 8 Jede 2mm dicke Schicht 20 Sekunden lichthärten.
- 9 Falls notwendig, die Restauration konturieren.
- 10 SDI Polierpaste sowohl auf den Polierer als auch auf die Restauration auftragen.

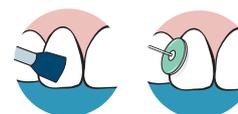

- 11 Etwas Wasser sowohl auf die Restauration als auch auf den Polierer applizieren und mit geringer Geschwindigkeit und leichtem Druck 30 Sekunden polieren. Interproximal mit Zahnseide verwenden.
- 12 Spülen und trocknen.



YOUR SMILE. OUR VISION.

CE
0297

11-2021

M810503 B



+036M8105031+

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
3-15 Brunson Street,
Bayswater, Victoria 3153
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 0225 5734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759

ITALIEN 00800 0225 5734
NEUSEELAND 0800 734 034
SPANIEN 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166