

SDI | ULTRAMAT S

AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD



ES TAN SIMPLE DE USAR, SOLO DISPONE DE 3 BOTONES

Hay tres opciones para ajustar el tiempo, 6, 8 y 10 segundos que permiten mezclar todos sus materiales encapsulados. La unidad puede detenerse en cualquier momento presionando estos botones durante su operación o solamente al levantar la tapa.

¡TAN FÁCIL DE LIMPIAR!

La higiénica superficie lisa de la cubierta facilita la limpieza para el control de infecciones. La superficie plástica no porosa puede limpiarse con cualquier desinfectante dental.

BAJA VIBRACIÓN Y EXTREMADAMENTE SILENCIOSO

A diferencia de algunos amalgamadores, Ultramat S tiene un dispositivo de baja producción de ruido. La vibración mínima de todas sus partes externas garantiza que no se moverá de posición.

ADECUADO PARA TODAS SUS CÁPSULAS

La horquilla flexible puede ajustarse a un sin número de cápsulas con extremos redondos (cápsulas de amalgama), y también a las que tienen boquillas salientes (cápsulas con cemento de ionómero de vidrio).



CARACTERÍSTICAS

TRITURACIÓN EXACTA Y CONSISTENTE

Ultramat S incluye un cronómetro oscilante controlado por un microprocesador para lograr una trituration exacta y consistente.

ALTO RENDIMIENTO DE ENERGÍA

Posee una frecuencia de mezcla de 4550 oscilaciones por minuto (+/- 1%). Ultramat S garantiza la mezcla completa de cualquier material dental. Sin embargo, produce un consumo de energía relativamente bajo.

VOLTAJE DUAL

Ultramat S opera con voltajes entre 100-120 y 220-240V, 50 y 60Hz. Es compatible con múltiples voltajes y frecuencias de energía.

0-10
SEGUNDOS/
TEMPORIZADOR

4550
OSCILACIONES

**120 &
240v**

VENTAJAS

Trituración exacta y consistente

Baja vibración y extremadamente silencioso

Simple de usar - solo dispone de 3 botones

Adecuado para todas sus cápsulas

Fácil de limpiar

Indicador de bajo consumo de energía y función de apagado

2 años de garantía

Voltaje dual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	217mm	8.5"
Profundidad	173mm	6.75"
Altura	180mm	7.12"
Voltaje	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Peso	2.43kg	5.4lbs

INDICADOR DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y FUNCIÓN DE APAGADO

Si el suministro de energía cae fuera de los rangos requeridos de 100-120V y 220-240V, el indicador de energía destellará en color azul y la unidad no funcionará hasta que se suministre el adecuado rango de energía. Este evita que los materiales se mezclen inadecuadamente.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD

Cuando se abra la tapa transparente, Ultramat S detendrá inmediatamente la mezcla de materiales.


ADECUADO PARA TODAS SUS CÁPSULAS

La horquilla flexible puede ajustarse a un sin número de cápsulas con extremos redondos [cápsulas de amalgama], y también a las que tienen boquillas salientes [cápsulas con cemento de ionómero de vidrio].

TIPO DE PRODUCTO (CAPSULES)	TIEMPO DE MEZCLA(SEGUNDOS) A USAR CON ULTRAMAT 2
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus / Riva Self Cure [regular y rápido]	10



REFERENCIAS DE PEDIDO

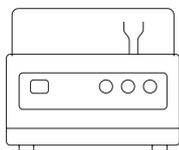

EQUIPO

Ultramat 2 (USA - includes power cord for USA)	5546045
Ultramat 2 (All countries - includes power cord for the region the product is shipped to)	5546052

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, no son marcas registradas de SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND +64 21 400 323
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166