



CRÉÉ PAR SDI

POLA

SYSTÈME AVANCÉ DE
BLANCHIMENT DES DENTS

VOTRE
CATALOGUE
DE SOURIRE





PARLEZ À
VOS PATIENTS
AU SUJET D'UN
PROGRAMME
D'ÉCLAIRCISSEMENT
FAIT POUR EUX

AU CABINET

Pola Rapid	6% peroxyde d'hydrogène	3 ou 4 applications de 15 minutes
Pola Professional	35% peroxyde d'hydrogène	3 applications de 15 minutes
Pola Professional	37.5% peroxyde d'hydrogène	3 applications de 15 minutes



À DOMICILE

Pola Day

6% peroxyde d'hydrogène	1 application de 45 minutes
-------------------------	-----------------------------



Pola Night

Note : 1% de peroxyde d'hydrogène correspond à 2.77% de peroxyde de carbamide

10% peroxyde de carbamide	2 heures par jour à toute la nuit
---------------------------	-----------------------------------

16% peroxyde de carbamide	90 minutes par jour à toute la nuit
---------------------------	-------------------------------------



Pola Light

6% peroxyde d'hydrogène	2 x 10 ou 2 x 15 minutes de traitement quotidien.
-------------------------	---------------------------------------------------



Pola For Aligners

10% peroxyde de carbamide	1 x 2 heures / jour par nuitée
---------------------------	--------------------------------




EN DÉPLACEMENT

Pola Luminate

6% peroxyde d'hydrogène	Application de 2 x 30 minutes par jour
-------------------------	----------------------------------------



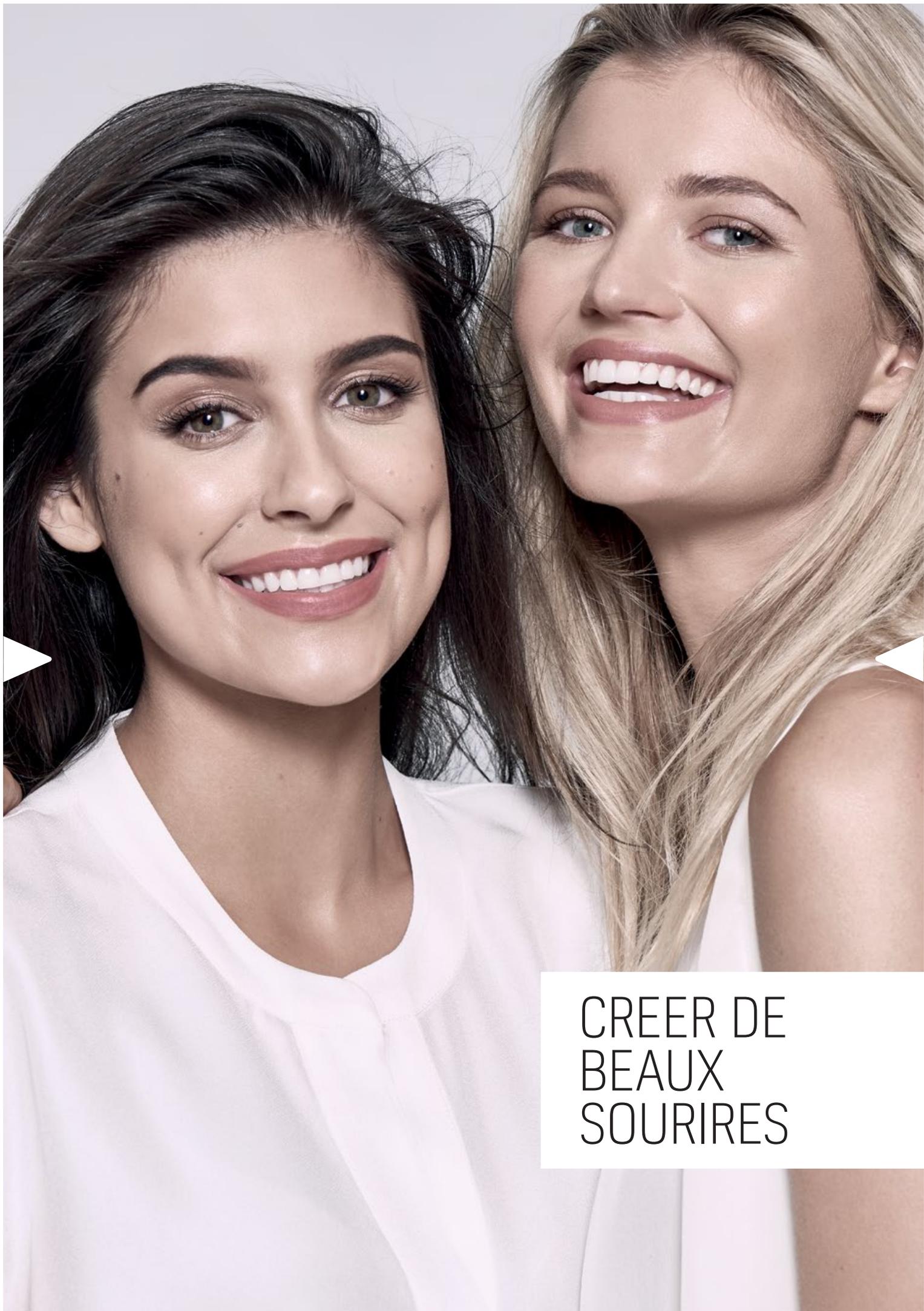

CREER DE
BEAUX
SOURIRES

POLA PROFESSIONAL

POLA PROFESSIONAL

Pola Professional est un système d'éclaircissement au peroxyde d'hydrogène conçu pour blanchir médicalement les dents traitées de manière endodontique. À l'aide de la technique « blanchiment interne interne », Pola Professional fournit un système de blanchiment facile et fiable pour le blanchiment des dents dévitalisées.

- Application extrêmement rapide
- Kits 1 patient et 3 patients brevetés

Pola Professional est disponible en 2 versions différentes pour répondre à vos besoins :

1. Seringue Automix en double mélange
- 2 Poudre et liquide - mélangé & appliqué par l'opérateur

37.5% PEROXYDE D'HYDROGÈNE DOUBLE TUBE - AUTO MÉLANGÉ DISTRIBUTION DIRECTE

Le système mélange automatique offre des temps de préparations nettement plus courts, un gel fraîchement activé tel que nécessaire et une application directe et précise.

35% PEROXYDE D'HYDROGÈNE POUDRE ET LIQUIDE - MÉLANGÉ ET APPLIQUÉ PAR L'OPÉRATEUR

Une fois mélangée, la poudre et le liquide forment une mousse bleue claire comme du gel, non collante et non filandreuse, facilitant ainsi la mise en place à l'intérieur de la chambre pulpaire ouverte.





SYSTÈME ULTRA
PERFECTIONNÉ DE
ECLAIRCISSEMENT
DENTAIRE

POLA RAPID



Pola Rapid est le nouveau système d'éclaircissement au fauteuil qui éclaircit les dents en toute sécurité en seulement 45 minutes.

Une formule au peroxyde d'hydrogène à 6% qui assure une libération immédiate des principes actifs.

Indications:

1. Eclaircissement des dents vitales dyschromiées.
2. Eclaircissement des dents devitalisées dyschromiées.

Mise en œuvre et retrait facile

Le gel à haute viscosité s'applique facilement et s'élimine rapidement grâce à sa formule spéciale non collante. L'extrusion est rapide et facile et le gel ne coule pas après son application à la surface de la dent.

Un gel bleu pour une application toujours plus rapide

La teinte bleue de Pola Rapid améliore la visibilité et l'application. Le gel facile à appliquer et non collant permet aussi une élimination aisée.

Distribution simple et application précise

Pas besoin de mélanger. La seringue double assure un mélange automatique du gel qui est appliqué directement sur la dent. L'embout pinceau applicateur permet d'obtenir une couche régulière et précise.

Procédure simple

Pas de protection des tissus mous. Avec une préparation simple des dents et un temps de contact rapide par application, il réduit le temps passé au fauteuil et améliore la productivité.

Désensibilisant intégré

Pola Rapid bénéficie d'un désensibilisant intégré qui inhibe la sensibilité post-opératoire. Le nitrate de potassium, un neuro-dépolarisateur prévient contre les sensibilités et produit un effet calmant. La teneur élevée en eau garantit le confort du patient pendant et après le traitement.

Libération de fluor pour renforcer les dents

Pola Rapid contient du fluor qui aide à renforcer les dents et à les protéger contre la sensibilité.


S'utilise avec ou sans lampe de blanchiment

Pola Rapid peut être utilisé avec ou sans lampe de blanchiment car il n'a pas besoin de chaleur pour s'activer.

INSTRUCTIONS POUR L'ECLAIRCISSEMENT



Before

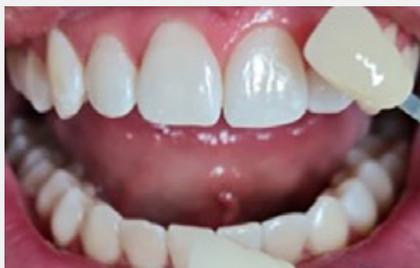

After

Image courtesy : Dr. G. Kölling, Germany

1. Déterminer et enregistrer la teinte avant traitement. Suivez l'ordre de ce teintier Vita* en fonction du degré de luminosité.
2. Nettoyer les dents UNIQUEMENT avec de la pâte à polir.
3. Mettre en place les écarteurs et enduire de vaseline la surface labiale exposée.
4. Fixer fermement un embout de mélange à la seringue Pola Rapid et insérer le piston. Verser une petite quantité de gel sur une plaque de mélange jusqu'à ce qu'un gel bleu uniforme soit extrudé..
5. En se laissant guider par l'embout, appliquer directement une fine couche de gel sur toutes les dents à traiter. Une couche fine permettra d'éviter que le gel ne coule. REMARQUE : il est préférable d'éviter de soulever l'embout lors du passage d'une dent à une autre. Assurer un mouvement continu.
6. Laisser reposer le gel 15 minutes (facultatif : une lampe à polymériser peut être utilisée à ce stade, Radii Xpert ou Radii Plus (SDI Limited)).
7. Aspirer le gel à l'aide de la canule d'aspiration chirurgicale. Remarque : il est normal qu'une couche résiduelle de gel reste à la surface des dents.
8. Effectuer les étapes 5-7 trois fois (éventuellement 4 fois).
9. Après la dernière application, retirer tout le gel à l'aide de l'aspiration, puis rincer et aspirer de nouveau.
10. Enregistrer la teinte finale.

*Le guide de teintes Vita est une marque déposée de VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Allemagne.

POLA
DAY

POLA
NIGHT

À DOMICILE

Libération de Fluor

Pola Day et Pola Night contiennent du fluor, qui aide à renforcer la dent pour la protéger contre les sensibilités.

Sûr et pratique

La formulation unique de Pola Day et Pola Night à haute teneur en eau et à pH neutre pour une protection optimale des dents et des gencives durant le traitement.

Un éclaircissement efficace

L'effet d'éclaircissement souhaité peut être obtenu en 30 minutes ou par une application la nuit pendant le sommeil. Il existe différents points forts du Pola Day et du Pola Night que les patients peuvent utiliser à la maison - utilisez le sélecteur pola pour choisir le produit qui convient le mieux à votre patient (disponible sur www.polawhite.com.au).

Quelle est la différence entre Pola day et Pola Night?

Pola Day consiste en une gamme de gels à base de peroxyde d'hydrogène spécialement conçus pour les patients qui souhaitent un résultat en un temps limité.

Pola Night est une gamme de gels à base de peroxyde de carbamide qui permet un résultat optimum pour les patients ayant des sensibilités.

Les deux gammes sont disponibles dans différentes concentrations dont les plus faibles sont spécialement indiqués en cas de sensibilités dentaires.



GUIDE AMBULATOIRE PAS À PAS

1. Mettre une petite goutte de gel dans chaque compartiment de la gouttière.
2. Placer la gouttière, avec le gel, sur les dents.
3. Essuyer l'excès de gel dans la bouche avec un tissu ou une brosse douce et sèche.
4. À la fin du traitement retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche avec de l'eau tiède.
5. Brosser les dents.



POLA LUMINATE



Pola Luminare est un système d'éclaircissement dentaire de type « vernis », aromatisé à la menthe et libérant du fluor. Vous pouvez appliquer pola luminare à tout moment en seulement quelques secondes. Emportez le partout avec vous! Pola Luminare est plus puissant que les produits disponibles dans les supermarchés ou les pharmacies, les résultats seront donc plus rapides! Pola Luminare est le produit idéal pour conserver votre nouveau sourire.

POLA FOR ALIGNERS



ALIGNER ET ÉCLAIRCIR EN UN SEUL GESTE

SDI présente le gel d'éclaircissement Pola For Aligners, idéalement formulé pour être utilisé avec les aligneurs orthodontiques. Pola For Aligners est disponible en kit ambulatoire facile à utiliser garantissant aux patients des sourires plus blancs et plus lumineux sans qu'ils aient à porter leurs aligneurs plus longtemps.

Pola For Aligners procure les mêmes bénéfices que la formule d'éclaircissement Pola.

- ✓ Le meilleur confort que puisse procurer un kit de blanchiment.
- ✓ Contient du nitrate de potassium et du fluorure qui aident à réduire la sensibilité pour une utilisation prolongée
- ✓ Gel à haute viscosité, ne coule pas et est facile à appliquer dans la gouttière.

Disponible en kit de 4 seringues - pratique à transporter et appliquer de jour comme de nuit

- ✓ Le système Pola For Aligners est disponible en gel Pola Night à 10% de peroxyde de carbamide, soigneusement choisi pour être l'agent d'éclaircissement dentaire idéal à utiliser avec tous les systèmes de gouttières d'alignement. Il permet aux patients de l'utiliser selon leurs besoins.
- ✓ Selon la recherche clinique, le peroxyde de carbamide est le produit de référence en matière d'éclaircissement dentaire, offrant des résultats optimaux tout en assurant le confort et la sécurité des patients.*

*Source: Efficacy of Pola Night on tooth whitening, 24 months post treatment on Japanese 2006 - Tsubura Shuich

CAS CLINIQUE



Dr Linda Greenwall
BDS MGDS RCS MSc MRD RCS
FGDP FICD BEM Spécialiste
en dentisterie prothétique et
restauratrice Angleterre



AVANT



APRÈS

Pola Night 10% PC pour les aligneurs

Pola Night 10% PC pour les aligneurs a été utilisé pendant 6 semaines avec des gouttières d'alignement orthodontique.

POLA LIGHT

UN NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE A LED

UN SOURIRE PLUS ÉCLATANT ET PLUS CONFIAIT EN 5 JOURS SEULEMENT.

Pola Light est un système avancé d'éclaircissement ambulatoire des dents qui combine la formule d'éclaircissement déjà primée de Pola à une gouttière à LED pour un éclaircissement ambulatoire plus rapide.

- Le système Pola Light et le gel Pola Day se combinent parfaitement.
- Grâce à son action rapide, les dents sont plus blanches en 5 jours seulement.
- Une formule qui permet d'éliminer en toute sécurité les tâches présentes depuis longtemps.
- Entièrement rechargeable pour vos futurs traitements d'éclaircissement
- Reminéralisation pour renforcer vos dents
- Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité.



EN 20 MINUTES
PAR JOUR
SEULEMENT

2 x 10 ou 2 x 15 minutes de
traitement quotidien.



FACILE À
UTILISER

Portatif, rechargeable et facile à utiliser. Gouttière sans fil.
La gouttière Pola LED se constitue d'une double arcade
et est de taille universelle.



DES DENTS PLUS
BLANCHES EN
CINQ JOURS

Durée du traitement 5 jours.
Pas de temps au fauteuil ou
de gouttières à fabriquer, une
économie de temps aussi bien
pour le patient que le dentiste.




SYSTÈME
PROFESSIONNEL
D'ÉCLAIRCISSEMENT
DENTAIRE, UTILISÉ ET
RECOMMANDÉ

Pola est un système professionnel d'éclaircissement des dents, fiable et recommandé par les dentistes pour un sourire plus confiant et plus éclatant en un temps record. Les gels d'éclaircissement des dents à pH neutre et à haute viscosité garantissent un plus grand confort au patient pour un usage à domicile. Son mélange unique d'agents apaisants, de conditionneurs et une haute teneur en eau contribue à réduire la sensibilité.

CONDITIONNEMENT POLA LIGHT

- 1 x gouttière à LED Pola
- 4 x seringues Pola Day de 3g à 6 % de peroxyde d'hydrogène
- 1 x un câble USB
- 1 x mode d'emploi

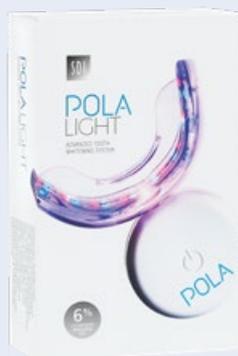



PLUS BLANC
PLUS LUMINEUX
TOI

FAQ

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la cause d'une décoloration des dents ?

Les dents de chaque individu sont uniques, raison pour laquelle elles se décolorent et se tachent de diverses manières. La décoloration ou la coloration des dents d'une personne est généralement causée par le café, le thé noir, la tisane, le vin rouge, des aliments épicés tels que le curry ou la cigarette.

Comment fonctionne le blanchiment des dents ?

Lorsqu'un produit de blanchiment est appliqué sur les dents, il se décompose en eau et en ions d'oxygène. Les ions d'oxygène pénètrent l'émail et attaquent les longues molécules responsables des taches pour les décomposer efficacement afin de les raccourcir et de les rendre incolores. Ces molécules courtes et incolores disparaissent ensuite naturellement des dents grâce à la salive. L'intensité du blanchiment dépend du nombre d'ions disponibles et de la durée de leur présence sur la dent.



Combien de temps cela prend-t-il de blanchir les dents d'un patient ?

Avec un blanchiment en cabinet dentaire, on obtient des résultats en seulement 30 minutes de traitement. En recourant à un système de blanchiment à domicile, la durée du traitement varie entre 5 et 14 jours.

Combien de temps durera le traitement de blanchiment ?

Cela dépend d'une personne à l'autre et des habitudes bucco-dentaires de chacun. Le blanchiment doit être répété tous les 6 à 12 mois pour les traitements en cabinet et à domicile. En l'absence de retouches, les dents de vos patients recommenceront à se tacher pour la même raison que celle qui a causé leur décoloration à l'origine.

Si le patient a subi des restaurations ou dispose de facettes, leur couleur sera-t-elle altérée ?

Le blanchiment enlèvera toute tache existante sur les restaurations, mais n'affectera pas la teinte d'origine.

Existe-t-il des effets secondaires ?

En suivant les instructions d'utilisation fournies avec les produits pola, la plupart des patients ne rencontrent pas d'effets secondaires. Toutefois, certains souffriront d'une sensibilité temporaire (aigüe ou sourde, au chaud ou au froid). Cette sensibilité s'estompera quelques heures après l'arrêt du traitement et n'entraînera aucun problème résiduel. Il est possible de raccourcir ou d'espacer dans le temps les durées d'application, ou de traiter les dents à l'aide d'un agent de désensibilisation (soothe). Il est recommandé au patient de ne pas consommer de boissons gazeuses, d'agrumes et de boissons à base d'agrumes pour éviter la sensibilité.

Le blanchiment des dents est-il sans risque pour la femme enceinte ?

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits de blanchiment des dents durant la grossesse.

CAS CLINIQUE



Docteur Jean-Pierre ATTAL

Directeur de l'Unité de Recherches
Biomatériaux Innovations et Interfaces
(URB2i - EA 4462)

MCU à la Faculté de Chirurgie Dentaire
PH à l'hôpital Charles Foix (Ivry/Seine)

Président de la société francophone de
Biomatériaux Dentaires (SFBD)

Pola Night 10%

Cette jeune fille de 18 ans se plaint des taches sur ses dents (31 et 32), visualisables surtout sur la photo à l'échelle dento-gingivale. On peut noter aussi une opacité blanche au niveau du bord libre de 12 et une toute petite marque blanche au niveau de l'angle disto-cronaire de 11.

L'éclaircissement ambulatoire externe est un excellent traitement préliminaire au traitement des taches par érosion infiltration car il permet de rendre plus lumineuses les lésions colorées et de diminuer le contraste entre les dents et les lésions blanches. Les taches étant ainsi assez bien masquées, bien souvent aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire.

Après 1 mois de traitement au polanight avec un port de 3 heures par jour des gouttières, les dents sont devenues très lumineuses. Les opacités sur 12 et 11 sont masquées partiellement mais les taches sur 31 et 32 persistent. Cela ne pose pas vraiment de problème à la patiente maintenant qu'elle a un si joli sourire. Elle n'a pas souhaité recourir au traitement par érosion infiltration.



Dr Morgane COHEN

Diplômée en 2013

DU Esthétique buccale en 2015 - Nice

Spécialiste en Esthétique

Pratique en Clinique Esthétique - Paris

Pola Night 10%



Pola Night 16%



POLA AU CABINET

Pola Rapid 3 patient kit



3 seringues de Pola Rapid de 2,8 ml
Accessoires
7700511 (6% HP)

Pola Rapid 1 patient kit



1 seringue de Pola Rapid de 2,8 ml
Accessoires
7700510 (6% HP)

Pola Professional 37.5% Kit 3 Patients



3 seringues de Pola Professional de 2,8 ml
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
7700469 (37.5% HP)

Pola Professional 37.5% 1 Patient Kit



1 seringue de Pola Professional de 2,8 ml
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
7700468 (37.5% HP)

Pola Professional 35% Kit 3 Patients



6 flacons de poudre dentaire
Pola Professional de 0.3g
6 seringues de pola professional de 2 ml
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
7700259 (35% HP)

Pola Professional 35% 1 Patient Kit



2 flacons de poudre dentaire
Pola Professional de 0.3g
2 seringues de Super Etch de 2 ml
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
7700258 (35% HP)

POLA À DOMICILE

Pola Day and Pola Night Kit de 10 seringues de 1,3 g

Pola Day
7700359 (6% HP)

Pola Night
7700371 (10% CP)
7700377 (16% CP)



Pola Day and Pola Night Kit de 4 seringues de 1,3 g

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)
7700375 (16% CP)



Soothe

8150002
4 seringues de 1,2 ml

8150033
50 seringues de 1,2 ml



Pola Light

7700985 (6% HP)



Spacer Resin 2 seringues d'espacement

7700012
2 seringues de 1g de Résine d'espacement

Pochettes pola Ziplock: 10 unités

7700999
10 pochettes Ziplock

Pola For Aligners

7700556 (10% CP)
4 x 3g seringues



Plaques Thermoformables

7750005
Recharge de 20 pièces

Boîtiers 5 unités

7750008
5 étuis de gouttières

POLA EN DÉPLACEMENT

Pola Luminare

7700092
1 tube de 5,5 ml de Pola Luminare



MATÉRIEL DE MARKETING GRATUIT

OUTILS MARKETING POUR LA PROMOTION DU BLANCHIMENT DENTAIRE AUPRÈS DES PATIENTS.



AFFICHE POLADAY
Code article M100317



AFFICHE POLANIGHT
Code article M100318



POLA LIGHT PATIENT HANDOUT
Code article M100528



POLA LIGHT DENTIST HANDOUT
Code article M100544



DISTRIBUTEUR POLA DE
BROCHURES PATIENT
Code article M100290



BROCHURES PATIENT POLA
Code article M100314



AFFICHAGE POLA AVANT ET APRÈS
Code article M100316



ÉLÉMENT DE PLAFOND POLA
Code article M100293



POLA CARTE DE RENDEZ-VOUS
Code article M100313



AUTOCOLLANT DE FENÊTRE POLA
Code article M100289



POLA SAC
Code article M100143



POLA SALLE D'ATTENTE USB VIDEO
Code article M100245



PLV PERSONNALISÉE
Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via téléchargement sur:
www.sdi.com.au

SDI LIMITED EST TOTALEMENT
DÉDIÉE DANS LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT, LA
PRODUCTION ET LE MARKETING
DE PRODUITS SPÉCIALISÉS
POUR LE DENTAIRE.

LES PRODUITS PROPOSÉS PAR
SDI SONT UNE COMBINAISON
D'INNOVATION ET
D'EXCELLENCE POUR
PROPOSER DES MATÉRIAUX DE
RESTAURATION IDÉAL POUR LES
DENTISTES.



FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1 800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRESIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
IRLANDE 00 353 (83) 806 0228
ITALIE 00800 0225 5734
ESPAGNE 00800 0225 5734
ANGLETERRE 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
@pola_smile



FACEBOOK
polasmiletoothwhitening

Our plus d'informations consultez :
polawhite.com.au

