

P O L A



Pola – Sistema
professionale per
il ripristino del
colore dei denti



Composito



Attrezzatura



SDI

P
O
L
A

Parla con il tuo paziente del programma di sbiancamento più adatto a lui.



Trattamento domiciliare

Pola Day

Perossido di Idrogeno al 6%	Applicare 30 minuti una volta al giorno
-----------------------------	---

Pola Night

Nota: 1% di perossido di idrogeno corrisponde approssimativamente al 2.7% di perossido di carbamide.

Perossido di Carbamide al 10%	Applicare da 2 ore a tutta la notte
-------------------------------	-------------------------------------

Perossido di Carbamide al 16%	Applicare da 90 minuti a tutta la notte
-------------------------------	---

Pola For Aligners

Perossido di Carbamide al 10%	Applicare da 2 ore a tutta la notte nell'allineatore ortodontico
-------------------------------	--

Pola Light

Perossido di Idrogeno al 6%	2 trattamenti al giorno da 10 o 15 minuti
-----------------------------	---

Trattamento da viaggio

Pola Luminate

Perossido di Idrogeno al 6%	Applicare 30 minuti due volte al giorno
-----------------------------	---



A close-up portrait of a woman with long, wavy blonde hair and light blue eyes. She is wearing a dark blue, long-sleeved dress with a fine, sparkling texture. Her jewelry includes large, ornate diamond earrings with multiple facets and a matching diamond bracelet on her left wrist. She is resting her chin on her left hand, looking directly at the camera with a slight smile. The background is a solid, deep blue.

Trattamento

Domiciliare



Pola Day

Pola Night





Un prodotto cosmetico registrato

Pola Day 6%, Pola Night 10% e 16% sono conformi alle modifiche apportate dal Consiglio dell'Unione Europea alla Direttiva 76/768/CEE, concernente i prodotti cosmetici.

Agenti lenitivi e attenuanti naturali

La presenza di speciali additivi minimizza la formazione di placca e aumenta la remineralizzazione per ridurre ulteriormente la sensibilità.

Elevato contenuto in acqua

L'elevato contenuto in acqua del gel riduce la disidratazione dello smalto e riduce la sensibilità del paziente.

Addensante ad elevato peso molecolare

Ciò riduce la sensazione appiccicosa e l'effetto dissecante del gel, riducendo ulteriormente la sensibilità.

Elevata viscosità

L'elevata viscosità del gel ne facilita l'applicazione sulla mascherina e la ritenzione durante l'intera operazione.

Gusto

Il piacevole gusto alla menta del gel è fresco e di lunga durata.

Rilascio di fluoro

La presenza di fluoro remineralizza la superficie dentale contribuendo a ridurre la sensibilità post-operatoria.

Contiene un agente desensibilizzante

I gel Pola Day e Pola Night contengono un agente desensibilizzante che agisce sulle terminazioni nervose riducendone la sensibilità a livello della giunzione tra polpa e dentina, minimizzando la sensibilità e massimizzando il comfort del paziente.

pH neutro

Il pH neutro di Pola Day e Pola Night garantisce il completo rilascio di perossido senza compromettere il comfort del paziente.



Scansiona il codice QR per istruzioni dettagliate.

Pola For Aligners

Allineare e sbiancare contemporaneamente

Presentiamo il gel sbiancante per
allineatori Pola, perfettamente formulato
per l'uso con allineatori ortodontici.

Pola For Aligners può essere facilmente utilizzato come kit domiciliare, garantendo al paziente un'ottima esperienza nonché sorrisi più bianchi e brillanti senza un tempo di applicazione aggiuntivo.

Pola For Aligners offre gli stessi benefici della pluripremiata formula sbiancante Pola

- Il massimo comfort per il paziente in un kit di sbiancamento
- Contiene nitrato di potassio e fluoro per ridurre la sensibilità nell'uso a lungo termine
- Il gel ad alta viscosità ne garantisce un facile e saldo posizionamento nell'allineatore.

Disponibile in un pratico kit di 4 siringhe per uso domiciliare, di giorno o di notte

- Il sistema Pola For Aligners è disponibile nel gel al perossido di carbamide al 10% Pola Night, accuratamente selezionato come agente sbiancante ideale per adattarsi a qualsiasi sistema di allineatori. Permette ai pazienti di personalizzarne l'uso tra i pasti per un minimo di un paio d'ore al giorno fino al pratico utilizzo notturno.
- La ricerca clinica ha individuato nel perossido di carbamide al 10% la soluzione ideale per lo sbiancamento dei denti, poiché fornisce risultati di sbiancamento ottimali pur mantenendo la massima sicurezza e comfort per il paziente.*



SICURO PER L'UTILIZZO NOTTURNO



FACILE DA USARE



A RILASCIO DI FLUORO



UTILIZZATO E RACCOMANDATO DAI PROFESSIONISTI



Pola Light

Un nuovo sistema avanzato di sbiancamento dentale con tecnologia a led da usare in casa

Per un sorriso più brillante e smagliante in soli 5 giorni.

Pola Light è un sistema avanzato di sbiancamento che combina la formula sbiancante pluripremiata di Pola a una mascherina LED, per un trattamento sbiancante ancora più veloce.

- Sistema Pola Light combinato con gel Pola Day
- Azione rapida per denti più bianchi in soli 5 giorni
- Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie di lunga data
- Ricaricabile per ripetere il trattamento
- Remineralizzazione per rinforzare i denti
- Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità



Scansiona il codice QR per istruzioni dettagliate.



A PARTIRE DA SOLI 20 MINUTI AL GIORNO

2 trattamenti da 10 o 15 minuti al giorno.



FACILE DA USARE

Portatile, ricaricabile e facile da indossare poiché privo di cavi.

La mascherina Pola LED è composta da due arcate, e la sua misura è universale.



DENTI PIÙ BIANCHI IN SOLI CINQUE GIORNI

Durata del trattamento 5 giorni.

Non richiede l'utilizzo della poltrona o della mascherina professionale, facendo risparmiare tempo ai medici e ai pazienti.



UTILIZZATO E RACCOMANDATO DAI PROFESSIONISTI

Pola è un sistema di sbiancamento professionale, affidabile e raccomandato dai dentisti, per ottenere denti più bianchi in maniera rapida e sicura.

L'elevata viscosità e il pH neutro dei gel sbiancanti garantiscono al paziente il massimo comfort durante l'utilizzo del kit.

La miscela unica di lenitivi, condizionatori e alto contenuto di acqua aiuta a ridurre la sensibilità dei denti.



Pola Luminare



Con il perossido di idrogeno al 6%, Pola Luminare è il più potente sbiancante disponibile in questo formato. Si applica direttamente sui denti senza bisogno di mascherine. Progettato per essere utilizzato per soli 30 minuti, due volte al giorno, Pola Luminare è lo strumento di ritocco ideale per mantenere il tuo sorriso bianco e luminoso tra una visita odontoiatrica e l'altra. Con oltre 60 applicazioni in un tubo e il suo aroma di menta che dura a lungo, puoi sbiancare i tuoi denti sempre e ovunque. Questo prodotto sbiancante per i denti è conforme al Consiglio dell'Unione Europea che modifica la direttiva 76/768 / CEE.



POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

POLA LIGHT
ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM



POLA RAPID

SDI

P
O
L
A

LA RAPID
TOOTH WHITENING SYSTEM

SDI

P
O
L
A

POLA DAY
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

SDI





CASI CLINICI



Dr Vijay Vadher
UK

Pola Night 16%




Dr Linda Greenwall
UK

Pola Night 10% CP for Aligners



Dr. David Carralero Plaza
Spain

Pola Day 6%

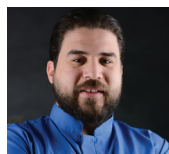

**Dr. Mohamed
Abdulmonem Abdulsalam**
Egypt

Pola Light 6%




F A Q

Qual è la causa della pigmentazione dei denti?

I denti di ognuno di noi sono unici e si pigmentano e si macchiano in modi diversi. La pigmentazione o le discromie sono normalmente causati da caffè, tè, tè alle erbe, vino rosso, e tabacco.

Come funziona lo sbiancamento dei denti?

Quando applicato sul dente, il prodotto sbiancante si scompone in ioni di acqua e ossigeno. Gli ioni di ossigeno penetrano nello smalto e attaccano le grosse molecole discromiche in modo da scomporle e renderle più piccole e incolori. Queste piccole molecole incolori vengono poi rimosse naturalmente dai denti tramite la saliva. L'intensità dell'azione sbiancante è data dal numero di ioni disponibili e dal tempo che permangono sul dente.

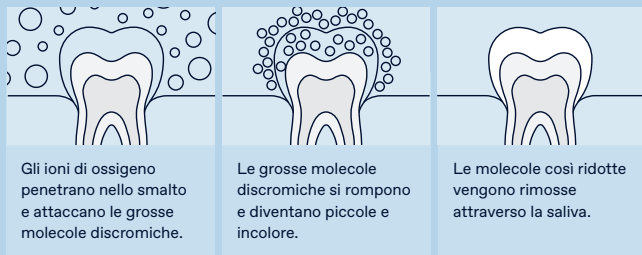

Quanto tempo è necessario per sbiancare i denti di un paziente?

Nel caso dello sbiancamento effettuato ambulatorialmente si ottengono risultati in meno di 30 minuti di trattamento. Nel caso di un sistema di sbiancamento domiciliare sono necessari 5-14 giorni.

Quanto durano gli effetti di un trattamento sbiancante?

Dipende da ciascuna persona e dalle sue abitudini di igiene orale. Lo sbiancamento deve essere ripetuto ogni 6-12 mesi sia nel caso del trattamento in ambulatorio che domiciliare. Senza il ritocco, i denti cominceranno a macchiarsi nuovamente a causa degli stessi fattori che hanno provocato la discromia iniziale.

Cosa succede in caso di presenza di restauri o faccette? Cambieranno colore?

L'azione sbiancante eliminerà le macchie esistenti sui restauri ma non influirà sulla tonalità originale.

Ci sono effetti collaterali?

La maggior parte dei pazienti che segue le indicazioni del dentista e le istruzioni per l'uso fornite con i prodotti Pola non manifesterà effetti collaterali. Tuttavia, alcuni pazienti potrebbero avvertire una sensibilità temporanea (sensibilità sorda o acuta al caldo o al freddo). Si tratta di un fenomeno che diminuisce dopo alcune ore dall'interruzione del trattamento e non lascia alcun problema residuo. È possibile ridurre i tempi o la frequenza delle applicazioni o trattare i denti con un agente desensibilizzante, lenitivo. È opportuno astenersi da bibite gassate e da cibi e bevande a base di agrumi per evitare fenomeni di sensibilità.

Lo sbiancamento dentale è sicuro durante la gravidanza?

Non si raccomanda l'uso di prodotti per lo sbiancamento dentale in gravidanza.

Pola domiciliare

Nota: ogni confezione include gli accessori
CP: Perossido di Carbamide HP: Perossido di Idrogeno

POLA DAY	
Pola Day Mini Kit 4 siringhe da 1,3g (6% HP)	7700361
Pola Day Kit 10 siringhe da 1,3g (6% HP)	7700359
Pola Day 50 siringhe da 1,3g Bulk Kit (6% HP)	7700361
Dispenser da 50 siringhe da 3g (6% HP)	7700079

POLA FOR ALIGNERS	
Pola For Aligners (10% CP) 4 siringhe x 3g	7700556

POLA LIGHT	
Pola Light (6% HP) 4 siringhe Pola day da 3g	7700985

POLA LIGHT DISPLAY STAND	
1 x Stand	7700979

POLA NIGHT	
Pola Night Mini Kit 4 siringhe da 1,3g (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night Kit 10 siringhe da 1,3g (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377
Pola Night 50 siringhe da 1,3g Bulk Kit (10% CP) (16% CP)	7700373 7700379
Dispenser da 50 siringhe da 3g (16% CP)	7700085

CUSTODIE PER MASCHERINE	
Tray Cases 5 Pack 5 astucci per mascherine per sbiancamento	7750008

MATERIALE MASCHERINA	
Ricarica da 20 pezzi	7750005

SPACER RESIN	
2 Siringhe da 1g Resin Syringes	7700012

DIGA LIQUIDA	
2 Siringhe di Barriera Gengivale da 1g Accessori	7750006

Pola Da Viaggio

POLA LUMINATE	
Pola Luminate 1 x 5.5mL	7700092

Materiale pubblicitario gratuito

per l'informazione del paziente



Manifesto Pola Day
Reorder M110134




Manifesto Pola Night
Reorder M110135



Brochure da tavolo Pola Prima e Dopo
Reorder M110137



Pola Busta
Reorder M100332

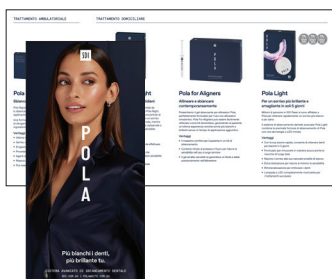

Brochure per Pazienti Pola
Reorder M110175



Brochure per Pazienti Pola Light
Reorder M110139



Pola Busta
Reorder M100331



Pola supporto usb con video per la sala d'attesa
Reorder M100245



Materiale pubblicitario personalizzabile
Ulteriore materiale pubblicitario personalizzabile è disponibile tramite download.
www.sdi.com.au/it/marketing-materials/

DISPOSITIVI MEDICI

**SISTEMA PROFESSIONALE
PER IL RIPRISTINO DEL
COLORE DEI DENTI**

Pola Office+

Pola Office+ è indicato per il ripristino, per motivi medici, del colore dei denti discromici che non possono essere trattati in modo efficace con i sistemi domiciliare esistenti.

Include un pennellino applicatore per consentire un'applicazione semplice e precisa



Pola Office+ è la soluzione consigliata quando la discromia dentale compromette la qualità di vita correlata alla salute del paziente.

Offre un'alternativa meno invasiva rispetto a otturazioni, corone o faccette, e dovrebbe essere considerato la prima scelta.

Durata minima della seduta necessaria

Il trattamento richiede al massimo 32 minuti (4 cicli da 8 minuti), a seconda del grado e della natura della discromia del singolo paziente.

Nessuna lampada necessaria

Pola Office+ può essere utilizzato con² o senza lampada, poiché non richiede attivazione esterna.

²External bleaching therapy with activation by heat, light or laser—A systematic review. Wolfgang Buchalla, Thomas Attin. Dental Materials 23 (2007) 586–596

Contiene nitrato di potassio

Non richiede un desensibilizzante separato. Pola Office+ presenta proprietà desensibilizzanti integrate. Il nitrato di potassio, ingrediente¹ chiave nella riduzione della sensibilità¹, penetra nelle terminazioni nervose bloccando la trasmissione degli impulsi dolorifici.


Sistema di erogazione semplice

Non è richiesta alcuna miscelazione. La siringa a doppia camera miscela automaticamente il gel durante l'erogazione, applicandolo direttamente sulla superficie del dente. Ciò garantisce una miscela omogenea attivata al momento dell'uso, massimizzando l'efficacia del trattamento. La punta fine permette un'applicazione agevole, anche nelle aree difficili da raggiungere.

Basta uno strato sottile

È sufficiente uno strato sottile di gel. Utilizzare la punta per stenderlo in modo uniforme su tutte le superfici visibili del dente.

TEMPO DI TRATTAMENTO STIMATO[‡]

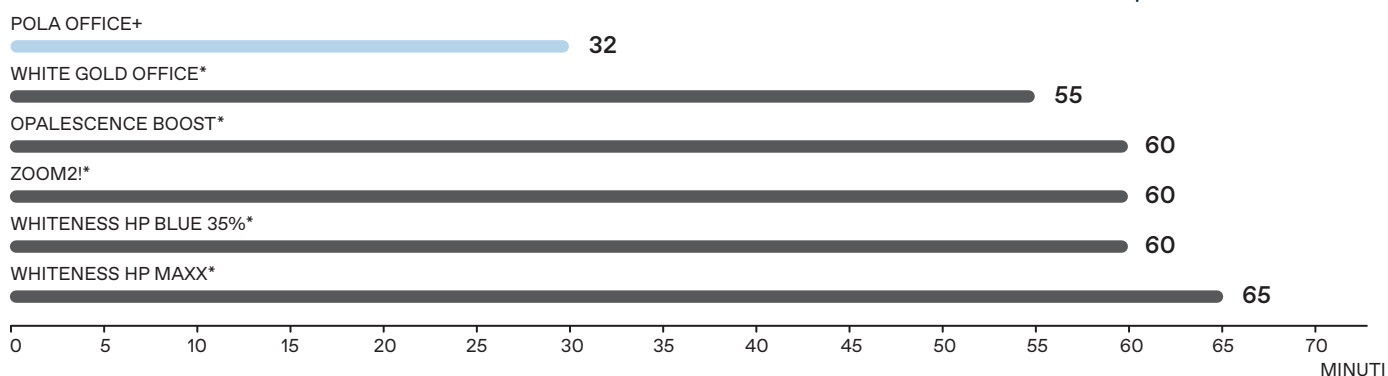

¹Wang et Al. Journal of Dentistry, Volume 43, Issue 8, August 2015, Pages 913-923

[‡] Dati pubblicati e prove interne SDI.

* Non sono marchi registrati di SDI Limited.

CASI CLINICI SU DENTI DISCROMICI DA TETRACICLINE CON POLA OFFICE+.



José Amengual Lorenzo
Professore associato –
Università di Valencia, Spagna



Marta Peydro Herrero
Ex professoressa associata –
Università di Valencia, Spagna



Ana Roig Vanaclocha
Professoressa associata –
Università di Valencia, Spagna



Rubén Agustín Panadero
Professore associato – Università
di Valencia, Spagna



Pola – Sistema di ripristino del colore dentale

POLA OFFICE+

Pola Office+ 37,5% Kit 1 siringa 1 siringa da 2,8 mL di Pola Office+	7700464
Pola Office+ 37,5% Kit 3 siringhe 3 siringhe da 2,8 mL di Pola Office+	7700461


SUPPORTO PER SBIANCAMENTO POLA

1 supporto	
1 supporto per SDI Radii Plus	
1 supporto per SDI Radii Xpert	
Accessori	7700989

Luna 2 – Composito universale



Luna 2 è la nuova generazione del composito universale Luna. Luna 2 ha una miscela di filler ottimizzata, studiata e sviluppata da SDI, che garantisce una manipolazione migliorata, un'elevatissima radiopacità e proprietà meccaniche affidabili. Luna 2 non contiene BPA, ideale per i pazienti più attenti alla salute.

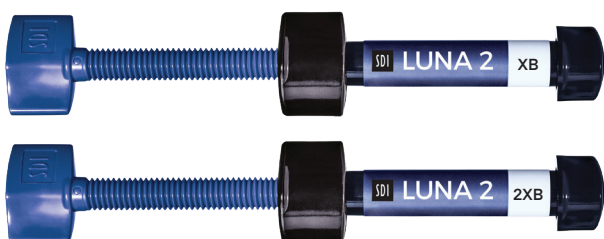

TONALITÀ DI SBIANCAMENTO

SIRINGA LUNA 2 – RICARICHE DA 4 G

Tonalità XB (equivalente a Vita® OM2)	8452021
Tonalità 2XB (equivalente a Vita® OM1)	8452022

LUNA 2 COMPLET – RICARICHE (0,25 g x 20; totale 5 g)

Tonalità: XB (equivalente a OM2 Vita®)	8452071
Tonalità: 2XB (equivalente a OM1 Vita®)	8452072

Radii Xpert Multionda

- Punta multionda a spettro ampio
- Fascio perfettamente collimato
- Tecnologia intelligente per un utilizzo intuitivo
- Impugnatura ergonomica e bilanciata
- Intensità luminosa costante



RADII XPERT LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE A LED

Radii Xpert Lampada fotopolimerizzante a LED	5600312
– 1 accessorio LED multionda	
– 1 manipolo Radii Xpert	
– 1 caricatore	
– 1 confezione di spine multi-regione	
– 5 piccoli schermi di protezione dalla luce	
– 1 grande schermo di protezione dalla luce	
– 3 cappucci lente di ricambio	
– 100 guaine protettive	

SUPPORTO PER LO SBIANCAMENTO POLA

- Design semplice
- Ampia gamma di movimenti e regolazioni
- Versatile
- Dotato di ruote
- Leggero, senza fili e compatto



SUPPORTO PER LO SBIANCAMENTO POLA

1 supporto	7700989
1 supporto per SDI Radii Plus	
1 supporto per SDI Radii Xpert	
Accessori	



Scansiona il QR
Code per istruzioni
dettagliate.

SDI

SDI è impegnata da anni nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di materiale per odontoiatria conservativa. I prodotti SDI, unendo innovazione e alta qualità, sono i materiali per restauri dentali ideali.

MADE IN AUSTRALIA

by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 022 55 734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM
[@pola_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Per maggiori informazioni visita il sito

polawhite.com.au



11-2025

M110202 A