



CREATED BY SDI

**POLA**

ADVANCED TOOTH  
WHITENING SYSTEM

IL CATALOGO  
PER IL  
VOSTRO  
SORRISO





PARLATE CON  
IL VOSTRO  
PAZIENTE DELLA  
SOLUZIONE DI  
SBIANCAMENTO  
DENTALE PIÙ  
INDICATA

# TRATTAMENTO AMBULATORIALE

Pola Rapid	Perossido di Idrogeno al 6%	Applicare per 15 minuti tre volte
Pola Office+	Perossido di Idrogeno al 37.5%	Applicare per 8 minuti tre volte
Pola Office	Perossido di Idrogeno al 35%	Applicare per 8 minuti tre volte



# TRATTAMENTO DOMICILIARE

## Pola Day

Perossido di Idrogeno al 6%      Applicare 30 minuti una volta al giorno



## Pola Night

Nota: 1% di perossido di idrogeno corrisponde approssimativamente al 2.7% di perossido di carbamide.

Perossido di Carbamide al 10%      Applicare da 2 ore a tutta la notte

Perossido di Carbamide al 16%      Applicare da 90 minuti a tutta la notte



## Pola Light

Perossido di Idrogeno al 6%      2 trattamenti al giorno da 10 o 15 minuti



## Pola for Aligners

Perossido di Carbamide al 10%      Applicare da 2 ore a tutta la notte nell'allineatore ortodontico



# TRATTAMENTO DA VIAGGIO

## Pola Luminate

Perossido di Idrogeno al 6%      Applicare 30 minuti due volte al giorno



# DESENSIBILIZZANTE

## Soothe

Un gel desensibilizzante al nitrato di potassio con rilascio di fluoro.



# POLA OFFICE

## SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE PROFESSIONALE.



Pola office utilizza una formula al 35% di perossido di idrogeno per dare a te e ai tuoi pazienti risultati veloci ed efficaci senza utilizzare troppo tempo alla poltrona.

### **Procedura rapida**

Il trattamento Pola Office richiede circa 30 minuti. La minore durata della seduta significa maggiore comfort e soddisfazione del paziente, maggiore produttività e redditività



### **Agente desensibilizzante incorporato**

Pola Office contiene nitrato di potassio, un noto agente desensibilizzante. Agisce sulle terminazioni nervose bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi sensibili e producendo un effetto antalgico.

### **Non è necessaria alcuna lampada**

Pola Office può essere utilizzato con o senza lampada; ovviamente utilizzare una lampada per sbiancamento o una lampada fotopolimerizzante (Ratii Plus o Ratii Xpert) permette di accelerare il processo e di aumentare la soddisfazione dei vostri pazienti.

### **Barriera gengivale flessibile**

La barriera gengivale flessibile di Pola Office consente una rimozione rapida e pulita.

## POLA OFFICE ISTRUZIONI

1. Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega di utilizzare una scala colori Vita\* disposta in base al grado di brillantezza..
2. Pulire i denti con acqua e pomice.
3. Posizionare l'apribocca e coprire la superficie esposta delle labbra con vaselina.
4. Asciugare i denti e applicare la barriera gengivale; fotopolimerizzare con movimenti rotatori.
5. Aprire il contenitore della polvere. Prendere una siringa di Pola Office, applicare saldamente un puntale e tirare indietro lo stantuffo con cautela per rilasciare a pressione.
6. Estrudere il contenuto della siringa con cautela nel contenitore.
7. Miscelare immediatamente utilizzando uno spazzolino applicatore, fino ad ottenere un gel omogeneo.
8. Applicare uno strato spesso di gel direttamente su tutti i denti da trattare..
9. Lasciare agire il gel per 8 minuti. Opzionale: è possibile utilizzare una lampada fotopolimerizzante Ratii Plus o Ratii Xpert con apposito puntale, seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
10. Aspirare il gel mediante un aspirasaliva.
11. Ripetere le fasi 8-10 per tre volte (una quarta volta è facoltativa). Nota: un contenitore dovrebbe essere utilizzato solo per 2 applicazioni o entro 20 minuti dalla miscelazione.
12. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.
13. Rimuovere la barriera gengivale.

\*La scala colori Vita è un marchio di VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Germania

# POLA OFFICE+

## Minima durata della seduta

Il trattamento completo richiede meno di 30 minuti. La minore durata della seduta significa maggiore comfort e soddisfazione del paziente, maggiore produttività e redditività. L'esclusiva formula al 37,5% di perossido di idrogeno assicura un rapido rilascio degli ioni di perossido responsabili del processo di sbiancamento.

## Non è necessaria alcuna lampada

Pola Office + può essere utilizzato con o senza lampada; ovviamente utilizzare una lampada per sbiancamento o una lampada fotopolimerizzante (Radii Plus o Radii Xpert) permette di accelerare il processo e di aumentare la soddisfazione dei vostri pazienti.

## Massimo comfort

Il pH neutro di Pola Office+ assicura il massimo comfort durante e dopo il trattamento. I tempi ridotti di trattamento assicurano maggior comfort e significativa diminuzione della sensibilità.

## Agente desensibilizzante incorporato

Pola Office+ contiene un esclusivo agente desensibilizzante che inibisce la sensibilità post-operatoria. Il nitrato di potassio, l'agente chiave per la riduzione del dolore, penetra nelle terminazioni nervose e blocca la trasmissione degli impulsi nervosi sensibili, determinando un effetto analgesico.

## Facile da applicare

Non è necessaria alcuna miscelazione. La siringa a doppia camera fa sì che la miscelazione avvenga nel momento in cui il gel viene applicato direttamente sul dente. Questo garantisce una miscela uniforme di gel appena attivato. Il gel appena attivato massimizza l'effetto sbiancante. I

sottili puntali applicatori consentono una facile applicazione anche nei punti più difficili.

## Solo un sottile strato

Un sottile strato di gel è tutto ciò che serve. Utilizzare il puntale per distribuire il gel assicurandosi di coprire tutta la superficie del dente. Il gel dalla speciale formula viscosa consente una solida adesione alle superfici dentali, massimizzando l'effetto sbiancante.

CE  
0297



## POLA OFFICE+ 37.5% HP ISTRUZIONI

1. Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega di utilizzare una scala colori Vita\* disposta in base al grado di brillantezza.
2. Pulire i denti con acqua e pomice.
3. Posizionare l'apribocca e coprire la superficie esposta delle labbra con vaselina.
4. Asciugare i denti e applicare la barriera gengivale.
5. Fotopolimerizzare con movimento rotatorio per 10-20 secondi.
6. Applicare saldamente un puntale per miscelazione alla siringa Pola Office+, lontano dal paziente.
7. Dispensare una piccola quantità di gel su un blocchetto da impasto finché il gel estruso sarà azzurro uniforme.
8. Utilizzando il puntale come guida, applicare direttamente un sottile strato di gel con una leggera pressione dal margine gengivale al margine incisale assicurandosi che l'intero dente sia ricoperto. Applicare uno strato sottile di gel a tutti i denti sottoposti a trattamento.
9. Lasciare agire il gel per 8 minuti (Opzionale: in questa fase può essere utilizzata la lampada Radii Plus o Radii Xpert con apposito puntale per lo sbiancamento dell'arcata. Consultare le istruzioni fornite dal produttore della lampada).
10. Aspirare il gel mediante un aspirasaliva.
11. Ripetere le fasi 8-10 per tre volte (una quarta volta è facoltativa).
12. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.
13. Rimuovere la barriera gengivale, sollevandola da un'estremità.



# POLA RAPID



Pola Rapid è il nuovo trattamento ambulatoriale per lo sbiancamento dentale in sicurezza con un tempo di applicazione di 45 minuti.

Una formulazione unica con il 6% di perossido di idrogeno che rilascia immediatamente gli ingredienti attivi.

## Indicazioni:

1. Sbiancamento di denti vitali discromici.
2. Sbiancamento di denti non vitali discromici.

## Ottima maneggevolezza e rimozione veloce

L'elevata viscosità del gel Pola Rapid consente un'applicazione e una rimozione rapida grazie alle caratteristiche anti-aderenti della sua formulazione specifica. Pola Rapid può essere estruso rapidamente e in tutta semplicità, e rimane sul dente durante l'applicazione.

## Gel blu ottimizzato per un'applicazione più rapida

Pola Rapid utilizza un gel blu con tecnologia avanzata che facilita la visibilità e l'applicazione. Questo gel non appiccicoso e facile da applicare consente un'applicazione e una rimozione rapida.

## Erogazione semplice e applicazione precisa

Nessuna miscelazione necessaria. Il sistema con siringa a doppia camera miscela direttamente durante l'applicazione del gel sul dente. La punta applicatrice in dotazione aiuta a garantire un'applicazione più fluida e precisa.

## Procedura semplice

Nessun isolamento dei tessuti molli. Grazie alla semplice preparazione del dente e al rapido tempo di contatto per applicazione, riduce il tempo alla poltrona e migliora la produttività.

## Agenti desensibilizzanti integrati

Pola Rapid ha proprietà desensibilizzanti integrate uniche, che prevengono la sensibilità postoperatoria. Il nitrato di potassio, l'ingrediente chiave per la riduzione del dolore, previene la sensibilità così da offrire un effetto calmante. L'elevato contenuto d'acqua di Pola Rapid assicura il massimo comfort durante e dopo il trattamento.

## Rilascio di fluoro per rinforzare i denti

Pola Rapid contiene fluoro, che aiuta a rinforzare i denti e a proteggere dalla sensibilità.

## Può essere utilizzato con o senza lampada da sbiancamento

Pola Rapid può essere utilizzato con o senza lampada da sbiancamento, poiché non necessita di calore per attivarsi.

## POLA RAPID 6% ISTRUZIONI



Prima



Dopo

Immagine per gentile concessione Dr. G. Kölling, Germany

1. Determinare e annotare il colore pre-operatorio. Si prega di utilizzare una scala colori Vita\* disposta in base al grado di brillantezza.
2. Pulire i denti con acqua e pomice.
3. Posizionare l'apribocca e coprire la superficie esposta delle labbra con vaselina.
4. Fissare saldamente un erogatore di miscelazione alla siringa Pola Rapid lontano dal paziente, quindi inserire lo stantuffo. Erogare una piccola quantità di gel su un blocchetto per miscelazione fino a quando non viene estruso un gel blu uniforme.
5. Utilizzando il puntale come guida, applicare direttamente un sottile strato di gel su tutti i denti da trattare. Uno strato sottile di gel eviterà che il materiale scivoli via. NOTA: si consiglia di non sollevare il puntale della siringa passando da un dente al successivo, ma di applicare il gel con continuità.
6. Lasciare agire il gel per 15 minuti (facoltativo: in questa fase è possibile usare una lampada polimerizzante, Radii Xpert o Radii Plus (SDI Limited)).
7. Aspirare il gel mediante un aspirasaliva. Nota: è normale che uno strato residuale di gel rimanga sulla superficie dei denti.
8. Completare i passaggi da 5 a 7 per tre volte (facoltativamente per quattro volte).
9. Dopo l'ultima applicazione, aspirare tutto il gel e risciacquare.
10. Annotare la tonalità ottenuta.

POLA  
DAY

POLA  
NIGHT

## A PARTIRE DA SOLI 30 MINUTI UNA VOLTA AL GIORNO

### **Un prodotto cosmetico registrato**

Pola Day 6%, Pola Night 10% e 16% sono conformi alle modifiche apportate dal Consiglio dell'Unione Europea alla Direttiva 76/768/CEE, concernente i prodotti cosmetici.

### **Agenti lenitivi e attenuanti naturali**

La presenza di speciali additivi minimizza la formazione di placca e aumenta la remineralizzazione per ridurre ulteriormente la sensibilità.

### **Elevato contenuto in acqua**

L'elevato contenuto in acqua del gel riduce la disidratazione dello smalto e riduce la sensibilità del paziente.

### **Addensante ad elevato peso molecolare**

Ciò riduce la sensazione appiccicosa e l'effetto dissecante del gel, riducendo ulteriormente la sensibilità.

### **Elevata viscosità**

L'elevata viscosità del gel ne facilita l'applicazione sulla mascherina e la ritenzione durante l'intera operazione.

### **Gusto**

Il piacevole gusto alla menta del gel è fresco e di lunga durata.

### **Rilascio di fluoro**

La presenza di fluoro remineralizza la superficie dentale contribuendo a ridurre la sensibilità post-operatoria.

### **Contiene un agente desensibilizzante**

I gel Pola Day e Pola Night contengono un agente desensibilizzante che agisce sulle terminazioni nervose riducendone la sensibilità a livello della giunzione tra polpa e dentina, minimizzando la sensibilità e massimizzando il comfort del paziente.

### **pH neutro**

Il pH neutro di Pola Day e Pola Night garantisce il completo rilascio di perossido senza compromettere il comfort del paziente.



## POLA DAY & POLA NIGHT ISTRUZIONI

1. Lavarsi i denti.
2. Posizionare una goccia di gel in ogni spazio della mascherina in corrispondenza dei denti da trattare.
3. Posizionare la mascherina in bocca, assicurandosi che il gel sia posizionato intorno ai denti.
4. Rimuovere dalla bocca il gel in eccesso usando un fazzoletto di carta o uno spazzolino morbido e asciutto.
5. Rimuovere la mascherina dopo il trattamento. Risciacquare la bocca e la mascherina con acqua tiepida.
6. Lavarsi i denti.





## ALLINEARE E SBIANCARE CONTEMPORANEAMENTE

Presentiamo il gel sbiancante per allineatori Pola, perfettamente formulato per l'uso con allineatori ortodontici. Pola For Aligners può essere facilmente utilizzato come kit domiciliare, garantendo al paziente un'ottima esperienza nonché sorrisi più bianchi e brillanti senza un tempo di applicazione aggiuntivo.

### **Pola For Aligners offre gli stessi benefici della pluripremiata formula sbiancante Pola**

- ✓ Il massimo comfort per il paziente in un kit di sbiancamento
- ✓ Contiene nitrato di potassio e fluoro per ridurre la sensibilità nell'uso a lungo termine
- ✓ Il gel ad alta viscosità ne garantisce un facile e saldo posizionamento nell'allineatore.

### **Disponibile in un pratico kit di 4 siringhe per uso domiciliare, di giorno o di notte**

- ✓ Il sistema Pola For Aligners è disponibile nel gel al perossido di carbamide al 10% Pola Night, accuratamente selezionato come agente sbiancante ideale per adattarsi a qualsiasi sistema di allineatori. Permette ai pazienti di personalizzarne l'uso tra i pasti per un minimo di un paio d'ore al giorno fino al pratico utilizzo notturno.
- ✓ La ricerca clinica ha individuato nel perossido di carbamide al 10% la soluzione ideale per lo sbiancamento dei denti, poiché fornisce risultati di sbiancamento ottimali pur mantenendo la massima sicurezza e comfort per il paziente.\*

\*Fonte: Tsubura, Shuichi; Efficacy of PolaNight on Tooth-whitening. 24-months Post Treatment on Japanese. 2006



## CASO CLINICO



**Dr Linda Greenwall**  
BDS MGDS RCS MSc MRD  
RCS FFGDP FICD BEM  
Odontoiatra e Specialista in  
Odontoiatria Restaurativa UK

### **Pola Night 10% CP per allineatori**

Pola Night 10% CP for Aligners è stato utilizzato per 6 settimane con allineatori ortodontici trasparenti



# POLA LIGHT

## UN NUOVO SISTEMA AVANZATO DI SBIANCAMENTO DENTALE CON TECNOLOGIA A LED DA USARE IN CASA

### PER UN SORRISO PIÙ BRILLANTE E SMAGLIANTE IN SOLI 5 GIORNI.

Pola Light è un sistema avanzato di sbiancamento che combina la formula sbiancante pluripremiata di Pola a una mascherina LED, per un trattamento sbiancante ancora più veloce.

- Sistema Pola Light combinato con gel Pola Day.
- Azione rapida per denti più bianchi in soli 5 giorni.
- Formulato per rimuovere in maniera sicura anche le macchie di lunga data.
- Ricaricabile per ripetere il trattamento.
- Remineralizzazione per rinforzare i denti.
- Extra idratazione per ridurre al minimo la sensibilità.



#### DENTI PIÙ BIANCHI IN SOLI CINQUE GIORNI

Durata del trattamento 5 giorni.

Non richiede l'utilizzo della poltrona o della mascherina professionale, facendo risparmiare tempo ai medici e ai pazienti.



#### A PARTIRE DA SOLI 20 MINUTI AL GIORNO

2 trattamenti da 10 o 15 minuti al giorno.



#### FACILE DA USARE

Portatile, ricaricabile e facile da indossare poiché privo di cavi.

La mascherina Pola LED è composta da due arcate, e la sua misura è universale.



#### UTILIZZATO E RACCOMANDATO DAI PROFESSIONISTI

Pola è un sistema di sbiancamento professionale, affidabile e raccomandato dai dentisti, per ottenere denti più bianchi in maniera rapida e sicura.

L'elevata viscosità e il pH neutro dei gel sbiancanti garantiscono al paziente il massimo comfort durante l'utilizzo del kit.

La miscela unica di lenitivi, condizionatori e alto contenuto di acqua aiuta a ridurre la sensibilità dei denti.

#### CONFEZIONE POLA LIGHT

- 1 x mascherina Pola LED
- 4 x siringhe da 3 g di gel sbiancante a base di perossido di idrogeno 6% Pola Day
- 1 x cavo di ricarica USB
- 1 x manuale di istruzioni



# POLA LUMINATE



Con il perossido di idrogeno al 6%, Pola Luminare è il più potente sbiancante disponibile in questo formato. Si applica direttamente sui denti senza bisogno di mascherine. Progettato per essere utilizzato per soli 30 minuti, due volte al giorno, Pola Luminare è lo strumento di ritocco ideale per

mantenere il tuo sorriso bianco e luminoso tra una visita odontoiatrica e l'altra. Con oltre 60 applicazioni in un tubo e il suo aroma di menta che dura a lungo, puoi sbiancare i tuoi denti sempre e ovunque. Questo prodotto sbiancante per i denti è conforme al Consiglio dell'Unione Europea che modifica la direttiva 76/768 / CEE.

# SOOTHE



## Desensibilizzante

Soothe, un gel ad alto rilascio contenente il 6% di nitrato di potassio e lo 0,1% di fluoruro di sodio, allevia la sensibilità dentale causata da variazioni chimiche e termiche. Diversamente da altri agenti desensibilizzanti, Soothe non interferisce con il processo di sbiancamento.

## Da applicare prima e dopo il trattamento sbiancante

La sensibilità può presentarsi durante o dopo le procedure di sbiancamento. Soothe può essere applicato prima o dopo il trattamento.



# DOMANDE FREQUENTI

## Qual è la causa della pigmentazione dei denti?

I denti di ognuno di noi sono unici e si pigmentano e si macchiano in modi diversi. La pigmentazione o le discromie sono normalmente causati da caffè, tè, tè alle erbe, vino rosso, e tabacco.

## Come funziona lo sbiancamento dei denti?

Quando applicato sul dente, il prodotto sbiancante si scompone in ioni di acqua e ossigeno. Gli ioni di ossigeno penetrano nello smalto e attaccano le grosse molecole discromiche in modo da scomporle e renderle più piccole e incolori. Queste piccole molecole incolori vengono poi rimosse naturalmente dai denti tramite la saliva. L'intensità dell'azione sbiancante è data dal numero di ioni disponibili e dal tempo che permangono sul dente



## Quanto tempo è necessario per sbiancare i denti di un paziente?

Nel caso dello sbiancamento effettuato ambulatorialmente si ottengono risultati in meno di 30 minuti di trattamento. Nel caso di un sistema di sbiancamento domiciliare sono necessari 5-14 giorni.

## Quanto durano gli effetti di un trattamento sbiancante?

Dipende da ciascuna persona e dalle sue abitudini di igiene orale. Lo sbiancamento deve essere ripetuto ogni 6-12 mesi sia nel caso del trattamento in ambulatorio che domiciliare. Senza il ritocco, i denti cominceranno a macchiarsi nuovamente a causa degli stessi fattori che hanno provocato la discromia iniziale.

## Cosa succede in caso di presenza di restauri o

## facette? Cambieranno colore?

L'azione sbiancante eliminerà le macchie esistenti sui restauri ma non influirà sulla tonalità originale.

## Ci sono effetti collaterali?

La maggior parte dei pazienti che segue le indicazioni del dentista e le istruzioni per l'uso fornite con i prodotti Pola non manifesterà effetti collaterali. Tuttavia, alcuni pazienti potrebbero avvertire una sensibilità temporanea (sensibilità sorda o acuta al caldo o al freddo). Si tratta di un fenomeno che diminuisce dopo alcune ore dall'interruzione del trattamento e non lascia alcun problema residuo. È possibile ridurre i tempi o la frequenza delle applicazioni o trattare i denti con un agente desensibilizzante, lenitivo. È opportuno astenersi da bibite gassate e da cibi e bevande a base di agrumi per evitare fenomeni di sensibilità.

## Lo sbiancamento dentale è sicuro durante la gravidanza?

Non si raccomanda l'uso di prodotti per lo sbiancamento dentale in gravidanza.

# CASI CLINICI




Dr. Marta Peydro Herrero  
Dr. José Amengual Lorenzo

POLA OFFICE+  
POLA NIGHT

## **Pola Office+ 37.5%** Seguito da **Pola Night 16%** per 5 settimane

I prodotti sbiancanti che compongono il sistema per lo sbiancamento dei denti Pola mi hanno consentito di risolvere la maggior parte dei problemi di pigmentazione dentale riscontrati quotidianamente in ambulatorio in modo semplice, ma soprattutto, sicuro per il paziente. Che si tratti del trattamento ambulatoriale o del kit domiciliare o di entrambe le soluzioni in combinazione, è possibile ottenere un sorriso luminoso e soddisfare le aspettative dei pazienti.

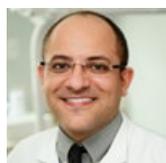

Prof. Leandro Martins

POLA NIGHT

## **Pola Night 10%**

Uno dei maggiori problemi dello sbiancamento dei denti è quello della sensibilità dentale. Pertanto trovare prodotti in grado di offrire una maggiore sicurezza in tal senso è fondamentale. Con una bassa concentrazione di perossido di carbamide, Pola Night ha un elevato contenuto in acqua, pH neutro, agenti desensibilizzanti e un'elevata viscosità. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze dei pazienti assicurando risultati efficaci e protezione da sensibilità e irritazione gengivale. Pertanto la scelta di Polanight 10% è data dalle sue caratteristiche di prodotto pratico, sicuro ed efficace.



Dr. Michael Chan

POLA OFFICE+

## **Pola Office+ 37.5%**

La famiglia di prodotti sbiancanti Pola offre grande flessibilità ai pazienti. I prodotti per uso ambulatoriale Pola Office offrono una gradevole consistenza che consente un maggiore controllo clinico. Ho trovato questo sistema affidabile da utilizzare e ho riscontrato una minima ipersensibilità nei pazienti.



Dr. David Carralero Plaza

POLA DAY

## **Pola Day 6%**

Utilizzo Pola Day da oltre 10 anni con ottimi risultati. Per il trattamento domiciliare preferisco utilizzare la concentrazione massima di perossido di idrogeno in quanto è possibile ottenere risultati più rapidi e offrire ai pazienti un maggior comfort in quanto il prodotto rimane in bocca per minor tempo.



# POLA AMBULATORIALE

## Pola Office+ kit per 3 pazienti

3 Siringhe Pola Office+ da 2.8mL  
3 Siringhe Barriera Gengivale da 1g  
Accessori  
7700464 (37.5% HP)  
7700465 (37.5% HP apribocca incluso)



## Pola Office kit per 3 pazienti

6 Vasetti Polvere Pola Office da 0.3g  
6 Siringhe Pola Office da 2mL  
3 Siringhe di Barriera Gengivale da 1g  
Accessori  
7700218



## Pola Rapid kit per 3 paziente

7700511 (6% HP)  
3 Siringa Pola Rapid da 2.8mL  
Accessori



## Pola Office+ kit per 1 paziente

1 Siringa Pola Office+ da 2.8mL  
1 Siringa Barriera Gengivale da 1g  
Accessori  
7700461 (37.5% HP)  
7700462 (37.5% HP apribocca incluso)



## Pola Office kit per 1 paziente

2 Contenitori per Polvere  
Pola Office da 0.3g  
2 Siringhe Pola Office da 2mL  
1 Siringa di Barriera Gengivale da 1g  
Accessori  
7700256



## Pola Rapid kit per 1 paziente

7700510 (6% HP)  
1 Siringa Pola Rapid da 2.8mL  
Accessori



## Diga Liquida

2 Siringhe di Barriera Gengivale d  
Accessori  
7750006



# POLA DOMICILIARE

## Pola Day and Pola Night kit 10 siringhe da 1,3g

**Pola Day**  
7700359 (6% HP)

**Pola Night**  
7700371 (10% CP)  
7700377 (16% CP)



## Pola Day and Pola Night 50 x 1.3g Bulk Kit

**Pola Day**  
7700361 (6% HP)

**Pola Night**  
7700373 (10% CP)  
7700379 (16% CP)



## Soothe

8150002  
4 X 1.2mL Soothe Siringhe  
8150033  
50 X 1.2mL Soothe Siringhe



## Dispenser da 50 siringhe da 3g

**Pola Day**  
7700079 (6% HP)

**Pola Night**  
7700085 (16% CP)



## Pola Day and Pola Night Mini kit 4 siringhe da 1,3g

**Pola Day**  
7700357 (6% HP)

**Pola Night**  
7700369 (10% CP)  
7700375 (16% CP)



## Spacer Resin 2 siringhe

7700012  
2 Siringhe da 1g  
Resin Syringes

## Buste Pola Cosmetica

7700999  
10 Buste

## Custodie per mascherine

7750008  
5 Custodia per  
mascherine

## Materiale mascherina

7750005  
Ricarica da 20 pezzi

## Pola Light

7700985 (6% HP)



## Pola For Aligners 4 siringhe da 3g

**Pola Night**  
7700556 (10% CP)



**Nota:** ogni confezione include gli accessori  
**CP:** Perossido di Carbamide **HP:** Perossido di Idrogeno

# POLA DA VIAGGIO

## Pola Luminate

1 X 5.5mL Pola Luminate  
7700092



# MATERIALE PUBBLICITARIO GRATUITO

PER L'INFORMAZIONE DEL PAZIENTE



MANIFESTO POLA DAY  
Riordino M100287



MANIFESTO POLA NIGHT  
Riordino M100285



POLA LIGHT DISPENSA  
PER IL PAZIENTE  
Riordino M100529



POLA LIGHT DISPENSA  
DEL DENTISTA  
Riordino M100545



SUPPORTO BROCHURE POLA  
Riordino M100290



BROCHURE PER PAZIENTI POLA  
Riordino M770247



BROCHURE DA TAVOLO  
POLA PRIMA E DOPO  
Riordino M100288



MANIFESTO DA SOFFITTO  
Riordino M100293



PUBBLICITÀ POLA  
Riordino M100291



VETROFANIA POLA  
Reorder M100289



POLA BUSTA  
Riordino M100143



POLA SUPPORTO USB CON VIDEO  
PER LA SALA D'ATTESA  
Riordino M100245



MATERIALE PUBBLICITARIO PERSONALIZZABILE  
Ulteriore materiale pubblicitario personalizzabile  
è disponibile tramite download.  
Visit: [www.sdi.com.au/it/marketing-materials/](http://www.sdi.com.au/it/marketing-materials/)

L'AZIENDA SDI È IMPEGNATA DA ANNI NELLA RICERCA, NELLO SVILUPPO E NELLA PRODUZIONE DI MATERIALI PER ODONTOIATRIA CONSERVATIVA. I PRODOTTI SDI UNENDO INNOVAZIONE ED ALTA QUALITÀ, SONO I MATERIALI PER RESTAURO IDEALI.



---

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

---

AUSTRALIA 1 800 337 003  
AUSTRIA 00800 022 55 734  
BRAZIL 0800 770 1735  
FRANCE 00800 022 55 734  
GERMANY 0800 100 5759  
IRELAND 00 353 (83) 806 0228  
ITALY 00800 022 55 734  
SPAIN 00800 022 55 734  
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734  
USA & CANADA 1 800 228 5166

---



INSTAGRAM  
[@pola\\_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK  
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

---

FOR MORE INFORMATION VISIT  
[polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)

