

SDI | ULTRAMAT 2

VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ



TRITURATORE MULTIUSO AD ALTA VELOCITÀ

Ultramat 2, a doppio voltaggio, con il timer ad alta precisione controllato da microprocessore, permette una triturazione uniforme ed accurata, e garantisce un trattamento e caratteristiche cliniche della miscela ottimali

MISCELATORE

Ultramat 2 multiuso è adatto per ogni tipo di materiale dentistico incapsulato.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Il micro interruttore interrompe automaticamente la triturazione quando viene sollevato il coperchio.

SEMPLICE TOCCARE CONTROLLO SISTEMA

SILENZIOSO A VIBRAZIONI RIDOTTE

BASSO CONSUMO ENERGETICO

PRATICO FACILE LA PULIZI



FEATURES

TRITURAZIONE UNIFORME ED ACCURATA

Ultramat 2 è munito di un timer oscillante controllato da cristallo di microprocessore tipo 0-16 secondi.

RENDIMENTO AD ALTA POTENZA

Ultramat 2 è ad alta potenza con una frequenza di miscelazione di 4600 oscillazioni al minuto +/-1%.

VOLTAGGIO DOPPIO

Ultramat 2 funziona con voltaggi tra 120 e 240V, 50 e 60 Hz, per compatibilità con diversi voltaggi e frequenze di alimentazione.

0-16
SECOND
MICROPROCESSORE

4600
OSCILLANTE

**120 &
240v**

VANTAGGI

Triturazione uniforme ed accurata

Garanzia triennale

microprocessore tipo 0-16 second

Silenzioso a vibrazioni ridotte

Triturazione uniforme ed accurata


Per la miscelazione più incapsulato materiali dentali

Dall'uso facile

DATI TECNICI

Larghezza	217mm	8.5"
Profondità	173mm	6.75"
Altezza	180mm	7.12"
Voltaggio	120 / 240 volts	50 / 60 Hz
Peso	2.765kg	6.095lbs

5 ANNI DI GARANZIA

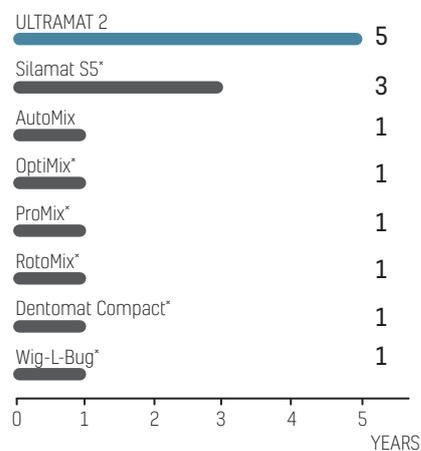

**5 ANNI DI
GARANZIA.**


ADATTO A TUTTE LE CAPSULE

Le forcelle pieghevoli consentono di inserire molti tipi di capsule arrotondate (capsule di amalgama) oltre a quelle con ugelli sporgenti (capsule di vetroionomero).

DENTAL DEVICE (CAPSULES)	TRITUARATION TIMES (SECONDS) USING ULTRAMAT 2 - SPEED SETTING: FIXED
Lojic+	6 ± 1
1, 2, 3 spill Permite / 1, 2, 3 spill GS-80 / Ultracaps+ / Ultracaps S	8 + 1
5 spill Permite / 5 spill GS-80	6 + 1
Riva Light Cure / Light Cure HV / Riva Self Cure (Regular and Fast) Riva Bond LC / Riva Protect / SeT / Riva Luting / Luting Plus /	10



DETTAGLI DELL'ORDINE

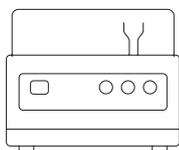

EQUIPMENT

Ultramat 2 (Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione per la regione di consegna) Codice di riordino	5546052
Ultramat X (Per tutti i paesi: include cavo di alimentazione per la regione di consegna) Codice di riordino	5546070

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5, Wig-L-Bug, are not registered trademarks of SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.



ACN 008 075 581



MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166