



# AURA EASY

RESINA COMPOSTA UNIVERSAL



4

CORES

RESTAURAÇÕES  
SIMPLES E  
BRILHO  
PERMANENTE!



# RESTAURAÇÕES PERFEITAS FICARAM MAIS FÁCEIS.

## RESTAURAÇÕES EASY E PERFEITAS

A sua mescla única de matriz e carga trabalha em harmonia para proporcionar a força e a estética necessária para restaurações de longa duração.

## MANUSEIO EASY PARA PREENCHIMENTO SEM ESFORÇO


Consistência otimizada e não pegajosa simplifica o ato de esculpir e compactar.

## A ESCALA DE COR AURA EASY CORRESPONDE A MAIORIA DAS SUAS RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES.

Elimine o esforço de encontrar a cor correta para suas restaurações ao escolher entre apenas 4 cores universais.

Com cores dispostas equidistantes no espectro de saturação de cor e facilmente equivalentes a cores VITA, Aura Easy simplifica a personalização de cores para a maioria de suas necessidades diárias.

Aura Easy simplifica seus procedimentos, reduz seu estoque e torna muito mais fácil seus procedimentos.

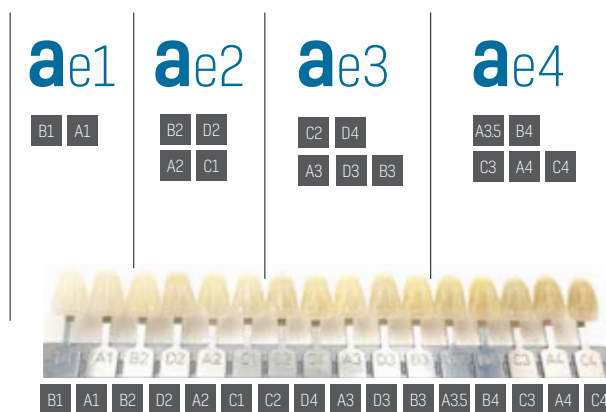

Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

## ESTÉTICA ACESSÍVEL CASO CLINICO

PROF. MACIEL JÚNIOR E PROF. MARCELO FERRAREZI



PROF. PAULO VINICIUS SOARES E PROF. BRUNO REIS.



# PERMITE MAIS RESTAURAÇÕES COM MENOS ESTOQUE DE RESINAS!

## EASY PARA RESISTIR AO TESTE DO TEMPO

Com uma profundidade de três milímetros de polimerização, alta resistência à flexão e compressão e os benefícios próprios de uma resina de baixa tensão de contração de polimerização para compensar o estresse marginal, você obtém restaurações resistentes e duradouras.

## BAIXA CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA

Aura Easy proporciona um estresse reduzido para restaurações de longa duração.

## EXCELENTE RESISTÊNCIA À FLEXÃO\*

Aura Easy resiste às principais deformações sem fraturar.

## FORTE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO\*

Aura Easy resiste às elevadas forças de compressão mastigatórias.

2.21%

115MPa

375MPa

\*SDI internal data



## ADVANTAGES

4 cores abrangem as 16 cores da vita A1 - D4

Resistência elevada ao desgaste e a fraturas

Alto brilho permanente

Consistência não pegajosa e facilidade de esculpir

Baixa Contração de polimerização evitando o stress marginal

4 cores universais para minimizar o estoque de resinas

Mantém a escultura sem escorrer

## INDICAÇÕES

Restaurações anteriores

Restaurações Posteriores

Restaurações indiretas inlays, onlay e veneers

Preenchimento de núcleo


Técnica sanduíche com ionômero de Vidro



Transformações estéticas do sorriso são grandes desafios para profissionais de diferentes especialidades. A odontologia estética avança ao longo do tempo, e novas tecnologias, materiais e protocolos são elaborados a todo momento. Ao contrário das técnicas sofisticadas e complexas elaboradas nas últimas décadas, o uso de resinas compostas para alterações estéticas é cada vez mais amplo, eficiente e simplificado. O Sistema Aura Easy representa este modelo de trabalho por representar um grupo de resinas de tecnologia nanométrica, alta resistência ao desgaste e fratura, simplificação para a seleção de cores e fácil manipulação. A ideia principal é permitir ao profissional trabalhar de maneira efetiva, objetiva, com o menor número de etapas para atingir o sucesso do procedimento restaurador. A seguir, pode-se observar caso clínico realizado para fechamento de diastema no qual foi utilizado apenas um único tipo de resina composta do sistema Aura Easy [cor ea2]. Observe a inserção dos incrementos de resina, após condicionamento ácido e aplicação de adesivo apenas em esmalte, sem exposição de dentina. Todo o volume de resina composta foi foto-ativado com Radi-Plus [SDI] por 20s cada etapa. A satisfação da paciente com o resultado estético associado ao tempo reduzido do procedimento, agradaram a equipe de profissionais. <<<

PROF. PAULO VINICIUS SOARES E PROF. BRUNO REIS

# ORDER DETAILS

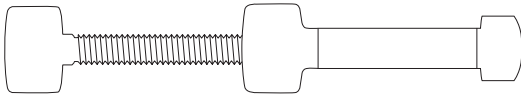

## SERINGA

Seringas avulsas $\varnothing$ e1 - 4g	8560020
Seringas avulsas $\varnothing$ e2 - 4g	8560021
Seringas avulsas $\varnothing$ e3 - 4g	8560022
Seringas avulsas $\varnothing$ e4 - 4g	8560023

## LINHA DE RESINAS AURA

Aura Dentine Chroma  
Aura Enamel  
Aura Bulk Fill  
Aura Easy  
Aura Easyflow



SEU SORRISO.  
NOSSA VISÃO.



02-2024

M100405 D



++DO36M1004051Y

### SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL

Av. Doutor Reinaldo Schmithausen, 3141 Sala A  
Cordeiros Itajaí - SC  
Cep: 88.310-004  
Brasil  
DDG 0800 7701 735  
T +55 11 3092 7100 F +55 11 3092 7101



SDIOdonto



youtube/  
SDI Brasil



facebook.com/SDIBr



www.sdiodonto.com.br