

# ESTÉTICA ACESSÍVEL

## Caso clínico

AURA é um excelente sistema que facilita a vida do dentista.

Primeiro por ter uma escala própria que simplifica a tomada de cor economizando tempo, segundo por ter excelentes propriedades mecânicas como ótima força à compressão e resistência flexural.

Se apresenta com uma dentina nanohíbrida opaca e esmalte microparticulado, diminuindo a chance de erro na seleção da translucidez e opacidade (não deixa a restauração cinza) além de, com isso, trazer excelente acabamento e polimento.

AURA, a resina que não pode faltar em seu consultório.

**Prof. Marco Aurélio Chaves - RJ**



A Resina Aura apresenta diversas qualidades, com cores de dentina, responsáveis por confeccionar o corpo do dente, determinando o croma e opacidade em 7 tons diferentes, além disso apresenta 3 esmaltes que determinam o valor e a translucidez, de acordo com a idade do paciente, proporcionando um efeito natural da restauração. Sem dúvida, recomendo a utilização desse sistema acromático, pela praticidade, de fácil domínio e resultados bem satisfatórios, pois o dentista precisa apenas dominar duas cores para chegar ao resultado final.


**Prof. Breno Mont' Alverne**



» Versatilidade, praticidade, brilho, escupibilidade, tempo de trabalho, custo benefício é tudo que você encontra nesse Sistema Aura SDI de resina composta. Quer possibilidades para ir do básico ao avançado? A dica está aí: Aura!«

**Prof. Leonardo Ubaldo**

# CÓDIGOS PARA PEDIDOS

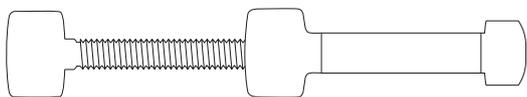

## SERINGAS

<b>Kit Aura Master</b> 8x 4g seringa (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7), 3x 3g seringa (E1, E2, E3), 1x 4g seringa (bulk fill), 2x escala de cor	8565100
Seringa Refil Db - 4g	8560011
Seringa Refil DC1 - 4g	8560004
Seringa Refil DC2 - 4g	8560005
Seringa Refil DC3 - 4g	8560006
Seringa Refil DC4 - 4g	8560007
Seringa Refil DC5 - 4g	8560008
Seringa Refil DC6 - 4g	8560009
Seringa Refil DC7 - 4g	8560010
Seringa Refil Bulk Fill - 4g	8560012
Seringa Refil E1 - 3g	8560001
Seringa Refil E2 - 3g	8560002
Seringa Refil E3 - 3g	8560003



## COMPLETARS

Completar Recarga Recarga Db - 0.25g	8565011
Completar Recarga DC1 - 0.25g	8565004
Completar Recarga DC2 - 0.25g	8565005
Completar Recarga DC3 - 0.25g	8565006
Completar Recarga DC4 - 0.25g	8565007
Completar Recarga DC5 - 0.25g	8565008
Completar Recarga Bulk Fill - 0.25g	8565012
Completar Recarga E1 - 0.2g	8565001
Completar Recarga E2 - 0.2g	8565002
Completar Recarga E3 - 0.2g	8565003

## LINHA DE RESINAS

Aura  
Aura Easy  
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE. OUR VISION.



08-2024

M100172 B



+036M1001721Z

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1800 337 003  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRAZIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 0225 5734  
**GERMANY** 0800 100 5759  
**ITALY** 00800 0225 5734

**NEW ZEALAND** 0800 734 034  
**SPAIN** 00800 0225 5734  
**UNITED KINGDOM** 00800 0225 5734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166

SDI

# AURA

MATERIAL RESTAURADOR  
ULTRA UNIVERSAL



8

CORES DE  
DENTINA

3

CORES DE  
ESMALTE

SISTEMA DE CORES  
SIMPLIFICADO  
PREVISIBILIDADE E  
ESTÉTICA EM UM SÓ  
PRODUTO

# SIMPLESMENTE ÚNICA

Sua formulação única é responsável pela previsibilidade e simplicidade das restaurações. Possibilitando restaurações personalizadas com excelente estética.

A dentina determina a cor do dente e por isso, a seleção da cor de dentina tem um papel fundamental para que se alcance o sucesso estético das restaurações.

O arranjo linear das cores da Aura permitem recriar o aspecto e as cores naturais do esmalte e da dentina. As cores de dentina e esmalte da Aura representam uma solução rápida e simplificada para confecção de restaurações anteriores e posteriores, mimetizando os dentes naturais.

Baseada na estética natural das cores de esmalte e dentina, a Aura usa uma abordagem lógica, e porém inovadora, para combinar cores e incrementos em um único sistema de compósito. Sua formulação exclusiva garante facilidade na confecção das restaurações, que apresentam alto nível estético e elevada resistência.

## O ESMALTE DETERMINA

# 5%

A COR DO DENTE

## AURA ESMALTE

Selecione a cor do bordo incisal (Esmalte), analisando os dentes adjacentes. As cores de esmalte da Aura [E1,E2 e E3] são microparticuladas para facilitar o acabamento e polimento, proporcionando alto brilho.



## E1

Dentes jovens / clareados ( mais brancos, alta opalescência, baixa translucidez - simula o esmalte jovem)


## E2

Dentes adultos (cor neutra, baixa opalescência, translucidez intermediária - simula esmalte adulto)

## E3

Dentes envelhecidos (amarelo / cinza, alta translucidez - simula esmalte envelhecido)

## UMA CAMADA DE ESMALTE DE 0,5 MM DA AURA GARANTE A COMBINAÇÃO IDEAL DE TONALIDADES

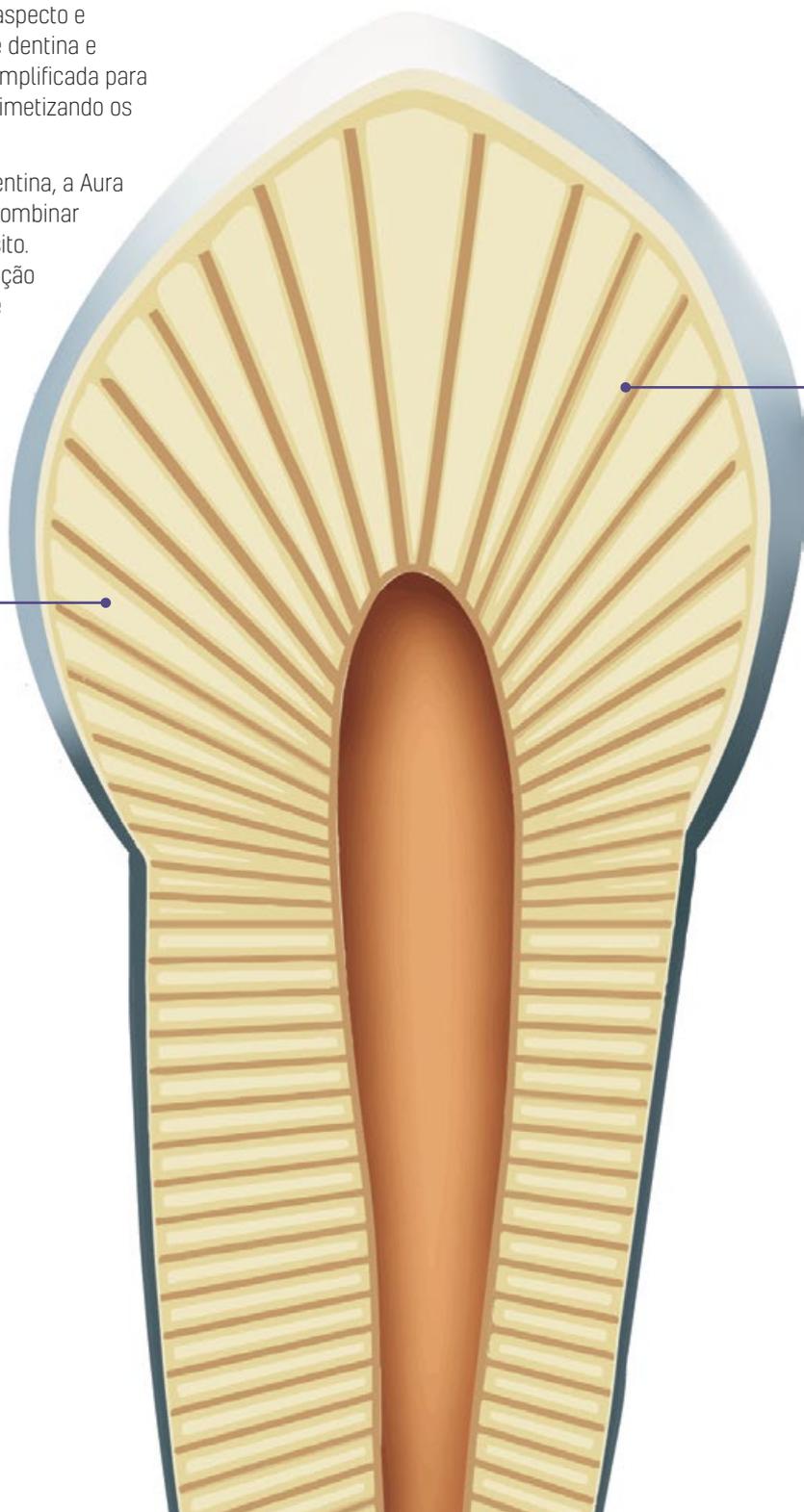

# PREVISIBILIDADE

As cores de dentina e esmalte da Aura representam uma solução rápida e simplificada para confecção de restaurações anteriores e posteriores, mimetizando os dentes naturais.

Baseada na estética natural das cores de esmalte e dentina, a Aura usa uma abordagem lógica, e porém inovadora, para combinar cores e incrementos em um único sistema de compósito.

Sua formulação exclusiva garante facilidade na confecção das restaurações, que apresentam alto nível estético e elevada resistência.

## A DENTINA DETERMINA


# 95%

A COR DO DENTE

## AURA DENTINA

Combine a cor de dentina e da região cervical usando a ampla escala de cores: Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6 e DC7.

As cores de dentina da Aura são nano-híbridas e estão baseadas em um único grau de opacidade e numa exclusiva matiz fluorescente. Suas excelentes propriedades de manuseio, garantem aos profissionais facilidade de esculpir, pois, não grudam nos instrumentais. Agora é possível obter restaurações estéticas e maneira rápida e fácil. Agora e Sempre!

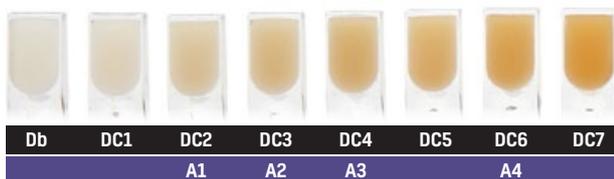

## AURA DENTINA (CROMA)

VITA® EQUIVALÊNCIA

## ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO CIZALHAMENTO

## EXCELENTE POLIMENTO E ALTO BRILHO

## NÃO PEGAJOSA E FÁCIL DE ESCULPIR

## TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO SIMPLES

## DESENVOLVIDA PARA OTIMIZAR O TEMPO DO DENTISTA.

## MÍNIMA CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA

Aura resulta da combinação de uma resina com baixo índice de contração e uma nova carga com "Ultra Alta Densidade" (UAD).

BAIXA


# 2.2%\*

## CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA

\* Dados internos SDI

## EXPERIMENTE A NOVA COMBINAÇÃO


Aura combina uma resina de baixo índice de contração com uma nova carga de "Ultra Alta Densidade" (UAD). Isso confere a resistência de um compósito nano-híbrido que pode suportar altas forças compressivas; além de uma gama de cores de esmalte que apresentam micropartículas pré-polimerizadas que facilitam a escultura e o polimento das restaurações..

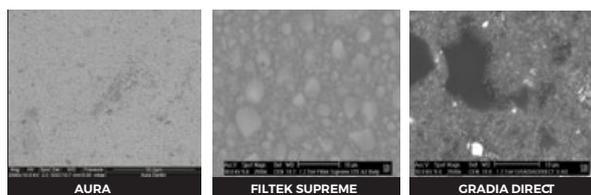

As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostram a diferença no tamanho das partículas entre os três compósitos. As micropartículas pré-polimerizadas da Aura são mais resistentes do que as micropartículas padrão. Isso possibilita um polimento rápido e fácil garantindo um acabamento com alto brilho duradouro, sem o "efeito plucking" de partículas grandes. Compósitos com cargas maiores não conseguem alcançar o mesmo resultado clínico.

# RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE


## ELEVADA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

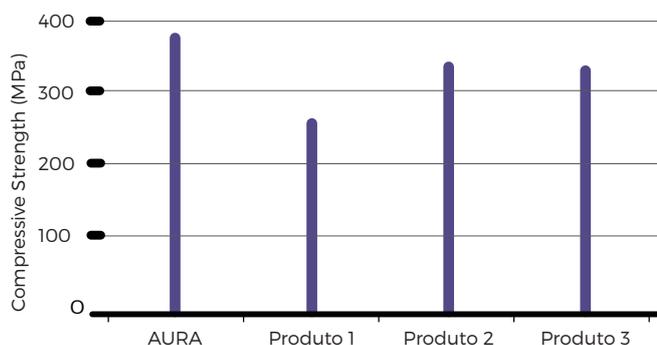

A morfologia única da carga UAD propicia uma interface de resistência extremamente alta que pode suportar as elevadas forças compressivas.

\*SDI internal data

## ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO\*

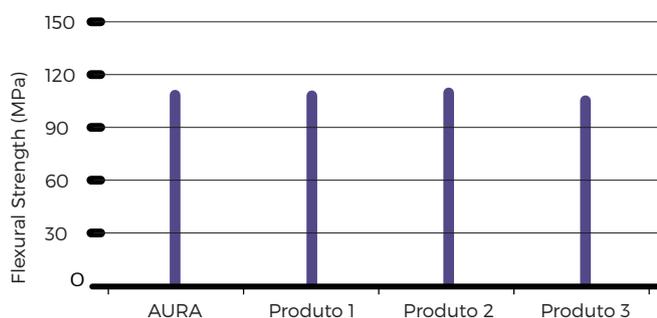

A superior resistência à flexão da Aura significa que ela é capaz de suportar as forças transmitidas na boca.

\*SDI internal data

## VANTAGENS

8 cores de dentina e 3 cores de esmalte que reproduzem as cores naturais dos dentes

Técnica de estratificação simplificada

Extraordinária resistência ao cisalhamento e ao desgaste

Polimento e brilho superiores - Altamente Estética

Consistência ideal: fácil de esculpir

Resina com baixo índice de contração e uma nova carga com "Ultra Alta Densidade" (UAD).

Alta resistência à flexão

## INDICAÇÕES

	Cores de Esmalte	Cores de Dentina
Restaurações anteriores	▪	▪
Restaurações posteriores	*	▪
Inlays indiretas onlays e facetas	*	▪
Construção de núcleo		▪
Esplintagem	▪	▪
"Técnica sanduiche" com Ionômero de Vidro		▪

Para uso como overlay fina sobre a Dentina.



» A resina Aura é atualmente uma excelente opção para o dia-a-dia do cirurgião dentista. A simplicidade na seleção de cor, facilidade de manipulação facilitam o trabalho do dentista. Enquanto sua capacidade de mimetizar com o dente e o seu polimento final otimizam o resultado para o paciente. Sem dúvida a Aura é uma resina diferenciada em relação às suas propriedades físico-mecânicas e estéticas para dentistas e pacientes. «

Prof. Leonardo Cunha