

SDI | **POINTS**

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS



POINTS-APLICADORES DESCARTÁVEIS

Pontas aplicadoras descartáveis são usadas para aplicar rapidamente pequenas quantidades de materiais em áreas de difícil acesso. As pontas são resistentes aos solventes normalmente encontrados nos materiais dentários.

FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES

As pontas em fibra são resistentes a solventes e adstringentes..

FIBRAS NÃO ABSORVENTES, NÃO SOLTAM FIOS

Os fios em fibra não se soltam durante o procedimento. A solução se mantém nas fibras até a sua aplicação.



TRÊS TAMANHOS

Os três tamanhos de Points, superfino, fino e médio, possibilitam o manuseio da quantidade de material desejado.

OPÇÃO DE CORES

Cores diferentes são ideais na diferenciação de materiais em procedimentos complexos.

MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL

As pontas podem ser dobradas para facilitar o acesso desejado.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS

POINTS

Points - Caixa com 400 Unidades	
1 x 400 Points roxo - superfino	8100122
Points verde escuro - fino	
1 x 400 Points verde - fino	8100117
Points azul escuro - médio	
1 x 400 Points azul - médio	8100119
Points Dispenser	8100131

INDICAÇÕES

Aplicação de selante

Aplicação de adesivos

Aplicação de condicionador ácido

Aplicação de selante de cavidades

Soluções adstringentes e evidenciadoras

Remoção de excesso de resina

Condensação de hidróxido de cálcio em canal radicular

INSTRUÇÕES

1 As pontas podem ser usadas dobradas ou retas.



2 Molhe a ponta com a solução e aplique na superfície desejada.

3 Descarte a ponta após a aplicação.

Sugestão: Use cores diferentes de pontas quando estiver aplicando mais de uma solução, a fim de evitar confusão.

Points - Embalagem Com 100 Unidades

Points - Fino - Verde - 100 Unid.	81100143BR
Points - Médio- Azul - 100 Unid	81100144BR
Points - Superfino - Roxo - 100 Unid	81100145BR



SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.



SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL
Av. Doutor Reinaldo Schmithausen, 3141 Sala A
Cordeiros Itajaí - SC
Cep: 88.310-004
Brasil
DDG 0800 7701 735

T +55 11 3092 7100
F +55 11 3092 7101

