

seT



(seT 胶囊)

SELF ETCHING, SELF ADHESIVE RESIN CEMENT

SELBSTÄTZENDER, SELBSTKLEBENDER KUNSTSTOFF-ZEMENT

CIMENTO RESINOSO AUTO-CONDICIONANTE E AUTO-ADESIVO

CEMENTO DE RESINA, AUTOGRABANTE Y AUTOADHESIVO

RÉSINE DE SCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE AUTO-MORDANÇANT

CEMENTO COMPOSITO AUTOMORDENZANTE ED AUTOADESIVO

ZELF ETSEND, ZELF ADHESIEF RESIN CEMENT

SELVÆTSENDE, SELVADHÆRERENDE RESIN CEMENT

SELVETSENDE, SELVBINDENDE RESIN SEMENT

ITSE-ETSAAVA, ITSEKIINNITTYVÄ MUOVISEMENTTI

ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ

SAMOWYTRAWIAJĄCY CEMENT KOMPOZYTOWY NIE WYMAGAJĄCY UŻYCIA SYSTEMU WIĄŻĄCEGO

ÖNSAVAZÓ ÉS ÖNKÖTŐ MŰGYANTABÁZISÚ RAGASZTÓCEMENT

ISESÖÖVITAV, ISEADHESEERUV TSEMENT

SAMOJEDKAJOČ, SAMOADHEZIVEN SMOLNAT CEMENT

PAŠKODINOŠS, PAŠADHEZĪVS SVEĶU CEMENTS

SAVAIME ĒSDINANTIS BEI SURIŠANTIS DERVŪ CEMENTAS

SAMOLEPTACÍ, ADHEZIVNÍ CEMENT ZESÍLENÝ PRYSKYŘICÍ

SAMOLEPTACÍ, ADHEZÍVNÝ, ŽIVICOVÝ CEMENT

歯科接着用レジンセメント セルフエッチングデュアルキュアタイプ

自酸蚀、自粘树脂粘结剂





SDI最高级水门汀 seT现在有注射器装 供应了


seT



seT 是自酸蚀、自粘接、树脂水门汀，设计用于最终粘固金属、树脂、所有烤瓷和烤瓷基修复体。seT 与牙齿结构和所有类型的核心材料化学粘接。seT有胶囊包装和胶体/胶体自动混合注射器系统包装(seT PP)。




专利 ionglass™ 玻璃离子填料
seT 使用由我们玻璃专家开发的SDI专利ionglass™ 充填材料。ionglass™是阻射的、离子释放高的活性玻璃离子，使用于SDI系列牙科水门汀中。seT 充分释放大量氟离子帮助自然牙齿再矿化(钙化)。

氟释放量高
seT 自由运动的氟离子对牙齿有益。氟离子在防龋项目中扮演几个重要的角色。这些包括氟化磷灰石的形成，它比羟基磷灰石更耐酸蚀，氟化磷灰石比其它牙齿矿物质更硬，有助于防止牙齿腐烂

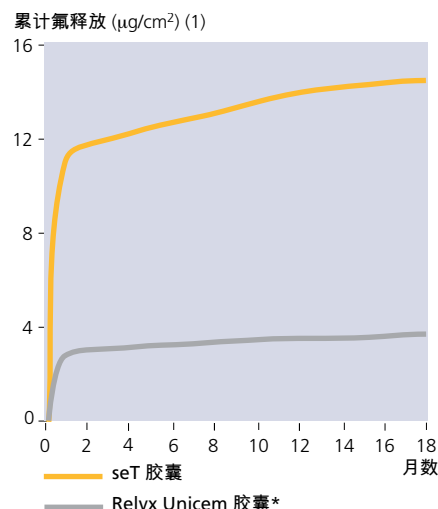

快速和容易

seT 是综合性粘接水门汀，酸蚀、粘接二合一。简单涂抹seT并固定您的修复体。seT形成的膜厚度低和流动性好，易于粘固修复体。

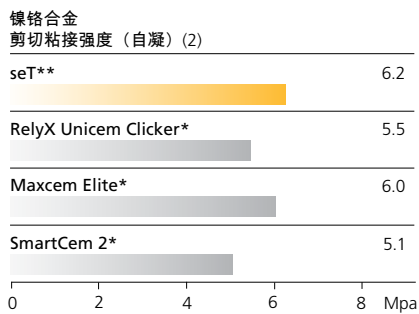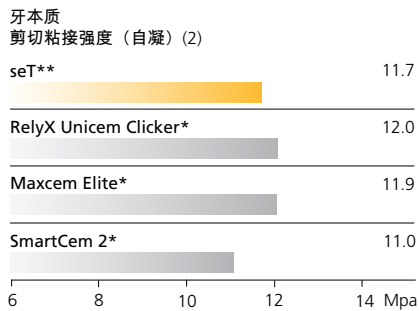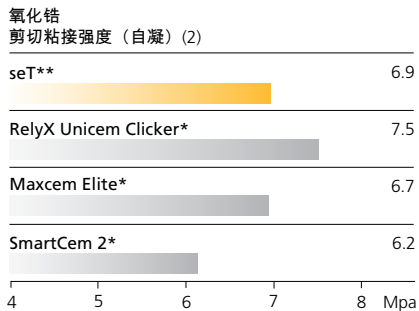

射线阻射性

X光线照片中可观察，当边缘密合性需要定时回来复诊时，seT 是不错的选择

不含双酚A(Bisphenol A)和HEMA

seT 不含双酚A(Bisphenol A)及其衍生物和HEMA，使用本产品对您患者有信心和安心。

双固化

产品设计时结合了光固化和自凝的优点，seT是您多种粘固需要的理想粘固水门汀。[^]

最低的术后敏感

seT 不要求单独的酸蚀和水冲洗。残留层保留完整有助于保护牙齿。即使没有消除术后敏感，也会戏剧性地降低。

输送材料尖嘴的选择：

seT PP注射器可以与各种输料尖嘴配合使用。普通混合嘴主要用于混合输送材料到牙冠和牙桥上。也可以用口内嘴或根管尖嘴与混合宽嘴连接在一起使用。



色彩范围广

seT 有5种色调供应：透明色、A1、A2、OA3和不透明白色。色调多有助于取得最佳美容效果。

适应症

金属、树脂、所有烤瓷及烤瓷基嵌体、冠盖体[^]、牙桥与牙冠的粘固针、桩和螺钉的粘固

[^]做贴面时，使用粘接剂（如Go!、Stae等以及依据生产厂使用说明包括的酸蚀步骤）来改善固位强度。而不适合要求延长工作时间的贴面。**seT PP.

使用说明：

- 1 去除临时水门汀残留物，完全清洗。除去多余水分、保留湿润。



- 2 根据生产厂说明预备修复体，检查是否匹配。



- 3 均匀挤seT到修复体和牙齿的粘接面。



- 4 固定修复体，保留30秒。粗略光照固化2秒或等待2分钟。



- 5 清理走多余的材料。



- 6 保持隔离直到确认固化（大约5分钟），或者光照透明修复体至少20秒。



seT



seT PP 注射器补充装

2支 seT PP (7g/支) 注射器装

28个混合嘴

订货编号:

8805101 A1
8805102 A2
8805103 OA3
8805104 不透明白色
8805105 透明色

seT PP 混合装

A1, A2, OA3, 不透明白色和透明色各一支

7g/支 seT PP注射器装

70个混合嘴

订货编号8810002

seT PP 注射器装混合嘴

50个注射器装混合嘴

订货编号 8810003

seT 胶囊混合装

A1, A2, OA3, 不透明白色和透明色材料胶囊各10粒

订货编号 8810000

seT 胶囊

50粒胶囊包装

订货编号:

8805001 A1
8805002 A2
8805003 OA3
8805004 不透明白色
8805005 透明色

50个seT PP混合嘴——普通

订货编号: 8810003

10个seT PP混合嘴——宽嘴

订货编号: 8810004

10个seT PP 口内嘴

(将与seT PP混合宽嘴连接使用)

订货编号: 8810005

10个seT PP 根管尖嘴

(将与seT PP混合宽嘴连接使用)

订货编号: 8810006



Riva 胶囊材料输送枪 2
订货编号 5545013



Riva 胶囊材料输送枪
订货编号 5545009

*RelyX Unicem Capsules, RelyX Unicem Clicker, Maxcem Elite and SmartCem 2 are not the registered trademarks of SDI limited.
(1) Source: Al-Naimi O.T., McCabe J. F. Fluoride release of seT self-etch/self-adhesive resin cement with that of Competitor Products. (18 months report) Newcastle University, U.K. February 2007.
(2) SDI 测试数据。



由澳大利亚SDI Limited
(南方牙科工业有限公司)制造
总部地址: Bayswater, Victoria 3153
澳大利亚: 1 800 337 003
奥地利: 00800 022 55734
巴西: 0800 770 1735
法国: 00800 022 55 734
德国: 0800 100 5759
爱尔兰: 01 886 9570
意大利: 800 780625
新西兰: 0800 734 034
西班牙: 00800 022 55 734
英国: 00800 022 55 734
美国与加拿大: 1 800 228 5166
公司网址: www.sdi.com.au

