



复合树脂修复材料 LUNA

中文

使用说明书

型号、规格: Luna: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, D4, OA2, OA3, OA3.5, bleach, Incisal
规格: 输送器装4g/支; 子弹装0.25g/支。

产品简介: 该材料是一种前牙区/后牙区纳米填料复合树脂, 它结合了纳米级和微米级填料以及不粘接技术, 是一种光固化材料, 具有不透射性 (Radiopaque), 为前牙修复和后牙修复提供抛光效果和机械强度。

适用范围: 本产品用于前牙/后牙直接修复体和饰面, 根管桩的核制作, 间接嵌体、高嵌体和饰面, 牙齿固位, 复合物和陶瓷修复, 与玻璃离子结合用于夹层修复。

结构及组成:

该产品的型号为Luna, 附件为Super Etch disposable tips (Super Etch 用一次性输送头)、SDI complet applicator (SDI树脂胶囊充填枪)和Points(小刷)。

Luna组成成分: 22.5%重量比 (39%体积比) 多官能团的甲基丙烯酸酯; 77.5%重量比(61%体积比) 无机填料 复合树脂修复材料 (40nm-1.5 μm)。

禁忌症:

盖髓。产品可能对某些人皮肤刺激。像这种情况, 停止使用并接受治疗。不要与含丁香酚的材料一起使用

关键成分:

1. 清洁和隔离牙齿。橡胶障是最好的隔离方式。
2. 采用标准技术, 预备一个保守窝洞。
3. 采用氢氧化钙衬底材料和适当的玻璃离子水门汀衬料来对深牙洞保护。
4. 采用SDI树脂比色板与清洁和湿润牙齿比色选择复合树脂。
5. 根据生产厂家说明使用粘接剂, 或如下使用单组分牙釉质牙本质粘接剂Stae:
 - a) 用无油干燥的空气吹干要粘接的牙齿表面。
 - b) 用含磷酸37% Super Etch (SDI Limited) 酸蚀至少20秒。氟化的牙釉质要求酸蚀90到120秒, 提醒: 如果使用输送器包装酸蚀剂, 确保输送头紧紧牢固地拧到输送器上, 第一次使用或长时间贮存后使用, 挤出少量到混料垫上熟悉其稠度和流动速率。
 - c) 用水充分清洗。
 - d) 去除多余水分, 保持湿润。避免诸如唾液污染。
 - e) 涂上Stae粘接剂, 使其完全渗透内部表层。
 - f) 用无油、干燥空气轻轻吹来挥发溶剂, 表面呈现光亮。
 - g) 光照10秒固化。
6. 充填不厚于2mm的树脂。注意: 使用输送器装材料, 每次使用后反时针拧螺杆半圈来释放压力。
7. 使用高光强LED光固化机, 如Radii Plus (SDI Limited) 光照固化时, 对于浅色树脂每层至少光照10秒, 对深色树脂或遮色剂至少光照20秒。
8. 使用标准技术修形和抛光。

可选: 使用抛光膏另外抛光: 继步骤8后, 可以使用抛光膏,

按以下步骤对固化树脂抛光:

- (i) 涂抛光膏 (SDI Limited) 到抛光杯或轮上。
- (ii) 抹一层抛光膏到修复体上。
- (iii) 在牙齿和抛光杯上加少量水, 以低速和轻轻按压下抛光30秒。
- (iv) 清洗和吹干。

贮存和搬运:

贮存温度为10到25°C(50-77°F)

室温下使用, 即20到25°C(68-77°F)

输送器包装: 不用时盖好盖子。

注意事项:

避免皮肤或口腔组织长时间接触酸蚀剂、粘接剂和树脂, 因为其可能会使口腔组织发炎或皮肤受刺激。

仅供专业人士使用。

放在儿童不易拿到之处。

不可内服。

过期的不要使用。

不要暴露材料在直接光照下。

备注: 联邦法律规定本材料只售给牙医或凭牙医处方购买。

材料安全信息 (MSDS) 可从公司网站www.sdi.com.au获得或向当地销售代表索取。

急救:

眼睛 (接触): 用清水充分冲洗, 并寻求医治。

皮肤 (接触): 用浸有酒精的棉花或海绵抹去, 用清水冲洗。

摄入: 喝大量水或牛奶。如果症状依旧寻求医治。

吸入: 没有预期症状。

包装:

-可供应颜色:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, D4, OA2, OA3, OA3.5, bleach (漂白色), Incisal (切端色)

色板编号根据Vita 色板而定。

Vita 色板是德国VITA Zahnfabrik, H.Rauter GmbH & Co.KG, Bad Säckingen.

-补充装:

1×4g 输送器装, 20×0.25g子弹装

-套装 (包含酸蚀剂和粘接剂等材料附件):

子弹装套装: 5支输送器装套装

生产日期: 见产品包装。

使用期限:

5年



避免阳光直射



温度限制



制造商

原产地: 澳大利亚

医疗器械注册证书编号/产品技术要求编号: 国械注进20143175603

注册人/生产企业名称: SDI Limited 南方牙科工业有限公司

住所: 3-13 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

生产地址: 3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153,

Australia

电话: +61 3 8727 7154

传真: +61 3 8727 7222

代理人/售后服务单位名称: 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司

住所: 广州市越秀区八旗二马路48号内自编1号主楼501-506房、

附楼5楼全层

邮编: 510110 电话: 020-83295999



澳大利亚南方牙科工业有限公司 (SDI Limited)生产
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153, Australia

澳大利亚 1 800 337 003
奥地利 00800 022 55 734
巴西 0800 770 1735
法国 00800 022 55 734
德国 0800 100 5759
爱尔兰 00800 022 55 734
意大利 00800 022 55 734
西班牙 00800 022 55 734
英国 00800 022 55 734
美国&加拿大 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

PAK41403 B

说明书修订日期: 2023/05/05