

**PRODUKTTEST** // Das Luna 2 Universalkomposit aus dem Hause SDI ist eine Weiterentwicklung des am Markt etablierten Füllungsmaterials Luna. Das Resultat sind hochästhetische und langlebige Füllungen mit guter Polierbarkeit und Verschleißfestigkeit. Luna 2 ist frei von BPA-Derivaten und damit besonders interessant für gesundheitsbewusste Patienten. Ein Praxistest.

## „HERVORRAGENDE MODELLIERBARKEIT“

Harald Baumann/Saarlouis

In unserer Praxis wurde Luna 2 in Kombination mit Zipbond getestet. Es wurden

unterschiedlich gestaltete Füllungsmaßnahmen mit Luna 2 durchgeführt. Zum

einen erfolgten mehrflächige Füllungen im Seitenzahnbereich unter Anwendung von Luna flow zur approximalen Abdichtung in Kombination mit Luna 2, zum anderen Frontzahn- und Zahnhalsfüllungen in Kombination mit Shadings in Weiß, Universal und Braun und Luna 2.



### Klinische Anwendung

Die Anwendung von Zipbond ist sehr angenehm möglich, da Zipbond schnell und leicht in dünnfließender Form appliziert werden kann.

Die Anwendung von Luna 2 ist für „Modellierfetschisten“ überaus angenehm. Luna 2 lässt sich sehr gut adaptieren, klebt nicht am Instrument und kann

---

Deckungen alter Zahnhalsdefekte. 1. Quadrant ist fertig, 2. Quadrant im noch alten Zustand.



Vorher-Nachher-Situation bei Frakturen.

vor allem sehr lange und exakt modelliert werden. Es kommt nicht zu Ablösungen beim Modellieren der Füllung. Durch die lang anhaltende Plastizität ist das Einbringen von Shadings in die Füllung in nicht gehärteter Form möglich. Das spart Zeit und macht richtig Spaß! Bei entsprechend ausgeprägter Modellation erübrigt sich durch die sehr glatte Oberflächenstruktur oftmals die Politur der Füllung. Wenn poliert werden muss, erfolgte dies mit Soflex-Scheiben und -Discs problemlos in gewohnter Form.

Frontzahnfüllungen habe ich in Form von restaurativen Füllungen und als Odontoplastiken durchgeführt. Die Farbgestaltungsmöglichkeiten mit Luna 2 sind gut. Für die optimale Gestaltung fehlen etwas opakere Massen, hier wurde auf

Shader zurückgegriffen. Vor allem beim älteren Patienten mit sehr dunklen Zahnhälsen hat sich die Anwendung von braunen Shadern als sehr geeignet erwiesen. Inzisalkanten konnten mit i-Material „unsichtbar“ rekonstruiert werden. Die Hochglanzpolierbarkeit der Restaurationen ist ausgezeichnet.

### Fazit

Luna 2 ist ein leicht und angenehm zu verarbeitendes Composite, das durch seine Farbpalette und die Hinzunahme von Flow und Shadern für alle restaurativen Einsatzbereiche sehr gut geeignet ist. Hervorzuhebend ist die hervorragende Modellierbarkeit.

**SDI GERMANY GMBH**  
Tel.: +49 2203 9255-0  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)