



25 EVALUATEURS CLINIQUES

517 UTILISATIONS

96% DE NOTATION CLINIQUE


Caractéristiques principales : Système à base de Fluorure d'Argent et d'Iodure de Potassium (IP)

- Procédure en deux étapes qui réduit le risque de coloration
- Nouvelle solution aqueuse sans ammoniac

Description

Riva Star Aqua est un système à base de fluorure d'argent :

- Système de solution aqueuse, Fluorure d'Argent + Iodure de Potassium
- A la différence des autres systèmes, la procédure en deux étapes **Riva Star Aqua** réduit le risque de coloration
- Effet désensibilisant pouvant persister au-delà de deux ans
- Non invasif, idéal pour une dentisterie minimalement invasive

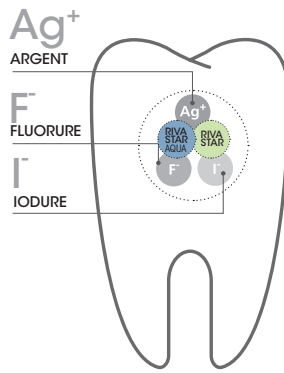

Indications

- Désensibilisation
- Arrêt des caries
- Détection des caries
- Technique SMART(CVI + SDF)

Qualités uniques

- Se conserve à température ambiante
- n'irrite pas les tissus mous
- Formule inodore
- Un Fluorure d'Argent qui réduit la coloration
- Améliore l'adhésion des verres ionomères et composites sur la dentine



Astuces cliniques

- Séchez fortement
- Frotter pour faire pénétrer le produit dans la dent et ne vous contentez pas d'appliquer une couche fine
- Assurez-vous d'appliquer une quantité suffisante du produit de l'étape 2 jusqu'à ce que le précipité devienne transparent

"TRÈS EFFICACE POUR LA DÉSENSIBILISATION."

Commentaires de l'évaluateur

"J'apprécie particulièrement le fait que le produit ne colore pas la dent et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une digue liquide. C'est un énorme avantage."

"Pas de coloration et pas de réfrigération."

"Beaucoup moins irritant pour les tissus mous que la formule d'origine."

"Procédure facile en deux étapes."

"La formule sans ammoniac est un avantage pour moi."

"La deuxième étape prend plus de temps que la première parce qu'il faut frotter."

"J'ai constaté que bien que l'utilisation d'une digue liquide ne soit pas requise, il vaut mieux éviter le contact avec les tissus car une légère irritation peut apparaître."

83% Praticiens consultés: recommanderaient le produit à un confrère


43% Praticiens consultés qui seraient disposés à s'approvisionner en Riva Star Aqua :

43% à la place du produit qu'ils utilisent actuellement


30% en plus du produit qu'ils utilisent actuellement

4% le recommanderaient pour certains cas particuliers

Résumé de l'évaluation:

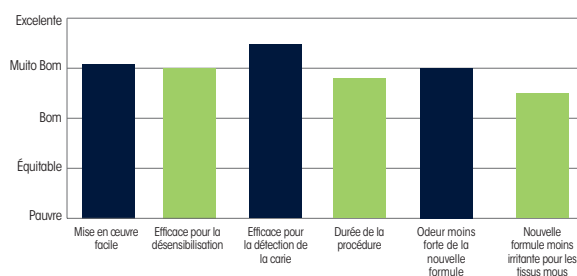

Comparé aux produits concurrents :

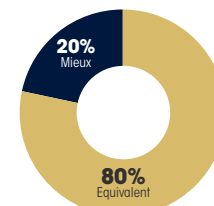

A la question : trouvez-vous que cette formule colore moins les dents que les autres systèmes SDF

