




25 KLINISCHE BEWERTER
517 ANWENDUNGEN INSGESAMT
96% KLINISCHE BEWERTUNG

Hauptmerkmale: System aus Silberfluorid und Kaliumiodid (KI) • Zwei-Schritt-Verfahren reduziert Verfärbungen • Neue wasserbasierte, ammoniakfreie Formulierung

Beschreibung

Riva Star Aqua ist ein Silberfluorid-System:

- Wasserbasiertes System SF + KI
- Im Gegensatz zu anderen Systemen reduziert das Zwei-Schritt-Verfahren von Riva Star Aqua Verfärbungen
- Desensibilisierung für zwei Jahre und länger
- Nicht-invasiv und ideal für minimal-invasive Behandlungen

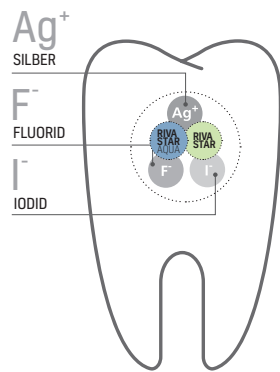

Indikationen

- Desensibilisierung
- Kariesarretierung
- Karieserkennung
- SMARTere Glasionomer-Sandwich-Technik



Alleinstellungsmerkmale

- No Keine Kühlung nötig
- Weniger Gewebereizung
- Formel mit geruchloser Basis
- SF-Material mit reduzierter Verfärbung
- Erhöhung der Haftfestigkeit von Glasionomeren und Kompositen an Dentin



Klinische Tipps

- Sorgfältig trockentupfen.
- Flüssigkeiten gründlich in den Zahn einmassieren, nicht nur in dünner Schicht auftragen.
- Darauf achten, Step 2 großzügig aufzutragen, bis die Ausfällung klar wird.

„SEHR WIRKSAM ALS DESENSITIZER.“

Kommentare der Bewerter

„Mir gefiel besonders, dass es den Zahn nicht verfärbte und keinen Gingivaschutz erforderte. Das ist ein enormer Vorteil.“

„Keine Verfärbung und keine Kühlung.“

„Viel weniger Gewebereizung als bei der Original-Formulierung.“

„Anwenderfreundliches Zwei-Schritt-Verfahren.“

„Keine Ammoniakbasis, das ist mir wichtig.“

„Beim zweiten Schritt muss wesentlich länger einmassiert werden als beim ersten.“

„Es ist kein Gingivaschutz nötig, aber ich fand es besser, Kontakt mit der Gingiva zu vermeiden, da eine leichte Reizung möglich ist.“

So viele Zahnärzte würden:

83% Es einem Kollegen empfehlen


So viele Zahnärzte würden es vorrätig halten:

43% Ja, anstelle des bisherigen Produkts


30% Ja, zusätzlich zum bisherigen Produkt

4% Ich würde es eventuell für bestimmte Fälle bestellen

Bewertung im Überblick:

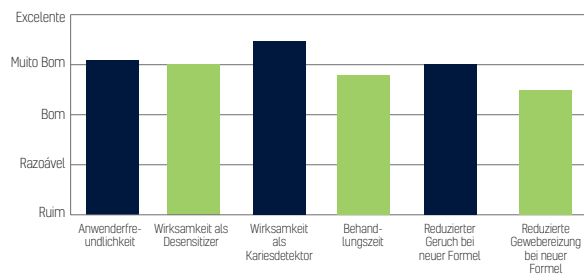

Vergleich mit Wettbewerbsprodukten:

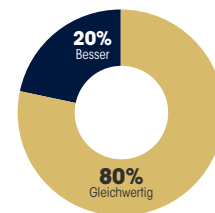

Do you find it to be less staining than other SDFs?

