




25 VALUTATORI CLINICI
517 TOTALE USI
96% VALUTAZIONE CLINICA

Caratteristiche principali: Sistema a base di fluoruro d'argento e ioduro di potassio (KI) • La procedura in due fasi riduce la formazione di macchie • Nuova formulazione a base d'acqua priva di ammoniaca

Descrizione

Riva Star Aqua è un sistema al fluoruro d'argento:

- Sistema SF + KI a base d'acqua
- A differenza di altri sistemi, la procedura in due fasi di Riva Star Aqua riduce la formazione di macchie.
- Effetto desensibilizzante per due anni e oltre
- Non invasivo e ideale per l'odontoiatria
- minimamente invasiva

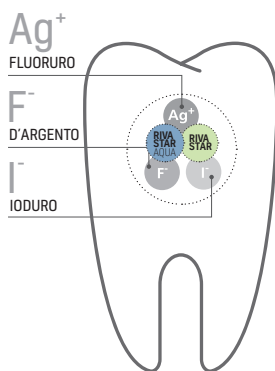

Indicazioni

- Desensibilizzazione
- Arresto delle carie
- Rilevamento delle carie
- Tecnica a sandwich di vetroionomero SMARTer

Attributi unici

- Non è necessaria la refrigerazione
- Minore irritazione dei tessuti
- Formula inodore
- Materiale SF a ridotta colorazione
- Aumenta la forza di adesione alla dentina dei materiali vetroionomerici e dei compositi
- and composite materials to dentin



Suggerimenti clinici

- Dedicare un po' di tempo a strofinare il liquido nel dente e non limitarsi ad
- applicare uno strato sottile.
- Assicurarsi di applicare abbondantemente il liquido Fase 2
- finché il precipitato non scompare

"MOLTO EFFICACE
COME DESENSIBILIZZANTE"

Commenti dei valutatori

"Mi è piaciuto molto il fatto che non abbia decolorato il dente e che non sia necessaria una barriera tissutale. Questo è un enorme vantaggio".

"Non macchia e non necessita di refrigerazione".

"Irritazione dei tessuti molto inferiore rispetto alla formulazione originale".

"Procedura in due fasi facile da usare".

"Per me è importante che non contenga ammoniaca".

"La seconda fase richiede un tempo di lavaggio molto più lungo rispetto alla prima fase".

"Ho constatato che, anche se non è necessaria una barriera di tessuto, è meglio evitare il tessuto, altrimenti si può verificare una leggera irritazione".

Consulenti che lo consiglierebbero:

83% a un collega


Consulenti che vorrebbero rifornirsi in studio:

43% Sì, in luogo del prodotto attuale


30% Sì, in aggiunta al prodotto attuale

4% Potrei voler ordinare questo prodotto per alcuni casi

Sintesi della valutazione:

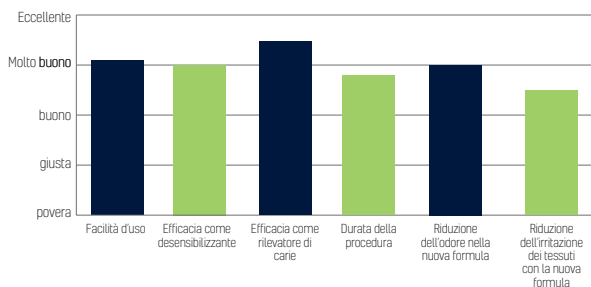

Rispetto a prodotti della concorrenza:

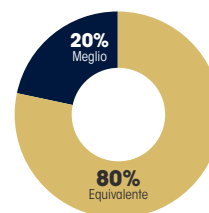

Trova che sia meno macchiante rispetto ad altri SDF?

