



25 EVALUADORES CLÍNICOS
517 USOS TOTALES
96% VALORACIÓN CLÍNICA DEL


Características clave: Sistema de flúor de plata y yoduro de potasio (KI)

- El procedimiento de dos pasos reduce las manchas
- Nueva fórmula a base de agua sin amoníaco

Descripción

Riva Star Aqua es un sistema de flúor de plata:

- Sistema de flúor de plata y yoduro de potasio a base de agua
- A diferencia de otros sistemas, el procedimiento de dos pasos de **Riva Star Aqua** reduce las manchas
- Más de dos años de efecto desensibilizante
- No invasivo e ideal para odontología mínimamente invasiva

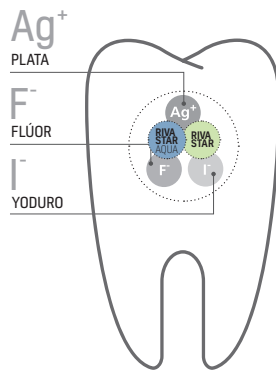

Indicaciones

- Desensibilización
- Detención de caries
- Detección de caries
- Técnica sándwich de ionómero de vidrio SMARTer



Características únicas

- NSin necesidad de refrigeración
- Menor irritación de los tejidos
- Fórmula sin olor
- Un material de flúor de plata con manchas reducidas
- Aumenta la fuerza de unión del ionómero de vidrio y los materiales de composite a la dentina



Consejos clínicos

- Seque muy bien.
- Dedique tiempo a frotar los líquidos en el diente, no se limite a aplicar el producto en una capa fina.
- Asegúrese de aplicar generosamente el líquido del Paso 2 hasta que se aclare el precipitado.

MUY EFECTIVO COMO DESENSIBILIZANTE

Comentarios de los evaluadores

«Me gustó mucho que no discolorara el diente y que no requiera una barrera tisular. Esa es una gran ventaja».

«Sin manchas y sin refrigeración».

«Irritación de los tejidos mucho menor que la fórmula original».

«Procedimiento de dos pasos fácil de usar».

«Es importante para mí que no tenga una base de amoníaco».

«El segundo paso lleva mucho más tiempo de frotado que el primer paso».

«He descubierto que, aunque no se requiere una barrera tisular, es mejor evitar los tejidos, ya que puede producirse una ligera irritación».

Opinión de los asesores:

83% lo recomendaría a un colega


De entre los asesores que querrían tenerlo en clínica:

43% querría tenerlo en lugar del producto actual


30% querría tenerlo además del producto actual

4% podría querer pedir este producto para ciertos casos

Resumen de evaluación:

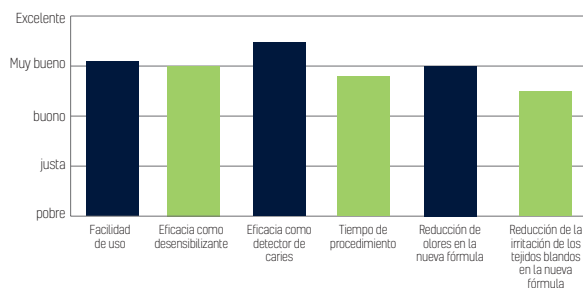

En comparación con productos de la competencia:

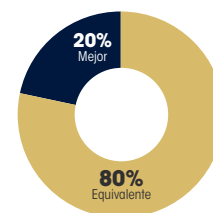

Do you find it to be less staining than other SDFs?

