

riva luting

GLASS IONOMER LUTING CEMENT

GLAS-IONOMER-BEFESTIGUNGSZEMENT

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

VIDRIO IONOMERO DE CEMENTACION

CIMENT DE SCELLEMENT AU VERRE IONOMERE

CEMENTO VETRO-IONOMERICO PER FISSAGGIO

GLASIONOMEER LUTING CEMENT

GLASIONOMER CEMENTERINGSCEMENT

GLASSIONOMER SEMENTERINGSSEMENT

LASI-IONOMEERIN TIIVISTYSSEMENTTI

ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

CEMENT GLASJONOMEROWY

ÜVEGIONOMER RAGASZTÓ CEMENT


KLAASIONOMEERNE TSEMENT

STEKLASTO IONOMERNI CEMENT ZA CEMENTIRANJE

STIKLA JONOMĚRU CEMENTS

合着用グラスアイオノマーセメント

玻璃離子粘接水門汀

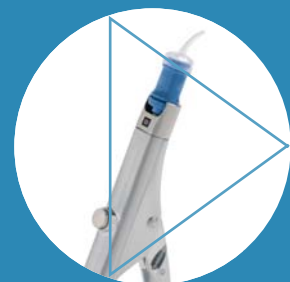

SDI

具有神奇的氟离子释放 的玻璃离子粘接水门汀



riva luting



Riva Luting是传统的、自凝的、玻璃离子粘接剂，用于金属基修复体粘接。它与金属材质和牙齿化学粘接。


专利 ionglass™ 充填材料技术
Riva Luting使用由我们玻璃专家开发的SDI专利ionglass™ 充填料。ionglass™是阻射的、离子释放高的活性玻璃离子，使用于SDI系列牙科水门汀中。Riva Luting充分释放大量氟离子帮助自然牙齿再矿化(钙化)。

氟释放量高


Riva Luting中自由运动的氟离子对牙齿有利。氟在龋齿防护作用中扮演几个重要角色。这些包括氟化磷灰石的形成，它比羟基磷灰石更抗酸。氟化磷灰石对牙齿再矿化(钙化)作用重大。

低溶解度

Riva Luting在口腔环境中溶解度低。这增加材料性能，抵御由口腔酸液造成的降解和磨损。

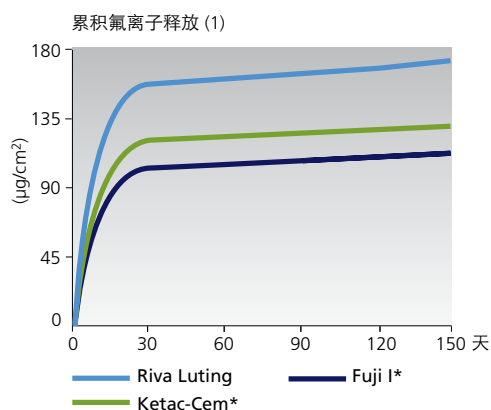

水溶性 (混合后7分钟)**

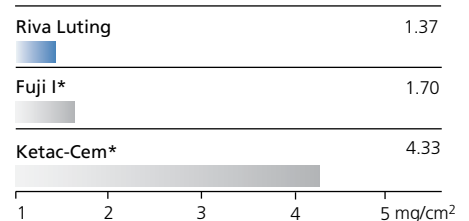

具有抗菌效果


与其它氟释放树脂水门汀材料相比，Riva Luting有抗菌作用，可抵御三种龋齿菌：Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus 和 Lactobacillus⁽²⁾。



照片由日本Tochigi的Dr Shuichi Tsubura D.D.S. 提供


固化时间

当使用Riva Luting时，较少工作时间损失。具有充分的工作时间和快速固化性能，Riva Luting缩短诊疗时间和确保早期抵抗力。

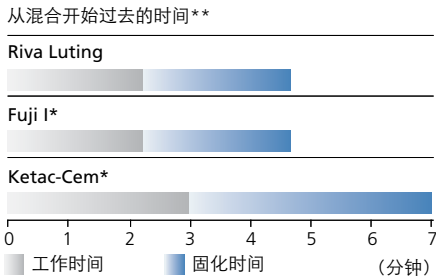


弯曲强度高

弯曲强度高增强玻璃离子粘接水门汀寿命，承受咀嚼力。弯曲强度高的Riva Luting提高其在口腔环境中的持久性和保持间接修复体长久性。

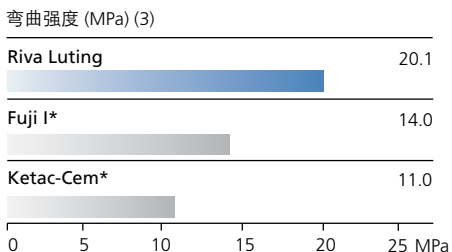

非常低的成膜厚度

Riva Luting很容易流到预备体中。成膜厚度低使得间接修复体紧密固定。

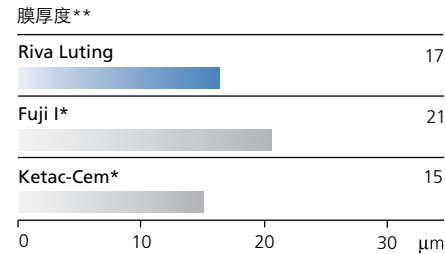

单一颜色

Riva Luting只有通用的浅黄色色调。

适应症

- 金属或烤瓷与金属嵌体、冠盖体和牙冠的粘接
- 不锈钢冠粘接
- 牙桩和螺钉的粘接
- 金属正畸环的粘接
- 衬底

使用说明:

牙冠的粘接

- 1 隔离和预备牙桩。




- 2 清洗修复体内表面。




- 3 完全干燥修复体。




- 4 用银汞搅拌机振荡胶囊 或在混料垫上混合粉末/液体。

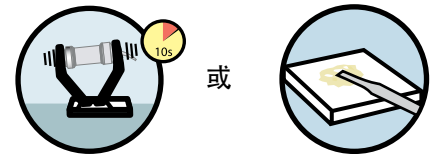

- 5 涂大约1mm厚的水门汀到粘接面

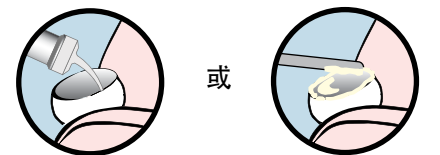

- 6 30秒内固定修复体。

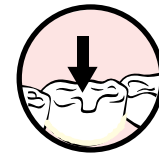

- 7 在第一个凝胶形成阶段去除多余的水门汀。



- 8 保持隔离直到确认固化(大约4分35秒)。

riva luting



* Fuji I 和 Ketac Cem不是SDI Limited注册产品商标

** 发表的SDI测试数据

(1) McCabe JF, Al-Naimi OT. Riva 玻璃离子产品中的氟释放到水中与其它对手产品对比, Newcastle大学 (英国); 2005年2月

(2) Waldo B, Zhang P, Bennett J, Michalek SM, Katz J, Broome JC. 复合树脂和玻璃离子水门汀抗菌活性. 美国Alabama at Birmingham大学口腔学院

(3) 口腔顾问(The Dental Advisor), 第23卷, 第2期; 2006年3月



Riva Luting 胶囊

50粒 x Riva Luting 胶囊
订货编号 8650008

Riva Luting 粉末/液体套装

35g Riva Luting 瓶装粉末
25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体
附件
订货编号 8650508

Riva Luting 粉末/液体 三组套装

3瓶 x 35g Riva Luting 瓶装粉末
3瓶 x 25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体
附件
订货编号 8650510

Riva Luting 粉末 补充装

35g Riva Luting 瓶装粉末
附件
订货编号 8650108

Riva Luting 液体 补充装

25g (24.3mL) Riva Luting 瓶装液体
订货编号 8650900



Riva Applicator 2
(材料输送枪)
订货编号 5545013

Riva Applicator
(材料输送枪)
订货编号 5545009

由澳大利亚SDI Limited(南方牙科工业有限公司)制造

总部地址: Bayswater, Victoria 3153

澳大利亚: 1 800 337 003

奥地利: 00800 022 55734

巴西: 0800 770 1735

法国: 00800 022 55 734

德国: 0800 100 5759

爱尔兰: 01 886 9570

意大利: 800 780625

新西兰: 0800 734 034

西班牙: 00800 022 55 734

英国: 00800 022 55 734

美国与加拿大: 1 800 228 5166

公司网址: www.sdi.com.au

