



**Plus blanc.
Plus brillant.
Pour vous.**

gamme

pola

SYSTÈME AVANCÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS



Your Smile. Our Vision.

www.sdi.com.au

www.polawhite.com.au





Un beau sourire en dit plus en un instant

Whiter,
Brighter.
You.

poladay

SDI NEW YORK RIO DE JANEIRO MILAN BERLIN DUBAI
PARIS ROME LONDON SYDNEY HONG KONG

poladay

AVAILABLE IN 3%, 7.5% & 9.5%
HYDROGEN PEROXIDE

SDI

CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO
SALE BY OR ON THE BEHALF OF A LICENSED
DENTAL PROFESSIONAL. FOR MORE INFORMATION, VISIT
WWW.SDI.COM OR CONTACT YOUR REGIONAL REPRESENTATIVE.
CAUTION: USE POLA-DAY ONLY UNDER THE SUPERVISION
OF A DENTIST. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

SDI NEW YORK RIO DE JANEIRO MILAN BERLIN DUBAI
PARIS ROME LONDON SYDNEY HONG KONG

bois

que les mots ne le pourront jamais

POLAOFFICE+



Le blanchiment le plus rapide au monde

Temps réduit au fauteuil. Durée totale du traitement: moins de 30 minutes. En passant moins de temps au fauteuil, le patient est plus confortable et cela est plus rentable pour le cabinet. La formule unique à 37,5% de peroxyde d'hydrogène permet de libérer rapidement les ions peroxyde pour démarrer le processus de blanchiment.


Coffrets:

Kit 3 patients Pola Office+ - avec écarteurs

3 seringues Pola Office+ de 2,8mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
3 écarteurs de lèvre
Accessoires
Réapprovisionnement 7700416

Kit 3 patients Pola Office+ - sans écarteurs

3 seringues Pola Office+ de 2,8mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700415

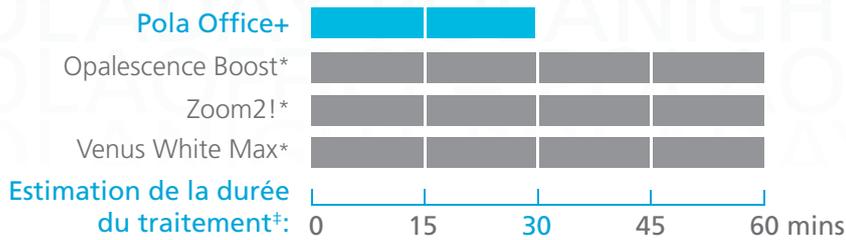

“89% des opérateurs sont prêts à recommander Pola Office+ à leurs collègues[†]”

Le blanchiment le plus rapide au monde

Ne nécessite pas de lampe spécifique

Pola Office+ ne nécessite pas d'activation et peut donc être utilisé avec ou sans lampe spécifique. Bien qu'une lampe ne soit pas indispensable, vous pouvez évidemment utiliser une lampe spécifique ou à photopolymériser pour accélérer le blanchiment et impressionner vos patients.

Confort optimal

Grâce à son pH neutre, Pola Office+ garantit un confort optimal per et post opératoire. Le temps de traitement raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité dentaire du patient.

Désensibilisant intégré

Pas besoin de désensibilisant complémentaire. Pola Office+ bénéficie d'un désensibilisant intégré limitant la sensibilité post opératoire. L'analgésique principal (le nitrate de potassium) inhibe, l'influx nerveux qui accroît la sensibilité, et produit ainsi un effet calmant.

Extrusion facile

Ne nécessite aucun mélange. Le système de double seringue auto-mélangeuse permet le mélange au moment de l'application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit une préparation homogène du gel fraîchement activé. Le gel fraîchement activé optimise l'effet blanchissant. L'embout fin facilite l'application, particulièrement dans les espaces étroits.

Une couche fine suffit!

Nécessite uniquement une fine couche de gel. Utilisez l'embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. Grâce à sa viscosité, le gel adhère à la surface de la dent et optimise l'effet blanchissant.

“83% des opérateurs sont prêts à acheter Pola Office+[†]”

Kit 1 patient Pola Office+ - avec écarteur

1 seringue Pola Office+ de 2,8mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
1 écarteur de lèvres
Accessoires
Réapprovisionnement 7700431

Kit 1 patient Pola Office+ - sans écarteur

1 seringue Pola Office+ de 2,8mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700430

POLAOFFICE

Pola Office met en œuvre une formule de peroxyde d'hydrogène à 35% qui garantit au praticien et à ses patients des résultats rapides et efficaces tout en réduisant le temps au fauteuil.



Acte medical tres rapide

La durée totale du traitement est d'environ 30 minutes. Moins de temps passé au fauteuil signifie plus de confort et une plus grande satisfaction du patient mais aussi une meilleure efficacité et un meilleur rapport qualité prix.

Désensibilisant intégré

Pola Office contient du nitrate de potassium, un agent désensibilisant reconnu. Ce dernier agit sur le passage de l'influx nerveux qui accroît la sensibilité, et produit ainsi un effet calmant.

Ne nécessite pas de lampe spécifique

Aucune lampe n'est indispensable pour obtenir des résultats probants; cependant, une lampe à photopolymériser potentialisera l'effet de blanchiment en à peine 30 minutes.

Retirer la barrière gingivale

La barrière gingivale de Pola Office peut être retirée rapidement et de façon hygiénique.

Pola Office - 3 kits patient

6 flacons de poudre dentaire
Pola Office de 0,3g
6 seringues Pola Office de 2mL
3 seringues de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700015

Pola Office - 1 kit patient

2 flacons de poudre dentaire Pola
Office de 0,3g
2 seringues Super Etch 2mL
1 seringue de barrière gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700030

2 recharges de seringues de Barrière Gingivale

2 seringues de Barrière
Gingivale de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7750006



L'éclaircissement au fauteuil facile et rapide

Avant le traitement



Après le traitement



REMARQUE:

Les résultats peuvent varier
d'un patient à l'autre.

Photos gracieusement offertes
par le Dr. Shuichi Tsubura,
D.D.S., Ph.D., Japan



POLADAY & POLANIGHT

Ces gels blanchissants à viscosité élevée et pH neutre constituent pour le patient un kit ambulatoire au confort optimal. La combinaison exceptionnelle fortement hydratée de principes actifs, apaisants et traitants, permet de réduire la sensibilité et de freiner significativement la formation de plaque et de caries.



Agent apaisant et traitant naturel

L'ajout d'additifs spéciaux réduit la formation de plaque et stimule la reminéralisation pour une sensibilité moindre. Les propriétés antibactériennes aident à reconstituer l'émail dentaire.

Forte hydratation

Ce gel fortement hydraté réduit la déshydratation de l'émail et par conséquent la sensibilité du patient.

Épaississant à haut poids moléculaire

Cela réduit à la fois la sensation d'humidité et l'effet asséchant du gel au bénéfice d'une sensibilité moindre.

Viscosité élevée

Le gel à haute viscosité se place aisément et en toute sécurité dans la gouttière où il se fixe pour toute la durée du port.

Goût

Le gel a un goût agréable de menthol à effet durable et avec une sensation de fraîcheur.

Large choix de concentrations

poladay	peroxyde d'hydrogène à 3%
	peroxyde d'hydrogène à 7,5%
	peroxyde d'hydrogène à 9,5%
poladay CP	peroxyde de carbamide à 35%
polanight	peroxyde de carbamide à 10%
	peroxyde de carbamide à 16%
	peroxyde de carbamide à 22%

1% de peroxyde d'hydrogène équivaut à environ 3% de peroxyde de carbamide.

Pola Day et Pola Night Kit Seringue 10 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700101 (peroxyde d'hydrogène à 3%)
7700103 (peroxyde d'hydrogène à 7,5%)
7700105 (peroxyde d'hydrogène à 9,5%)
7700107 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700109 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700111 (peroxyde de carbamide à 22%)

Pola Day et Pola Night Mini Kit Seringues 4 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700100 (peroxyde d'hydrogène à 3%)
7700102 (peroxyde d'hydrogène à 7,5%)
7700104 (peroxyde d'hydrogène à 9,5%)
7700106 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700108 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700110 (peroxyde de carbamide à 22%)

Pola Day et Pola Night Bulk Kit Seringues 50 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700025 (peroxyde d'hydrogène à 3%)
7700026 (peroxyde d'hydrogène à 7,5%)
7700034 (peroxyde d'hydrogène à 9,5%)
7700027 (peroxyde de carbamide à 10%)
7700028 (peroxyde de carbamide à 16%)
7700029 (peroxyde de carbamide à 22%)

à partir de seulement 15 minutes par jour



Libération de fluor

L'adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Contient un agent désensibilisant

Les gels Pola Day et Pola Night contiennent un agent désensibilisant qui bloque l'influx nerveux entre la pulpe et la dentine. Ils permettent donc de réduire la sensibilité pour un confort optimal du patient.

pH neutre

Le pH neutre de Pola Day et Pola Night facilite une libération complète du peroxyde sans compromettre le confort du patient.

Doses recommandées

poladay à 3%	2 ou 3 fois 30 minutes par jour OU 1 fois 60 minutes par jour
--------------	---

poladay à 7,5%	1 ou 2 fois 30 minutes par jour OU 1 fois 45 minutes par jour
----------------	---

poladay à 9,5%	2 fois 15 minutes par jour OU 1 fois 30 minutes par jour
----------------	--

polanight à 10%	de 2 heures à toute la nuit
-----------------	-----------------------------

polanight à 16%	de 90 minutes à toute la nuit
-----------------	-------------------------------

polanight à 22%	1 fois 45 minutes par jour
-----------------	----------------------------

poladay CP à 35%	1 fois 45 minutes par jour
------------------	----------------------------

Pola Day and Pola Night Value Pack Kit Seringues 36 x 3g

Réapprovisionnement
7700060 (peroxyde d'hydrogène à 7,5%)
7700061 (peroxyde d'hydrogène à 9,5%)
7700062 (peroxyde de carbamide à 16%)

2 seringues à résine de remplissage

2 seringues à résine de remplissage de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement
7700012

Matériau de gouttière – 20 pièces

Recharge de 20 pièces
Réapprovisionnement
7750005

Pochettes cosmétiques Pola

– pack de 10
10 pochettes
Réapprovisionnement
7700999

Étuis de gouttières – pack de 5

5 étuis de gouttières
Réapprovisionnement
7750008



POLADAY CP

Seulement 15 minutes une fois par jour ou en programme d'attaque

Super rapide, à faire chez soi

Pola Day CP peut être donné au patient à emporter chez soi pour l'appliquer dans les gouttières. À partir de 15 minutes une à deux fois par jour, les patients noteront immédiatement la différence.

Ou en programme d'attaque


Appliquer Pola Day CP aux gouttières du patient de la même façon que pour un système ambulatoire. Ils peuvent le porter pendant 30 minutes dans la salle d'attente avant de rentrer chez eux. La plupart des patients gagneront un écart significatif d'éclaircissement. Une fois qu'ils ont constaté les résultats de cette séance de 30 minutes, les patients vont prendre conscience de l'efficacité du blanchiment dentaire avant même d'attaquer le traitement ambulatoire.

Un patient qui souhaite des dents plus blanches réclame un résultat visible immédiatement dès la fin de la première séance. Grâce à un système ambulatoire comme Pola Day ou Pola Night, les patients peuvent maintenant effectuer eux-mêmes la procédure à domicile. Éveillez leur intérêt pour le blanchiment en leur donnant un 'sourire d'avance' avec Pola Day CP.

Avantages

Pola Day CP présente les mêmes avantages que Pola Day et Pola Night:

- Libération de fluor
- Agents désensibilisants
- pH neutre
- Conditionneur et adoucissant naturels
- Haute teneur hydrique
- Épaississant de haut poids moléculaire
- Haute viscosité
- Gout agréable

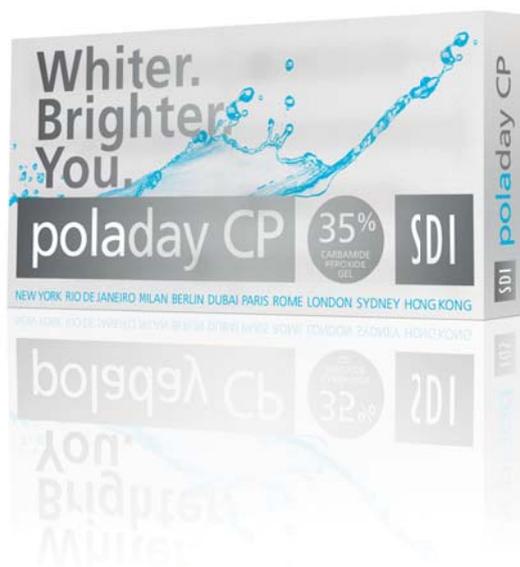

Pola Day CP
Kit Seringue 4 x 1,3g
peroxyde de carbamide à 35%
Réapprovisionnement
7700324

Pola Day CP
Kit Seringue 50 x 1,3g
peroxyde de carbamide à 35%
Réapprovisionnement
7700325



SOOTHE

Un gel désensibilisant au nitrate de potassium et à libération de fluor élevée.



Désensibilisant

Soothe, un gel à libération contrôlable fluoré à 0,1% et contenant 6 % de nitrate de potassium, soulage la sensibilité dentaire liés au chaud/froid et ou agression chimiques. Contrairement à d'autres désensibilisants, Soothe n'interfère pas avec le processus de blanchiment.

Appliquer avant ou après le blanchiment

Appliquer avant ou après le blanchiment Une sensibilité peut apparaître au cours ou au terme d'un blanchiment. Soothe peut s'appliquer avant ou après le traitement.

Soothe
Kit Seringue 4 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150002

Soothe
Kit Seringue 50 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150033

POLAPAIN

Gel blanchissant dentaire de type 'vernis'.

Simple et rapide à utiliser pour le praticien

Ne nécessite pas la fabrication de gouttières. Les patients vous achètent simplement un kit et appliquent le traitement eux-mêmes. Pola Paint est un excellent vecteur de communication pour votre activité en blanchiment dentaire.

Simple et rapide à utiliser pour le patient

Simple et rapide à utiliser pour le patient Votre patient peut appliquer Pola Paint à tout moment de la journée : Pola Paint est indécélable. Le gel à basse viscosité et pouvoir séchant rapide permet la formation d'une pellicule sur la surface de la dent. Les patients peuvent choisir de blanchir une seule dent ou toute leur dentition.

Retouche hors pair

Pola Paint se prête idéalement à la retouche pour les patients ayant déjà blanchi leurs dents : avec Pola Paint, la blancheur prend encore plus d'éclat!

Économique

Pola Paint est la première étape qui encouragera vos patients à éclaircir leurs dents. Nul besoin de gouttières. Pas de temps au fauteuil.

Libération de fluor

L'adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Pas de gouttières encombrantes

Pola Paint ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires, gouttières ou autres. Votre patient pourra poursuivre ses activités quotidiennes sans que personne ne puisse deviner qu'il blanchit ses dents.

Arôme agréable

Dégage un arôme durable de menthol.



Pola Paint
1 tube Pola Paint de 5,5mL
Réapprovisionnement
7700058

PLV GRATUITE

Outils publicitaires de promotion du blanchiment auprès des patients.



Affiche Pola modèle féminin seulement
Réapprovisionnement M100096



Affiche Pola modèles masculin et féminin
Réapprovisionnement M100093



Affiche Pola Office+
Réapprovisionnement M100095



DVD de démonstration pour professionnels Pola Office
Réapprovisionnement M770954



DVD de démonstration salle d'attente Pola Office
Réapprovisionnement M770985



Autocollant de fenêtre Pola
Réapprovisionnement M100100






Brochures patient Pola
Réapprovisionnement M770246



Flyer Pola pour accompagner les factures
Réapprovisionnement M770226

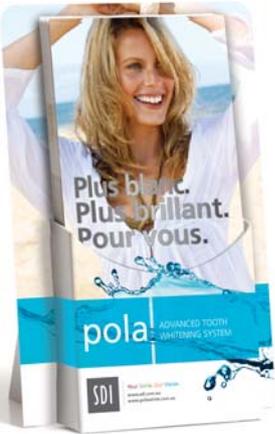

Distributeur Pola de brochures patient
Réapprovisionnement M100098



Affichage Pola Avant et après
Réapprovisionnement M100097



Élément de plafond Pola
Réapprovisionnement M100099



PLV personnalisée


Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via téléchargement sur :

Visit: www.sdi.com.au/fr-ca/marketing-materials/

INSTRUCTIONS

Pola Office+

- 1 Enregistrer la teinte préopératoire.
- 2 Nettoyer les dents avec une pâte à base de pierre ponce.
- 3 Mettre en place l'écarteur de lèvre puis enduire de vaseline la surface des lèvres qui sera exposée.

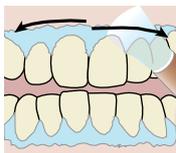


- 4 Sécher les dents et appliquer de la barrière gingivale. Photopolymériser en effectuant des mouvements de balayage.


- 5 Fixer fermement un embout de mélange à la seringue Pola Office+ à l'écart du patient. Verser une petite quantité de gel sur le mélangeur afin d'assurer un mélange adéquat.



- 6 Appliquer directement une **fine** couche de gel sur toutes les dents à traiter.

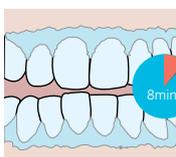


- 7 Laisser reposer le gel sur les dents pendant 8 minutes. Vous pouvez utiliser la lampe à photopolymériser en suivant les instructions du fabricant.

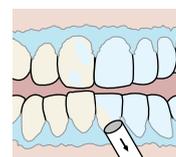


- 8 Éliminer le matériau à l'aide de l'aspiration.



- 9 Effectuer les étapes 6 à 8 trois fois (quatre, le cas échéant).

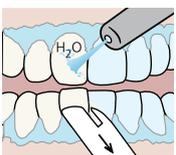

- 10 Après la dernière application, éliminer tout le gel, puis rincer et aspirer.

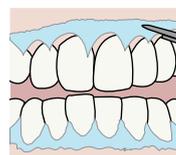


- 11 Retirer la barrière gingivale.





Pola Office

- 1 Enregistrer la teinte préopératoire.
- 2 Nettoyer les dents avec une pâte à base de pierre ponce.
- 3 Mettre en place l'écarteur de lèvres puis enduire de vaseline la surface des lèvres qui sera exposée.

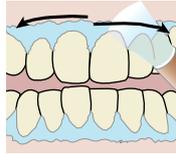

- 4 Sécher les dents et appliquer de la barrière gingivale. Photopolymériser en effectuant des mouvements de balayage.




- 5 Ouvrir le flacon de poudre. Prendre une seringue Pola Office, fixer **fermement** un embout et enfoncer **sans forcer** le piston pour laisser **échapper** la pression.




- 6 Transférer avec **précaution** le contenu de la seringue dans le flacon.




- 7 Mélanger immédiatement avec une microbrosse jusqu'à obtention d'un gel homogène.

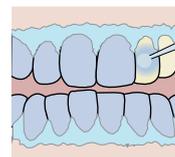


- 8 Appliquer directement une épaisse couche de gel sur toutes les dents à traiter.

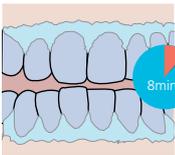


- 9 Laisser reposer le gel sur les dents pendant 8 minutes. Vous pouvez utiliser a lampe à photopolymériser en suivant les instructions du fabricant.

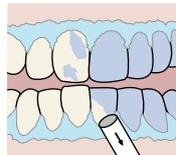


- 10 Éliminer le matériau à l'aide de l'aspiration.

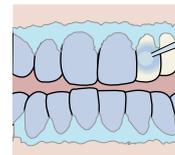

- 11 Effectuer les étapes 8 à 10 trois fois (quatre, le cas échéant). Remarque : un flacon doit être utilisé pour seulement 2 applications ou 20 minutes au plus après avoir procédé au mélange.

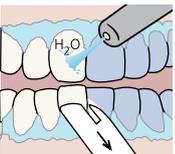


- 12 Après la dernière application, éliminer tout le gel, puis rincer et aspirer.

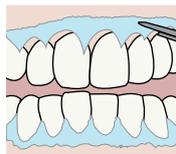

- 13 Retirer la barrière gingivale.

Pola Day / Pola Night / Pola Day CP

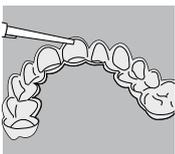

- 1 Déposer une gouttelette de gel dans chaque réservoir de la gouttière pour les dents à traiter.



- 2 Mettre en place la gouttière avec le gel sur les dents.



- 3 Retirer le surplus de gel avec un tissu ou une brosse souple et sèche.



- 4 Après le traitement, retirer la gouttière. Rincer la gouttière et la bouche à l'eau tiède.



- 5 Brossez les dents.



visitez www.polawhite.com

* Opalescence Boost, Zoom2! et Venus White Max ne sont pas des marques commerciales de SDI Limited

‡ Publications et données internes SDI

† Données internes établies sur la base de tests cliniques externes

SDI

Fabriqué en Australie par SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australie 1 800 337 003, Autriche 00800 022 55 734, Brésil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734, Allemagne 0800 100 5759, Irlande 01 886 9577, Italie 800 780625, Nouvelle-Zélande 0800 734 034, Espagne 00800 022 55 734, Royaume-Uni 00800 022 55 734, États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

M770962 G



†D036M7709621C