



riva cem

MODYFIKOWANY ŻYWICĄ CEMENT GLASJONOMEROWY

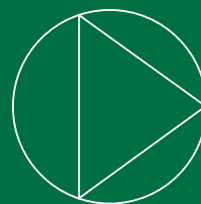

Łatwy w użyciu w postaci pasta-pasta
przeznaczony do cementowania prac
protetycznych

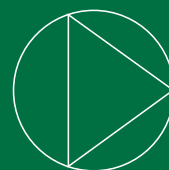

bez strat z możliwością wstępnej polimeryzacji

SDI

Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

riva cem

riva cem jest chemoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach rtg, uwalniającym fluor, modyfikowanym żywicą cementem glasonomerowym przeznaczonym do osadzania prac protetycznych na podbudowie metalowej i ceramicznej oraz aparatów ortodontycznych.



riva cem jest dostępna w uniwersalnym jasnożółtym odcieniu w dwukomorowej strzykawce ułatwiającej mieszanie ręczne.

Riva Cem
1 x 8.5g riva cem strzykawka
kod zamówienia : 8800700

Cechy charakterystyczne



OPCJA POLIMERYZACJI ŚWIATŁEM DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO USUWANIA NADMIARU CEMENTU



Polimeryzuj nadmiar materiału przez 5 sekund z każdej strony lampą LED o dużej mocy (460-480 nm). Następnie delikatnie usuń nadmiar cementu przy pomocy skalpela lub zgłębnika. Nadmiar materiału może być także łatwo usunięty kiedy cement osiągnie fazę żelową po około 1 min 45 sek.



WYSOKA SIŁA WIĄZANIA

Wytrzymałość na ścieranie (MPa)



BARDZIEJ ODPORNY NA PRZEBARWIENIA



NIE ZAWIERA BPA



TRWAŁE UWALNIANIE FLUORU



ŁATWY DO MIESZANIA SYSTEM PASTA-PASTA

Dane Techniczne	riva cem
Czas pracy	1'45"
Czas wiązania	4'30"
Wytrzymałość na ścieranie (MPa) - zębina	13.03 ± 3.40
Wytrzymałość na ścieranie (MPa) - szklivo	9.99 ± 3.17
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)	108

Rodzaj Materiału	rodzaj odbudowy
PFM	Korony i mosty
Żywice do prac tymczasowych	Korony, mosty, inlay i wkłady (z włókna szklanego)
Metal	Korony, mosty, inlay i onlay, aparaty ortodontyczne
Ceramika o wysokiej wytrzymałości	Korony i mosty
Uzupełnienia pełnoceramiczne	Inlay

SDI

Your Smile.Our Vision.
www.sdi.com.au