

ESTÁ NA HORA DE BRILHAR



ENCONTRE UMA TONALIDADE
MAIS BRANCA E BRILHANTE.

pola


SISTEMA DE BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO AVANÇADO

FALE COM OS SEUS PACIENTES SOBRE O SISTEMA
DE BRANQUEAMENTO ADEQUADO PARA ELES

SDI

POLA ADVANCED TOOTH WHITENING

DESCUBRA UMA
TONALIDADE
MAIS BRANCA
E BRILHANTE

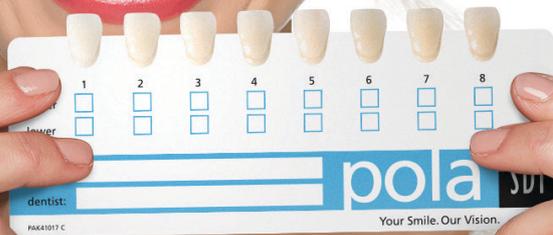

OFEREÇA AOS PACIENTES
UM GUIA PASSO-A-PASSO PARA
O BRANQUEAMENTO EM CASA:

WWW.POLAWHITE.COM.AU





polaoffice+

Dentes visivelmente mais brancos em apenas 45 minutos.



polanight

Solução de branqueamento adequada para pacientes com dentes sensíveis.



poladay

Encaixa-se nos planos diários do seu paciente.



pola llluminate

Ferramenta de retoque ideal para manter um sorriso mais brilhante e mais branco.



soothe

Gel com libertação de nitrato de potássio e fluoreto para aliviar a sensibilidade dentária.

poladay & polanight

OFEREÇA AOS SEUS PACIENTES A POSSIBILIDADE DE LEVAREM UM SISTEMA AVANÇADO DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO POLA PARA CASA

Libertação de fluoreto

poladay e polanight contêm fluoreto, que ajuda a fortalecer os dentes para protegê-los contra a sensibilidade.

Seguro e cómodo

A fórmula exclusiva com elevado teor de água de poladay e polanight tem um pH neutro para proteger as gengivas e os dentes durante o tratamento.

Branqueamento eficaz

O efeito de branqueamento desejado pode ser atingido em apenas 15 minutos ou pode ser convenientemente aplicado durante a noite enquanto dorme. Existem várias intensidades diferentes de poladay e polanight que os pacientes podem utilizar em casa - utilize o seletor pola para escolher o produto mais adequado para o seu paciente (aceda a www.polawhite.com.au).

Tecnologia de dessensibilização Pola (PDT)

poladay e polanight contêm a tecnologia PDT para ajudar a prevenir sensibilidade após o tratamento.

Qual a diferença entre poladay e polanight?

poladay consiste numa gama de géis caseiros à base de peróxido de hidrogénio, especificamente concebidos para atingir resultados de branqueamento em pacientes com tempo limitado.

polanight consiste numa gama de géis caseiros à base de peróxido de carbamida que proporcionam resultados de branqueamento ideais para pacientes que têm dentes mais sensíveis.

Ambas as gamas estão disponíveis em várias intensidades diferentes, com concentrações mais baixas destinadas a dentes mais sensíveis.

Intensidades do polanight

10% de peróxido de carbamida

16% de peróxido de carbamida

Intensidades do poladay



3% de peróxido de hidrogénio

6% de peróxido de hidrogénio



GUIA PASSO-A-PASSO PARA A APLICAÇÃO FEITA EM CASA

1. Coloque uma pequena gota de gel em cada compartimento da moldeira para os dentes que estão a ser tratados.
2. Fixe a moldeira, com o gel, em torno dos dentes.
3. Limpe o excesso de gel na boca com um tecido ou com uma escova suave seca.
4. Após o tratamento, retire a moldeira. Lave a moldeira e a boca com água morna.
5. Lave os dentes.

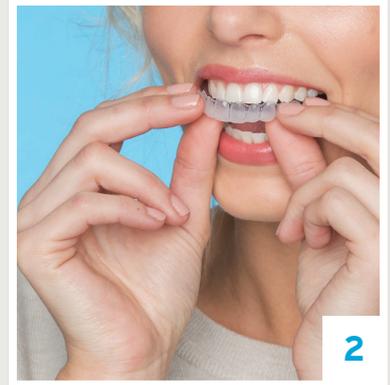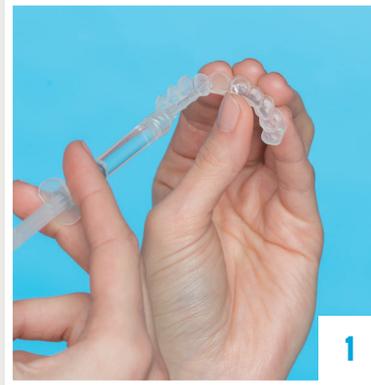

poladay e polanight 10 x 1.3g Kits de seringas

7700353 (3% HP)
7700359 (6% HP)
7700371 (10% CP)
7700377 (16% CP)



poladay e polanight 4 x 1.3g Mini Kits

7700351 (3% HP)
7700357 (6% HP)
7700369 (10% CP)
7700375 (16% CP)



poladay e polanight 50 x 3g Kit de unidoses

7700079 (6% HP)
7700085 (16% CP)



poladay e polanight 50 x 1.3g Kit de unidoses

7700355 (3% HP)
7700361 (6% HP)
7700373 (10% HP)
7700379 (16% HP)

pola luminate

7700092
1 X 5.5mL tubo de Pola



Bolsas cosméticas para o Pola

7700999
10 unidades da bolsa

soothe

8150002
4 X 1.2mL seringas Soothe



8150033
50 X 1.2mL seringas Soothe

Caixas para moldeiras: 5 pack

7750008
5 caixas

polanight Pacote económico

7700089 (16% CP)
36 seringas de 3g de polanight
6 bolsas cosméticas Pola
36 pontas de seringa, 6 guia de cores
6 folhetos de instruções

Spacer Resin 2 seringas

7700012
2 seringas de 1g

Placas para moldeiras 20 unidades

7750005
20 unidades

Nota: cada embalagem inclui acessórios.

CP: peróxido de carbamida

HP: peróxido de hidrogénio

polaooffice+

DENTES VISIVELMENTE MAIS BRANCOS EM APENAS 45 MINUTOS.

polaooffice+ tem uma fórmula exclusiva que liberta ingredientes ativos para iniciar o branqueamento.

Ao desestruturar-se e libertar os iões de peróxido, rápido e eficazmente, o processo de branqueamento da fórmula **pola** é acionado e não requer luz UV para acelerar o tratamento.

polaooffice+ branqueia os dentes em segurança em 45 minutos com um pH neutro para proteger os dentes e as gengivas dos seus pacientes.

Indicações:

Branqueamento de dentes vitais e não vitais escurecidos.



POLAOFFICE+ FOI CONCEBIDO A PENSAR NO CONFORTO DO PACIENTE

TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NO CONSULTÓRIO

Uma fórmula com 6% de peróxido de hidrogenio para branquear os dentes em pouco tempo de espera.

Só é preciso aplicar uma camada fina nos dentes que é facilmente removida com a lavagem.

DESSENSIBILIZADOR INTEGRADO

polaooffice+ foi concebido para proteger terminações nervosas e nervos dentários sensíveis com a tecnologia de dessensibilização Pola (Pola Desensitising Technology, PDT).

polaooffice+ tem um pH neutro e conta com a PDT para garantir que o branqueamento só atua nos dentes, minimizando irritações, queimaduras, dor ou danos nas gengivas a longo prazo.

polaooffice+	6% de peróxido de hidrogénio
poladay – 3%	3% de peróxido de hidrogénio
poladay – 6%	6% de peróxido de hidrogénio
polanight – 10%	10% de peróxido de carbamida (equivalente a 3,3% de peróxido de hidrogénio)
polanight – 16%	16% de peróxido de carbamida (equivalente a 5,3% de peróxido de hidrogénio)

polaooffice+ 6% Kit para três pacientes

3 seringas de polaooffice+ 6% de 2,8 ml
Acessórios
7700467

polaooffice+ 6% Kit para um paciente

1 seringa de polaooffice+ 6% de 2,8 ml
Acessórios
7700466

Barreira gengival

2 seringas de 1g de barreira gengival
Acessórios
7750006



GUIA PASSO-A-PASSO PARA APLICAÇÃO NO CONSULTÓRIO

1. Determine e registre a tonalidade pré-operatória utilizando o guia de tonalidades Pola incluído na embalagem.
2. Limpe os dentes APENAS com uma pasta profilática.
3. Coloque os retratores de bochechas e depois cubra a superfície dos lábios exposta com vaselina.
4. Seque os dentes e aplique uma barreira gengival em ambos os arcos, sobrepondo ligeiramente o esmalte e os espaços interproximais.
5. Fotopolimerize num movimento pendular entre 10 a 20 segundos.
6. Coloque a ponta na seringa do polaoffice+ longe do paciente. Extraia uma pequena quantidade de gel num bloco de mistura até obter um gel uniforme.
7. Utilizando a ponta como orientação, aplique diretamente uma camada fina de gel em todos os dentes que estão a ser tratados. Uma camada fina ajudará a evitar que o gel escorra. NOTA: é melhor não elevar a ponta ao passar de um dente para o outro. Aplique um movimento contínuo.
8. Deixe o gel atuar durante 15 minutos.
9. Retire-o por aspiração. Nota: é normal que fique uma camada de gel residual na superfície dos dentes.
10. Repita os passos 7 a 9 três ou quatro vezes. Após a última aplicação, aspire e retire o gel através de lavagem.
11. Registe a tonalidade final.



Nota: a fórmula polaoffice+ só pode ser administrada por dentistas. Não é adequada para aplicação caseira por parte dos pacientes. Aceda a www.polawhite.com para mais informações.

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

MATERIAL DE MARKETING PARA PROMOVER OS BRANQUEMENTOS NA SUA CLÍNICA



POSTER POLADAY
Pedido M100274



POSTER POLANIGHT
Pedido M100275



POSTER POLADAY E POLANIGHT
Pedido M100280



FOLHETO POLA PARA PACIENTE
Pedido M100321



STAND ANTES E DEPOIS DO POLA
Pedido M100326



STAND PARA FOLHETO POLA
Pedido M100290



ADESIVO PARA JANELA
Pedido M100289




SACOLA SDI
Pedido M100141



MAIS MATERIAL DE MARKETING
Está disponível para download mais material de marketing. Visite www.sdi.com.au

ENCONTRE UMA TONALIDADE BRANCA MAIS BRILHANTE.

- Todos os produtos de branqueamento avançado **pola** foram concebidos com o **conforto dos pacientes** em mente
- Soluções de branqueamento adequadas para aplicação em casa com **poladay**, **polanight** e **pola luminate**.

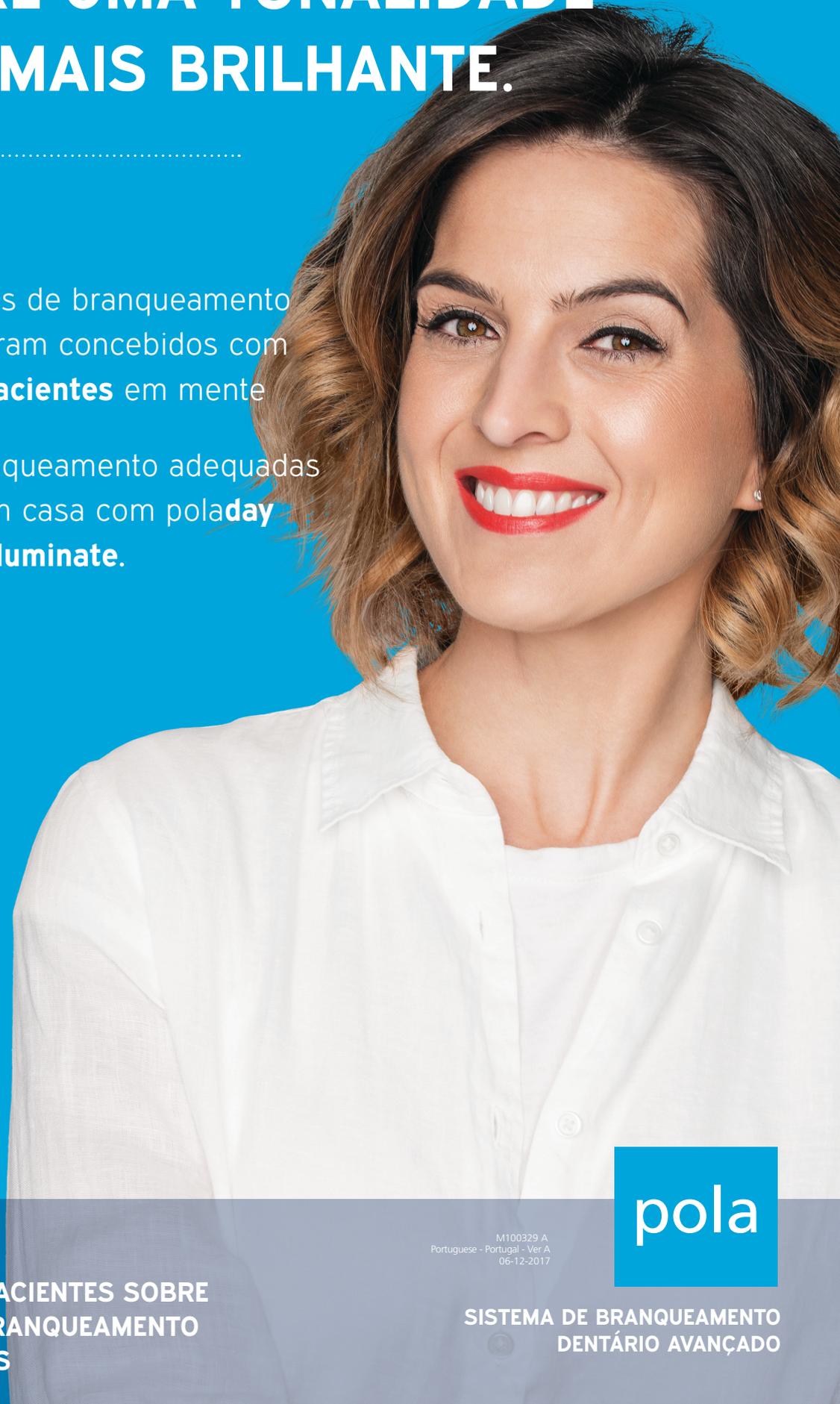

**FALE COM OS SEUS PACIENTES SOBRE
UM PROGRAMA DE BRANQUEAMENTO
ADEQUADO PARA ELES**

M100329 A
Portuguese - Portugal - Ver A
06-12-2017

pola

**SISTEMA DE BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO AVANÇADO**