

super etch

37% PHOSPHORIC ACID ETCHANT GEL

ÄTZGEL AUS 37%IGER PHOSPHORSÄURE

ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL A 37%

ACIDO FOSFORICO GEL AL 37%

GEL DE MORDANÇAGE A L'ACIDE PHOSPORIQUE A 37%

GEL MORDENZANTE CON ACIDO FOSFORICO AL 37%

ETS GEL 37% FOSFORZUUR

37% FOSFORSYRE ÆTSGEL

37% FOSFORSYRE ETSEGEL

37% FOSFORIHAPPO ETS AUSGEELI

ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΕΛΕ 37% ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ŻEL DO WYTRAWIANIA SZKLIWA I ZĘBINY

37%-OS FOSZFORSÁV GÉL

SÖÖVITUSGEEL (37% FOSFORHAPPE)

37% FOSFORNA KISLINA ZA JEDKANJE V GELU

37% FOSFORSKĀBES KODINĀŠANAS GĒLS

37% FOSFORO RŪGŠTIES IŠĒSDINIMO GELIS

LEPTACÍ GEL S 37% KYSELINOU FOSFOREČNOU

LEPTACÍ GÉL S 37% KYSELINOU FOSFOREČNOU

リン酸エッチャント 37%

超級酸蝕劑



SDI

37% de forte aderência

Super Etch ácido fosfórico em gel a 37% para esmalte/dentina

Fácil de controlar o gel Super Etch escoo de acordo com a direção definida e não com a força da gravidade.



super etch

A linha de ácidos da SDI consiste em:	mL	g
Seringa Super Etch Gel	1.2 mL	1.5 g
Seringa Super Etch Gel	2 mL	2.5 g
Seringa Super Etch Gel	5 mL	6.25 g
Seringa Super Etch Gel	9.6 mL	12 g
Seringa com gel Super Etch de baixa viscosidade	1 mL	1.25 g
Frasco ácido em Gel	15 mL	18.75 g
Frasco ácido líquido	15 mL	18.75 g
Seringa Super Etch Jumbo	25 mL	31.25 g

Ácido fosfórico a 37%

O ácido fosfórico entre 30% e 40% oferece condicionamento ácido adequado da superfície dental em 15 a 20 segundos de aplicação ⁽¹⁾. As baixas concentrações requerem um tempo maior de aplicação, retardando desnecessariamente os procedimentos.

Indicações

- Esmalte
 - Dentina
-

Compatível com

- Adesivos
 - Compósitos
 - Compômeros
 - Ionômeros de vidro
 - Selantes
 - Cimentações
-

Para limpar

- Porcelana
-

Gel Azul

Oferece alta visibilidade para um condicionamento preciso.

Não interfere no adesivo

O espessante do gel de sílica inorgânica Super Etch não oferece obstáculos à ação do adesivo. Outros ácidos bloqueiam a ação do adesivo com resíduos de polímeros semelhantes à cera que podem inibir a penetração e a aderência do material.

Gel Tixotrópico

O gel Super Etch oferece um condicionamento preciso. Agite o gel para reduzir a viscosidade.

Super Etch

O gel Super Etch cria microporos na superfície do esmalte e remove a camada de esfregaço desbloqueando os canalículos dentinários. O gel facilita a penetração do adesivo e a formação dos "tags" de resina. Super Etch é fundamental para a retenção mecânica de uma restauração.

Condicionador ácido incolor

Um ácido fosfórico a 37% líquido incolor também está disponível para pacientes que sofrem de alergia a corantes.



Seringas de Super Etch

A seringa Super Etch é fácil de utilizar e evita o escoamento inadequado do produto. A extrusão direta agiliza os procedimentos, possui dosagem econômica e facilita o acesso a áreas difíceis.

Super Etch LV (Low viscosity - de baixa viscosidade)

Super Etch LV foi especialmente elaborado para selantes com uma formulação metade líquido / metade gel. O excelente escoamento do Super Etch LV garante maior contato do ácido com a superfície, possibilitando maior penetração em cavidades e fissuras, o que reforça a adesão mecânica e o sucesso da retenção do selante. Ideal para ser usado com o Conseal f da SDI e todos os outros selantes.

Pontas para seringas de Super Etch


Pontas para Super Etch LV – bitola 27, pré-curvadas, para as menores fissuras e cicatrículas. Pontas Super Etch – pontas retas – bitola 23.

instruções:

para aplicação direta em qualquer restauração

Super Etch com viscosidade regular

- 1 Limpe e isole o dente
- 2 Aplique Super Etch , ácido fosfórico a 37%, sobre a superfície do dente por 20 segundos

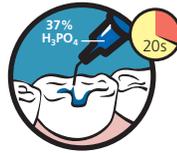

- 3 Lave bem com água
- 4 Remova o excesso de água. Mantenha a superfície úmida
- 5 Aplique o adesivo de esmalte/dentina Stae até saturar todas as superfícies internas ou aplique um adesivo, de acordo com as instruções do fabricante



- 6 Seque levemente com jato de ar seco destituído de óleo por 2 segundos, até evaporar o solvente. A superfície deve estar brilhante

- 7 Polimerize por 10 segundos



- 8.1 Aplique Wave / Wave MV / Wave HV composito com liberação de flúor ou



- 8.2 Aplique o composito Ice (anterior/posterior) ou Rok (posterior)




- 9 Polimerize em incrementos de 2 mm de espessura por 20 segundos
- 10 Faça o polimento e dê o acabamento

instruções:

para selantes de cavidade e de fissuras

Super Etch LV – Low Viscosity – de baixa viscosidade

- 1 Limpe e isole o dente
- 2 Condicione a superfície do dente com Super Etch LV por no mínimo 30 segundos e não mais do que 60 segundos

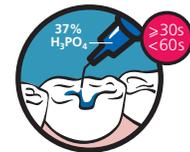

- 3 Lave bem com água
- 4 Seque completamente o dente. Atenção: um campo seco é essencial para todas as etapas
- 5 Injete o Conseal f diretamente ou aplique-o com uma escova



- 6 Polimerize o Conseal f por 20 segundos



CUIDADO: Verifique se o dosador está devidamente encaixado na seringa do Super Etch, do Wave ou do Conseal f, girando-o **firmemente** dentro da seringa.

super etch



Super Etch bulk kit

10 seringas de 2ml (2.5g)
50 pontas descartáveis
Pedido 8100045

Super Etch kit

3 seringas de 2 ml (2.5g)
25 pontas descartáveis
Pedido 8100040

Super Etch mini kit

4 seringas de 1.2ml (1.5g)
20 pontas descartáveis
Pedido 8100039

Seringa Super Etch 5ml

1 seringa de 5ml (6.25g)
5 pontas descartáveis (calibre 23)
Pedido 8100055

Seringa Super Etch 12g

1 seringa de 9.6ml (12g)
25 pontas descartáveis
Pedido 8100052

Super Etch LV bulk kit

10 seringas de 1ml (1.25g) com Super Etch
de baixa viscosidade
40 pontas descartáveis
Pedido 8100044

Seringas Super Etch Jumbo 2x25ml

2 seringas de 25mL (62.5g) de Super Etch
50 pontas descartáveis
Pedido 8100059

Pontas descartáveis para as seringas Super Etch

25 pontas descartáveis de uso único (calibre 23)
Pedido 8100050

Pontas descartáveis para as seringas de Super Etch

200 pontas descartáveis de uso único (calibre 23)
Pedido 8100060

Pontas descartáveis para Super Etch com baixa viscosidade

20 pontas descartáveis de uso único (calibre 27)
Pedido 8100061

Etchant gel, Azul

1 frasco de 5ml (18.75g) de Etchant gel
Pedido 8100020

Etchant gel, transparente

1 frasco de 15mL (18.75g) de líquido Etchant
Pedido 8100025

(1) Reality, Volume 13, 1999, 1-232.



Fabricado na Austrália pela SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Austrália 1 800 337 003
Áustria 00800 022 55734
Brasil 0800 770 1735
França 00800 022 55 734
Alemanha 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Itália 800 780625
Nova Zelândia 0800 734 034
Espanha 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



M810005 D

+D036M8100051