

ES HORA DE BRILLAR



VAS A SER EL BLANCO
DE TODAS LAS MIRADAS.

pola


SISTEMA AVANZADO
DE BLANQUEAMIENTO
DENTAL

ACONSEJE A SUS PACIENTES UN PROGRAMA DE
BLANQUEAMIENTO APROPIADO PARA ELLOS

SDI

SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

RECUPERA
EL BLANCO
NATURAL DE
TUS DIENTES

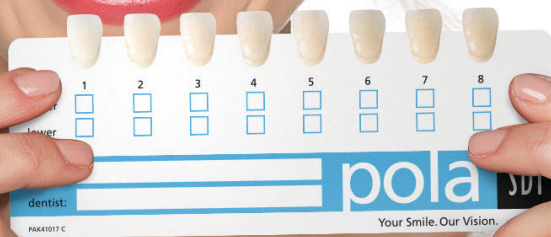

PROPORCIONE A SUS PACIENTES
UNA GUÍA PASO A PASO PARA EL
BLANQUEAMIENTO EN CASA:

WWW.POLAWHITE.COM.AU





polaoffice+ & polaoffice

Dientes visiblemente más blancos en tan solo 30 minutos.



poladay CP

Solo 15 minutos, una vez al día.



polanight

La solución domiciliaria más segura para su paciente.



pola luminare

Complemento ideal para mantener una sonrisa más blanca y brillante.



poladay

Tratamiento domiciliaria más rápido para aplicaciones diarias.



soothe

Gel desensibilizante de liberación de nitrato de potasio y flúor.

poladay & polanight

SU PACIENTE SE LLEVARA EL BLANQUEAMIENTO DENTAL POLA DE FORMA DOMICILIARIA CON TODA LA SEGURIDAD REQUERIDA.

Liberación de flúor

Tanto **poladay** como **polanight** contienen flúor, el cual ayuda a fortalecer el diente para protegerlo contra la sensibilidad.

Seguro y cómodo

poladay y **polanight** cuya formulación tiene un alto contenido en agua y pH neutro, protege las encías y los dientes durante el tratamiento.

Blanqueamiento eficaz

El efecto blanqueador deseado puede lograrse en tan solo 15 minutos o puede aplicarse cómodamente durante la noche mientras duerme. Hay una gran variedad de concentraciones de **poladay** y **polanight** que los pacientes pueden utilizar de forma domiciliaria. Utilice el selector de **pola** para elegir el producto más apropiado para su paciente (visite www.polawhite.com.au).

Tecnología Desensibilizante Pola (TDP)

poladay y **polanight** contiene TDP que contribuye a la prevención de la sensibilidad postoperatoria.

¿Cuál es la diferencia entre **poladay** y **polanight**?

poladay consiste en una amplia gama de gel a base de peróxido de hidrógeno de aplicación domiciliaria específicamente diseñados para lograr resultados de blanqueamiento en pacientes que dispongan de poco tiempo.

polanight es una gama de gel a base de peróxido de carbamida de aplicación domiciliaria que proporcionan resultados de blanqueamiento óptimos en pacientes que tengan dientes más sensibles.

Ambas gamas están disponibles en una variedad de diferentes concentraciones, que se adapta a cada historial de sensibilidad del paciente.

concentraciones de **polanight**

Peróxido de carbamida al 10%

Peróxido de carbamida al 16%

concentraciones de **poladay**

Peróxido de hidrógeno al 3%

Peróxido de hidrógeno al 6%

pola lumininate

Con un 6 % de peróxido de hidrógeno, **pola lumininate** es nuestro blanqueador dental mediante cepillado de mayor fuerza. Cepille directamente sobre los dientes sin necesidad de férulas. Diseñado para utilizarse durante tan solo 30 minutos, **pola lumininate** es la herramienta de retoque ideal para mantener brillante y blanca su sonrisa entre sus visitas al dentista. Con más de 60 aplicaciones en un tubo y un sabor de menta de larga duración, puede blanquear sus dientes en cualquier lugar y momento.

concentraciones de **pola lumininate**

Peróxido de hidrógeno al 6%



GUÍA PASO A PASO PARA APLICACIÓN DOMICILIARIA

1. Aplique una pequeña gota de gel en cada compartimiento de la férula para los dientes que se someterán al tratamiento.
2. Coloque la férula conteniendo el gel alrededor de sus dientes.
3. Limpie cualquier exceso de gel de la boca con un pañuelo desechable o un cepillo dental suave y seco.
4. Después del tratamiento, retire la férula. Enjuague la férula y la boca con agua tibia.
5. Cepille los dientes.



poladay y polanight 10 x 1.3g Kits de jeringa

7700101 (3% HP)
7710020 (6% HP)
7700157 (10% CP)
7700160 (16% CP)



poladay y polanight 4 x 1.3g Mini kits

7700100 (3% HP)
7710021 (6% HP)
7700156 (10% CP)
7700159 (16% CP)



poladay y polanight 50 x 1.3g Kit de dispensador

7700355 (3% HP)
7700361 (6% HP)
7700373 (10% CP)
7700379 (16% CP)



pola luminate

7700092 (6% HP)
1 X 5.5mL Pola Luminata



soothe

8150002
4 X 1.2mL jeringas de Soothe



Estuche de 5 férulas: Paquete de 5

7750008
paquete de 5 estuche para férulas

Resina espaciadora Repuesto de 2 jeringas

7700012
2 x espaciadora de 1g
jeringas de resina

Material para férulas: 20 piezas

7750005
20 piezas de repuesto

Bolsillos Cosméticos Pola: Paquete de 10

7700999
10 bolsillos

Nota: cada pack incluye accesorios.

CP: Peróxido de carbamida

HP: Peróxido de hidrógeno

polaooffice+ & polaooffice

DIENTES VISIBLEMENTE MÁS
BLANCOS EN TAN SÓLO 30 MINUTOS.

polaooffice+ contiene una fórmula única que activa inmediatamente el tratamiento de blanqueamiento.

Mediante la acción de descomposición de los iones de peróxido, el proceso de blanqueamiento **pola** se activa. El uso de la luz no es necesario, pero recomendable para acelerar el proceso.

polaooffice+ El blanqueamiento más rápido del mundo, blanquea los dientes con seguridad en treinta minutos con un pH neutro que protege las encías y los dientes de sus pacientes.

Indicaciones:

Blanqueamiento de dientes decolorados vitales y no vitales.



POLAOFFICE+ & POLAOFFICE SE HAN DISEÑADO PARA LA COMODIDAD DEL PACIENTE

REDUCIR AL MÁXIMO EL TIEMPO PAADO EN EL SILLÓN DENTAL

Una fórmula única de **peróxido de hidrógeno al 37,5 %**, diseñada para blanquear los dientes en tan solo 30 minutos.

Requiere una fina capa aplicada sobre el diente que se retira fácilmente al enjuagar.

DESENSIBILIZANTE INTEGRADO

polaooffice+ se ha diseñado para proteger los nervios dentales y terminaciones nerviosas sensibles con la Tecnología Desensibilizante Pola (TDP).

polaooffice+, con pH neutro y TDP, garantiza que el blanqueamiento solo actúa en los dientes, reduciendo al mínimo la irritación, la sensación de ardor, el dolor o los daños a las encías a largo plazo.

polaooffice+	Peróxido de hidrógeno al 37,5 %
polaooffice	Peróxido de hidrógeno al 35%
poladay – 3%	Peróxido de hidrógeno al 3%
poladay – 6%	Peróxido de hidrógeno al 6%
polanight – 10%	Peróxido de carbamida al 10% (equivale a un 3,3% de peróxido de hidrógeno)
polanight – 16%	Peróxido de carbamida al 16% (equivale a un 5,3% de peróxido de hidrógeno)
poladay CP	Peróxido de carbamida al 35% (equivale a un 11,7% de peróxido de hidrógeno)

POLAOFFICE+ GUÍA PASO A PASO EN CONSULTA

1. Determine y registre el tono preoperativo empleando la guía de tonos de Pola proporcionada en el envase.
2. Limpie los dientes SOLO con piedra pómez a base de flúor. Realice una profilaxis.
3. Coloque el retractor labial y a continuación proteja los tejidos blandos expuestos con vaselina.
4. Seque los dientes y aplique la barrera gingival en ambas arcadas, cubriendo ligeramente el esmalte y los espacios interproximales.
5. Polimerice la barrera gingival hasta que endurezca (10-20 segundos).
6. Sin exponer al paciente, coloque la boquilla mezcladora a la jeringa del polaoffice+. Dispense una pequeña cantidad de gel en un bloc de mezclas hasta conseguir un gel uniforme.
7. Utilizando la boquilla como guía, aplique directamente una fina capa de gel a todos los dientes que se someterán al tratamiento. NOTA: Es mejor no levantar la boquilla al desplazarse entre dientes. Haga movimientos continuos..
8. Deje el gel actuar por un período de 8 minutos.
9. Retírelo con succión, usando una punta aspiradora. Nota: Es normal que quede una capa residual de gel en la superficie de los dientes.
10. Repita tres veces los pasos 7 a 9 (de manera opcional 4 veces). Tras la última aplicación, succione y enjuague todo el gel para retirarlo por completo.
11. Registre el tono final.



1



4



11

Nota: polaoffice+ solo puede ser aplicado por dentistas. Visite www.polawhite.com.au para obtener más información.

polaoffice+ Kit de 3 pacientes

3 X jeringas de Pola Office+ de 2,8 mL
3 x jeringas de barrera gingival de 1g
Accesorios
7700412 (3 x retractores de mejillas)
7700411 (sin retractores)



polaoffice Kit de 3 pacientes

6 x polaoffice de 0,3g Botes de polvo
6 x jeringas polaoffice de 2 mL
3 x gingival de 1g Jeringas de barrera
Accesorios
7700011



2 x jeringa de barrera gingival de 1g

2 x jeringa de barrera gingival de 1g
Accesorios
7750006

polaoffice+ Kit de 1 paciente

1 X jeringa de polaoffice+ de 2,8 mL
1 x jeringa de barrera gingival de 1g
Accesorios
7700427 (with 1 x Retractor)
7700426 (sin retractor)



polaoffice Kit de 1 paciente

2 x polaoffice de 0,3 g Botes de polvo
2 x jeringas polaoffice de 2 mL
1 x jeringa de barrera gingival de 1g
Accesorios
7700031



MATERIAL PROMOCIONAL

SOPORTE MARKETING PARA PROMOCIONAR EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL EN SU CLÍNICA.



PÓSTER POLADAY

Pedido M100337



PÓSTER POLANIGHT

Pedido M100338



PÓSTER POLAOFFICE+

Pedido M100339



PÓSTER POLAOFFICE+ Y POLADAY

Pedido M100340



PÓSTER POLADAY Y POLANIGHT

Pedido M100341



PÓSTER POLAOFFICE+ Y POLANIGHT

Pedido M100342

MATERIAL PROMOCIONAL

SOPORTE MARKETING PARA PROMOCIONAR EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL EN SU CLÍNICA.



PANFLETO ANTES Y DESPUÉS DE POLA CON SOPORTE
Pedido M100351



PORTA FOLLETOS POLA PARA PACIENTES
Pedido M100290



FOLLETOS POLA PARA PACIENTES
Pedido M100343



BOLSA SDI
Reorder M100141



CALCOMANÍA POLA PARA VENTANAS
Reorder M100289



MATERIAL PROMOCIONAL PERSONALIZADO
Más material promocional personalizado se encuentra disponible mediante descargas.
Visite: www.sdi.com.au

VAS A SER EL BLANCO DE TODAS LAS MIRADAS.

- **polaoffice+** es más rápido que los blanqueamientos de la competencia. Protocolo de 30 min*.
- Todos los productos de blanqueamiento POLA se han diseñado pensando en la comodidad del paciente.
- **Las aplicaciones domiciliarias poladay, polanight y pola llluminate** se adaptan a las necesidades de su trabajo diario.

*Basado en el tiempo total del tratamiento comparado con el tiempo que aparece en las instrucciones de competidores.

PERSONALICE UN TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE SU PACIENTE



SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

